

Bruksanvisning Pannpinne

Pannpinnen levereras med 3 olika längder på pekdelens, för att kunna anpassa till olika sätt att använda pannpinnen.

Pannpinnen används med ett pannband med en insydd aluminiumplatta som pinnen fästs vid. Den insydda plattan har även ett skumgummilager med "formminne".



Montera ihop Pannpinne



Skruva fast röret med gänga på pannbandet. Dra åt låsmuttern mot pannbandet. Dra inte åt för hårt. Trä ev på en bit krympslang – se sista momentet nedan.



För in det vinklade mässingsröret i utvald längd på pannpinne. Vrid samtidigt som du pressar in mässingsröret, detta låser fast mässingsröret i pannpinne.



Montera nu pannpinne på det fastskruvade röret genom att på samma sätt som tidigare vrida och pressa in mässingsröret. Justera som ni vill ha det. Vill man ytterligare låsa fast rörelserna mot varandra så medföljer en bit krympslang med lim på insidan. Trä över en bit slang så att det överlappar ett par cm. Värm sedan försiktigt med tex värmepistol eller cigarettändare.



Plattan i pannbandet kan försiktigt böjas för att bättre passa huvudets form.

Support

Leena Lundgren 070-2287119, leena.lundgren@picomed.se

Erik Kortebäck 070-5358558, erik@picomed.se