




GRID PAD

Komma igång

Grid Pad Go 8 Gen 2

Gäller från: 2020-11-30

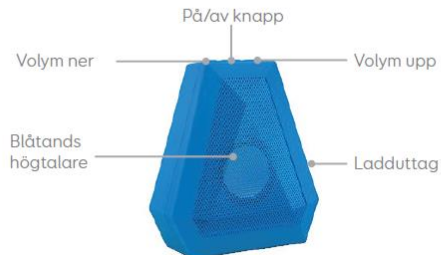

Skötsel av din Grid Pad

När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen.

Rengöring

Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa. Torka av apparaten med ett mildt rengöringsmedel på lätt fuktad trasa. Inga slipande eller polerande rengöringsprodukter får användas.

Väta och stötar

Grid Pad Go är IP65¹ klassad och det innebär att den klarar att vara med ute i alla väder då datorn både klarar regn och är dammtät.

Blåttandshögtalaren är IPx4² klassad.

¹IP65 betyder att utrustningen är dammtät och spolsäker (12,5 l/minut i 15 minuter) vattenstrålar från alla håll.


²IPx4 betyder att utrustningen är striltät (5,0 l/minut i 5 minuter) vattenstrålar från alla håll.

Batteri och drift

Din Grid Pad Go kan användas upp till 4,5 timmar. Tiden varierar beroende på hur apparaten används vilka inställningar som är gjorda samt om det finns andra tillbehör kopplade till apparaten.


Starta din Grid Pad

Starta din Grid Pad genom att trycka på power-knappen på toppen av apparaten:

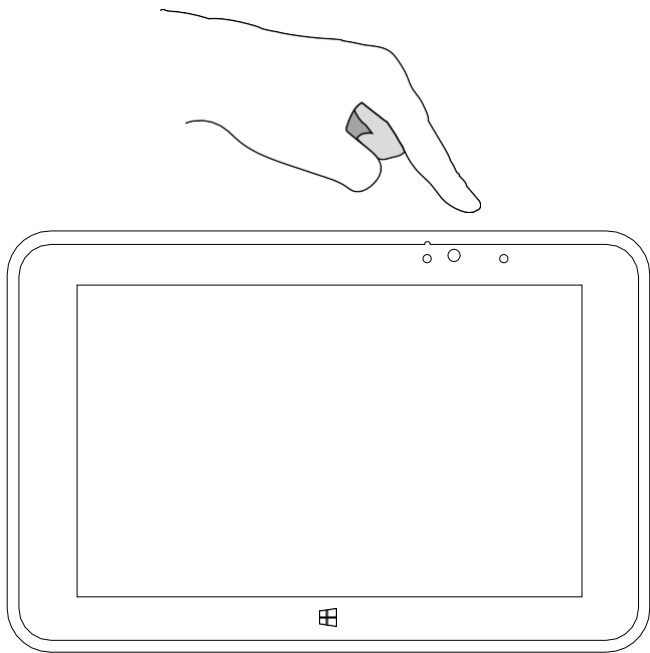


Ladda din Grid Pad

Ladda din Grid Pad enligt bilden nedan.

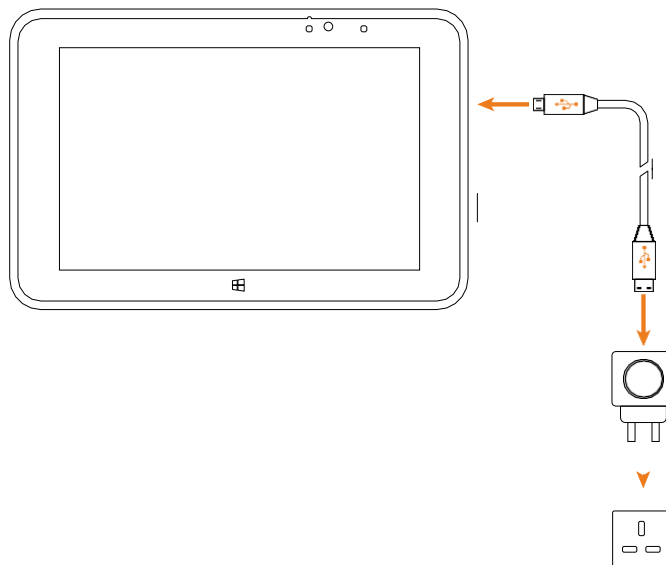

Blåtandshögtalare

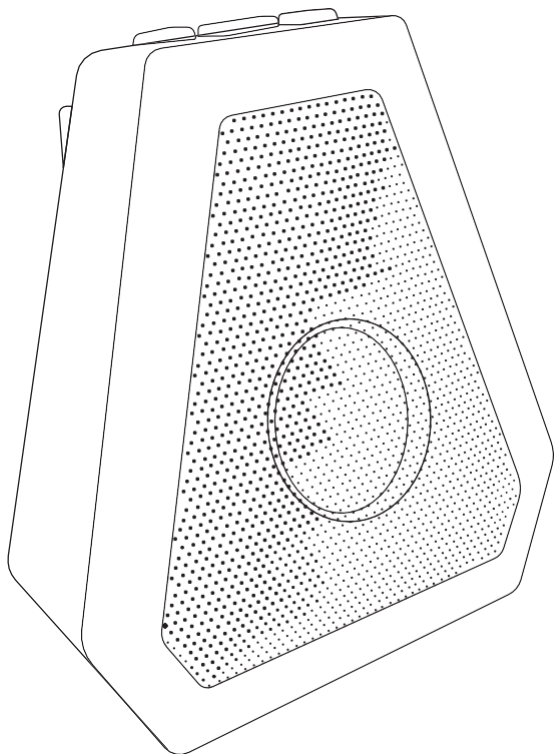

Din Grid Pad apparat levereras med en högkvalitativ blåtandshögtalare som är ihop parad och redo att användas.

Högtalaren levereras med en egen laddare. Batteritiden varierar beroende på hur högtalaren används – Vi rekommenderar att ni laddar högtalaren samtidigt som ni laddar er Grid Pad. En röd lysdiod visar att högtalaren laddas.

När högtalaren slås på spelas en kort melodi. En blå lysdiod blinkar när högtalaren kopplat upp sig med din Grid Pad.

För att stänga av högtalaren, tryck och håll nere mittenknappen till det spelas ett avstängningsljud.

Högtalaren laddas via vilken 5V laddare som helst, eller via en USB-port på en dator.

OBS. Högtalaren måste vara påslagen innan uppstart av Grid 3 då en ny användare skapas.



