



PICOMED

AMANEO BTI / BLÅTAND



SKU: 1828588



PRODUCT DESCRIPTION

AMAneo BTi / Blåtand gör det möjligt att styra en iPad eller iPhone med mus/huvudmus/joystick eller ja vilket styrsätt som helst! (så länge det inte krävs en mjukvara installerad).

Utöver möjligheten att styra en iPad/iPhone med ett pekdon kan också skakningar motverkas och på så sätt möjliggöra t.ex. en person med tremor att styra sin iPad/iPhone. Dwell klick kan ställas in så att pekdonet automatiskt gör ett klick där man stannar på skärmen.




PICOMED

AMAneo BTi Blåtand fungerar på:

iPhone 5S eller nyare
iPad 4 eller nyare
iPad Mini eller nyare utan

Anslut genom att gå till menyn Blåtand på din iPad/iPhone, hålla sedan nere + och - samtidigt på AMAneo och Anslut "AMAneo BTi" och då kommer det en markör på skärmen.

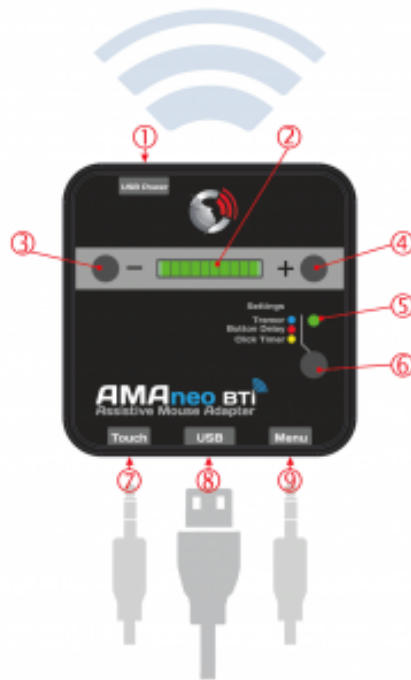



PICOMED

① [Micro USB-kontakt för laddning \(20 timmars batteritid\)](#)

② [Status display](#)

③ [Minus knapp \(minskning av värde för vald funktion\)](#)

④ [Plus knapp \(öka värdet för vald funktion, och för att kontrollera laddningsnivå\)](#)

⑤ [Status LED](#)

⑥ [On/Off, och Funktions knapp \(Funktioner: Skakfilter, Klick fördröjning/Känslighet Dwell-klick\)](#)

⑧ [USB port för anslutning för pekdon](#)

⑦ [3,5 mm port för anslutning av extern knapp \(motsvarar vänster musknapp och funktionen Välj\)](#)

⑨ [3,5 mm port för anslutning av extern knapp \(motsvarar höger musknapp och funktionen öppna Assistive meny\)](#)

Film som visar AMAneo BTi / Blåtand

<https://www.youtube.com/watch?v=wW207mxmUi0>



PICOMED