

## Bruksanvisning

# Malem Klocka

### Beskrivning

Klocka med vibrationsalarm och möjlighet till inspelade meddelanden.

Två typer av alarm kan användas, endast en typ kan vara aktiverad åt gången.

Typ 1. Upp till 12 alarm på specifik tid, dagligen

Typ 2. Ett Intervall-alarm som "larmar" vid ett visst bestämt intervall, mellan 1 minut och 23 timmar och 59 minuter.

Till varje alarm kan ett 10s meddelande spelas in. Meddelandet kan spelas upp om och om igen.

Malem klockan har inte bakgrundsbelysning.

### 1. Display



Högtalarikonen visas under tiden man ställer in alarm samt vid normal användning, om något alarm har ett meddelande som är aktiverat



Vibrationsalarm ikonen visas om något alarm är aktiverat.



Ikonen för Intervall-alarm visas när detta ställs in och om sådant alarm finns inställt och aktiverat.

### 2. Knappfunktioner:

**C** Ändra-knapp. Tryck och håll för att ändra eller spela in meddelande. Endast aktiv vid vissa tillfällen.

**S** Inställningsknapp. Tryck och håll för att byta inställningar, eller tryck för att toggla dag/sekund på display.

**M** Mode-knapp. Tryck en gång för stoppur, två för Intervall-alarm, tre för tidsbestämda alarm, fyra för Aktivera/Deaktivera larm

► Play-knapp. Tryck en gång för att höra senast uppspelat eller inspelat meddelande



### 3. Stoppur (tidtagning):

Tryck **M** en gång, sekunder blinkar

Tryck **C** för att "nolla" sekunder

Tryck **S** för att Starta

Tryck **S** för att Stoppa

För mellantid tryck **C** efter Starta

#### 4. Tid och datuminställning:

Tryck och håll **S** tills sekunder blinkar

Tryck **C** för att "nolla" sekunder

Tryck **S** en gång, minuter blinkar

Tryck **C** för att ställa minuter

Tryck **S** en gång, timmar blinkar

Tryck **C** för att ställa timmar

Tryck **M** för att toggla PM/AM

Tryck **S** en gång. Månader blinkar

Tryck **C** för att ställa månad

Tryck **S** en gång. Dag blinkar

Tryck **C** för att ställa dag

Tryck **S** att avsluta och visa normal display, klocka

Tryck (ev) **S** för att toggla veckodag/sekunder

#### 5. Intervall-alarm (Repeterande Timer) : TR

Tryck **M** två gånger

Tryck och håll **C** för att "nolla" display

Tryck och håll **S** tills minuter blinkar

Tryck **C** för att ställa minuter (1min-59min)

Tryck **S** en gång, timmar blinkar

Tryck **C** för att ställa timmar (0-23h)



Tryck **S** en gång för att avsluta inställning och starta nedräkning av Intervall-alarm (om aktivering behövs, se avsnitt 8.)

Vid tryck **C** en gång – Ursprungligt vald Intervall-tid visas

Vid tryck och håll **S** startar Timer om från ursprungligt vald Intervall-tid

Vid tryck och håll **C** nollställs Timer

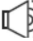
Tryck **M** för att återgå till klocka (tid och datum)

Symboler  och  visas i normal klockdisplay. Om inte – aktivera: se avsnitt 8.

#### 6. Inspelning av meddelande till Intervall-alarm

Tryck **M** tre gånger

Tryck **S** upprepat, gå igenom alarm 1-12 (1-3-5-7-9-11-) tills symbol TR visas

Tryck **C** för att visa symbol  (om inte redan visas)

Tryck **C** igen för att inte visa (avaktivera)

Tryck och håll **C** OBS! håll inte för mic-hålet!

- Vänta ca 1 sekund innan du börjar tala in. Håll nära munnen och tala in meddelande. Max 10s.

Tryck  för att lyssna på meddelandet. Spela in igen om du önskar

Tryck **M** för att återgå till klocka samt visa ,  och 

## 7. 12 st Alarm på inställt klockslag, vibration och/eller meddelande RL

Tryck **M** tre gånger

Tryck **S** upprepat tills önskat larmnr visas (1-12)

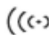

Tryck och håll **S** tills minuter blinkar

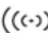

Tryck **C** för att ställa minuter

Tryck **S**, timmar blinkar

Tryck **C** för att ställa timmar

Tryck **S** för att välja typ av alarm (samt bekräfta vald tid)

Tryck **C** för att upprepat för att välja ikoner vibration  och ev. meddelande 

För att spela in meddelande på valt larmnr (1-12), se till att båda symbolerna  och  visas genom att upprepat trycka **C**

Tryck och håll **C** OBS! håll inte för mic-hålet!

- Vänta ca 1sekund innan du börjar tala in. Håll nära munnen och tala in meddelande. Max 10s.

Tryck **▶** för att lyssna på meddelandet. Spela in igen om du önskar.

Tryck **S** för att ev. välja nästa larmnr att ställa in

Tryck och håll **S** tills minuter blinkar

Repetera stegen ovan. Tryck **C** för att ställa minuter... osv

Tryck **M** för att återgå till klocka

För att aktivera de valda alarmen, se till att **RL** visas i Aktivera/deaktivera fönstret. Se avsnitt 8.

## 8. Aktivering av valda alarm och Repetitionstimer

Tryck **M** fyra gånger tills **--:--AL**, **--:--TR** eller **--:--OF** visas.

Tryck **S** för att togglar **AL** (inställt klockslag)/**TR** (Periodisk Repetitionstimer)/**OF** (båda larmtyper inaktiverade, tex om man ej vill bli störd)

Om inget larm finns inställt för **AL** resp **TR** visas inte valet i inställningen.

OBS! Endast ett av larmtyperna kan vara aktiverade åt gången.

## 9. Varaktighet och avaktivering av Larmvibration

Larmvibration varar i 5s och följs direkt av inspelat meddelande (om inspelat/aktiverat)

Larmvibration avbryts vid tryck på någon knapp

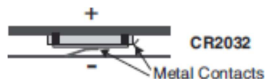
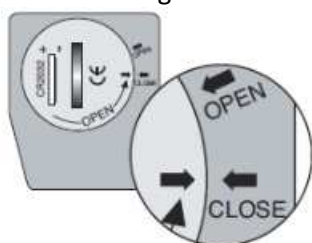
Du kan spela upp ett inspelat meddelande obegränsat antal gånger.

## 10. Byte av batteri

Rekommendationen är att låta en klockbutik utföra bytet.

Batteri: **CR2032**

Batterilivslängd: Ca 3 månader beroende av användning.



Öppna batterilucka genom att vrida batteriluckan moturs med hjälp av ett mynt (se symbol på luckan). Böj ev. upp metallblecket i klockan för att säkra en bra kontakt med batteriet.

Var försiktig med o-ringen

Tryck på alla fyra knappar samtidigt i 2 sekunder

Placera det nya batteriet, Observera polaritet (+ mot dig)

Skruva tillbaka batteriluckan, Observera att O-ringen hamnar korrekt för att motverka fukt/smuts.

Om klockans display är tom eller visar fel, ställ in enligt avsnitt 1.

## Ansvar och friskrivning

Vänligen notera att Malemklockan är avsedd att utgöra ett komplement som påminnelse i form av vibration och meddelande. Den får inte ersätta mänsklig övervakning eller vård och tillverkaren Malem Medical eller återförsäljaren Picomed AB kan inte krävas ansvar för konsekvenser av användning, felaktig användning eller defekt klocka.

## Support

Vid behov av support eller service, kontakta Picomed.

Kontaktuppgifter hittar du på [www.picomed.se](http://www.picomed.se). Eller maila till [post@picomed.se](mailto:post@picomed.se)