




GRID PAD

Manual
Grid Pad Go 10

Smartbox

Grid Pad

Grid Pad Go 10

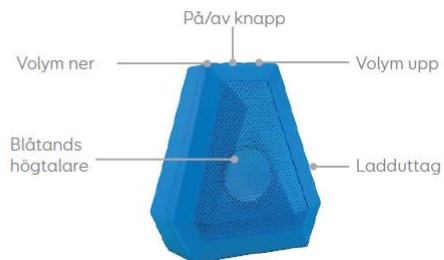

Skötsel av din Grid Pad

När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen.

Rengöring

Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa. Torka av apparaten med ett mildt rengöringsmedel på lätt fuktad trasa. Inga slipande eller polerande rengöringsprodukter får användas.

Väta och stötar

Grid Pad Go är IP65¹ klassad och det innebär att den klarar att vara med ute i alla väder då datorn både klarar regn och är dammtät.

Blåttandshögtalaren är IPx4² klassad.

¹IP65 betyder att utrustningen är dammtät och spolsäker (12,5 l/minut i 15 minuter) vattenstrålar från alla håll.


²IPx4 betyder att utrustningen är striltät (5,0 l/minut i 5 minuter) vattenstrålar från alla håll.

Batteri och drift

Din Grid Pad Go kan användas med ögonstyrning upp till 7 timmar. Tiden varierar beroende på hur apparaten används vilka inställningar som är gjorda samt om det finns andra tillbehör kopplade till apparaten.


Starta din Grid Pad

Starta din Grid Pad genom att trycka på power-knappen på toppen av apparaten:

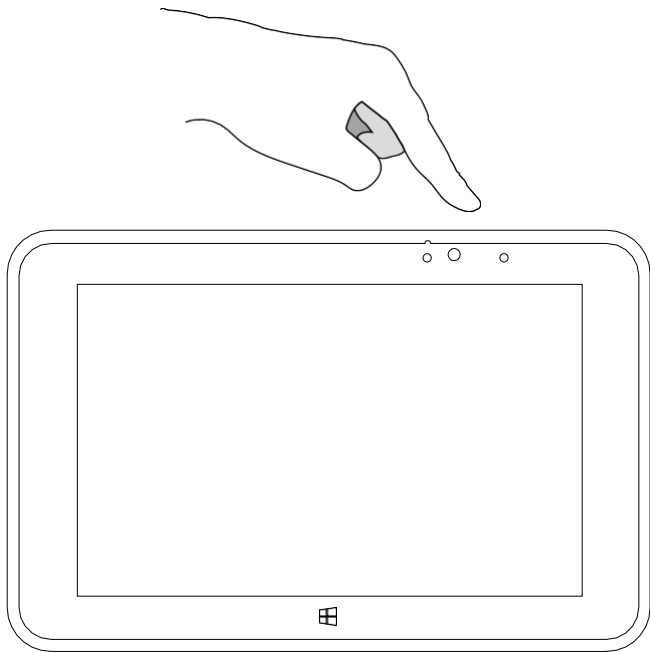


Ladda din Grid Pad

Ladda din Grid Pad enligt bilden nedan.

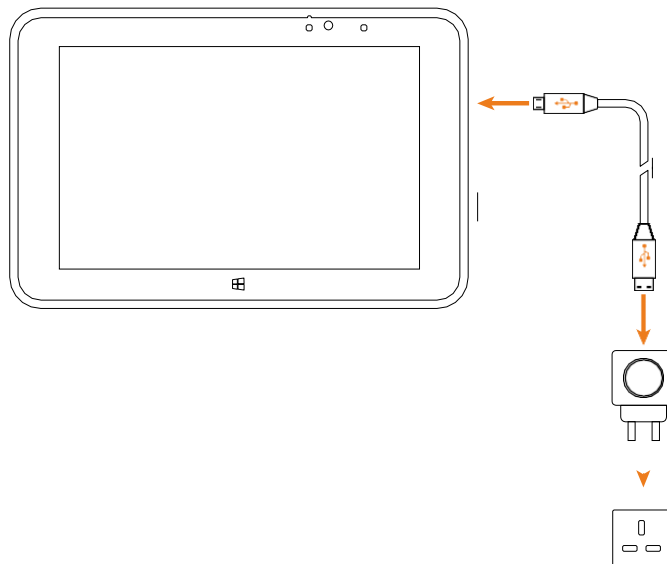

Blåttandshögtalare

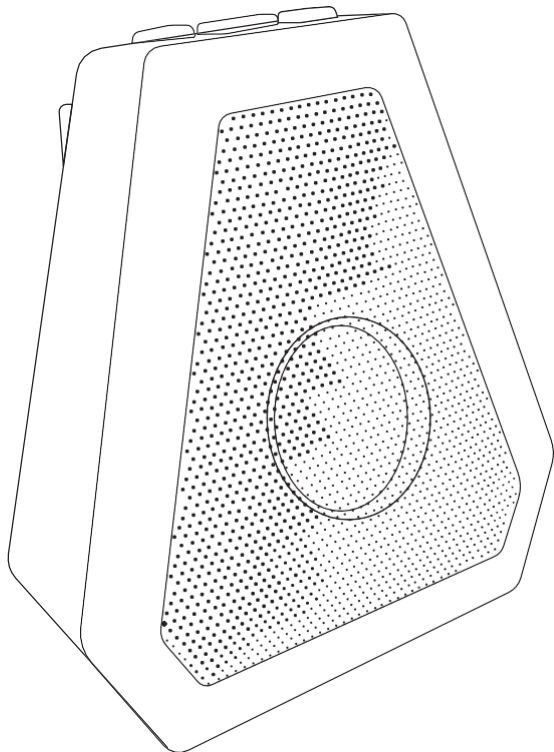

Din Grid Pad apparat levereras med en högkvalitativ blåttandshögtalare som är ihop parad och redo att användas.

Högtalaren levereras med en egen laddare. Batteritiden varierar beroende på hur högtalaren används – Vi rekommenderar att ni laddar högtalaren samtidigt som ni laddar er Grid Pad. En röd lysdiod visar att högtalaren laddas.

När högtalaren slås på spelas en kort melodi. En blå lysdiod blinkar när högtalaren kopplat upp sig med din Grid Pad.

För att stänga av högtalaren, tryck och håll nere mittenknappen till det spelas ett avstängningsljud.

Högtalaren laddas via vilken 5V laddare som helst, eller via en USB-port på en dator.

OBS. Högtalaren måste vara påslagen innan uppstart av Grid 3 då en ny användare skapas.

Para ihop Bluetooth högtalaren

Om du behöva para om din blåtands högtalare med din apparat, följ nedanstående steg: När du slår på högtalaren för första gången är den redan i ihop parad med din Grid Pad.

1. Håll nere den mittersta knappen ovanpå högtalaren, en lysdiod inuti högtalaren börjar blinka..
2. På din Grid Pad, gå till:
 - **Datorinställningar > Dator och Enheter > Bluetooth > Bluetooth På.**
Startar nu automatisk sökning.
 - Välj Boombot Mini.
 - Om du blir ombedd att skriva in en kod på din Grid Pad Go, skriv in 0000.

Om det inte finns något ljud

Kontrollera vilken högtalare Grid 3 använder. Inställningar – Tal – Rös/Konfigurera – Högtalare (Boombot Mini)

Stäng av Bluetooth högtalaren och kontrollera ljudet på apparatens högtalare.

Fungerar ljudet på apparaten så behöver Bluetooth högtalaren troligen laddas.

Fungerar ljudet inte på apparaten, kontrollera inställningarna i Grid 3. Inställningar – Tal – Konfigurera (under Tala) att du har en röst inställd och att volymen är på.

Om du fortfarande inte har något ljud, kontrollera volyminställningen i Windows.

Specifikationer

Operativsystem	Windows 10
Processor	Quad Core Intel® Atom™, Z3795 (1.6GHz till 2.4 GHz Torbo Boost)
Minne	4GB
Lagring	64GB SSD
Grafik	Intel® HD Graphics
Dimensioner (mm)	269 x 180 x 13
Vikt	750 g
Batteritid	Upp till 7 h
Kamera	2 MP fram och 8 MP bak
Skärm	10,1" 1920 x 1200 Skärm
Uppkoppling	Wi-Fi och Blåtand
Portar	1x USB 2.0, Hörlursuttag, Mini HDMI, Micro SD

Vad ingår med din Grid Pad Go

- Tablet dator med Windows 10
 - Grid 3 mjukvara för kommunikation, omgivningskontroll m.m.
 - Axelrem
 - Blåtands högtalare
-

Garanti

Grid Pad serien har 2 års garanti.

Reparation

Det är inte tillåtet att öppna Grid Pad datorn. Om apparaten behöver repareras kontakta Picomed.

Intyg om överensstämmelse

Denna enhet uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEC gällande medicintekniska produkter.

Denna produkt omfattas av direktiv 2002/96/EC Europaparlamentet och rådet om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE), och ska inte avyttras som osorterat kommunalt avfall. Vänligen utnyttja din lokala WEEE insamlingsanläggningar gällande avyttring av denna produkt.





PICOMED

www.picomed.se