



Komma igång

Smartbox

Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se)

Smartbox

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

Välkommen till

GRID 3

Grid 3 ger dig möjlighet att kommunicera, lära och kontrollera din värld.


Det här häftet hjälper dig att komma igång med Grid 3 och börja kommunicera på en gång. När du är igång, glöm inte att titta i Grid 3 träningskort och videos som ger dig hjälp att använda programmet.



Skapa en användare

Skapa en ny användare är det första du gör i Grid 3. När du skapat din användare, kan du börja att göra dina personliga inställningar, manövermetod, tal och mycket mer.


Du kommer att bli ombedd att skapa en profil första gången du öppnar programmet:

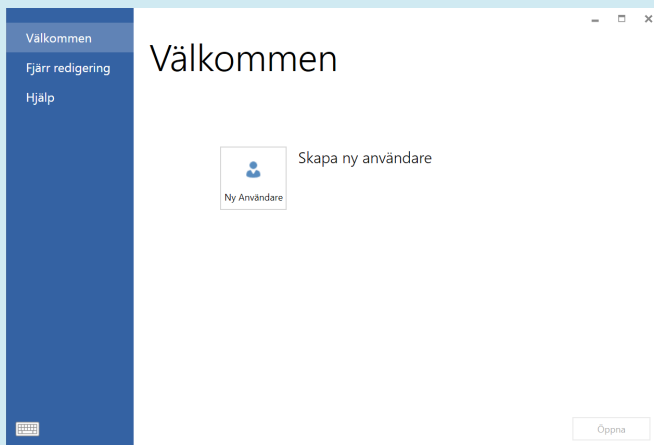

Skriv in ett namn för din användare, och välj språk och röst. Du kan också lägga till en bild om du vill.

★ Tips

Du kan använda kameran i Ändra Bild för att ta ett foto med din webbkamera.

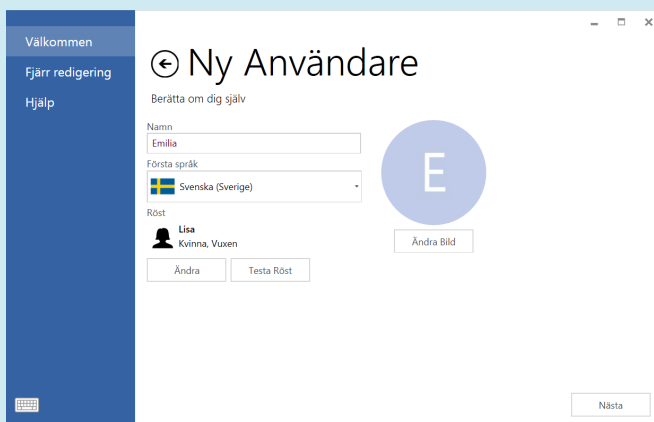

Välj den typ av anpassning som din användare kommer att behöva genom att välja från de sex alternativen.

Du kan lägga till eller ta bort anpassningar senare, så oroa dig inte om du är osäker just nu.




Grid 3 har kraftfull ordprediktion för snabbare kommunikation, Swiftkey teknologi.

För att dra nytta av dessa funktioner behöver du bekräfta för Grid 3 att lära in från dina ord, fraser och plats.

Du kan ändra dessa inställningar när som helst när du använder Grid 3.

Välj Skapa anpassning för att avsluta.

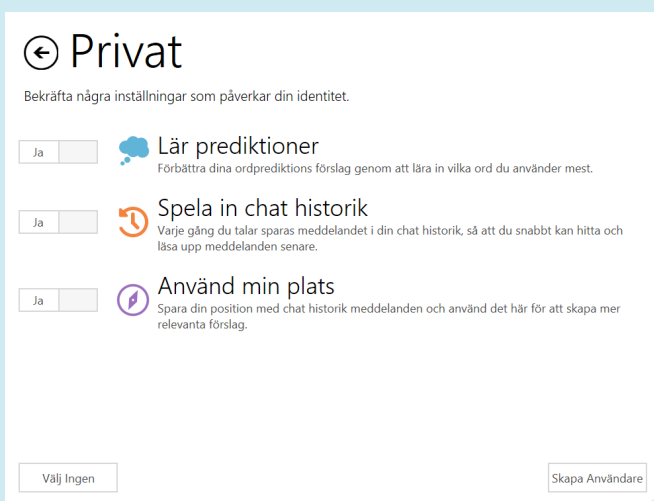

★ Tips

En användare kan också tillfälligt förhindra information. Om sin aktivitet som är sparad genom att använda Kommandot Privat läge.




Anpassningar


Grid 3 innehåller en hel rad av användbara anpassningar som kan användas direkt, eller som utgångspunkt för personliga anpassningar.

Symbol kommunikation

Symbol Talker A är avsedd för någon som börjar med alternativ kommunikation. Orden är organiserade efter kategorier/ämnen. På varje sida kan du bygga enkla meningar med en eller två val.

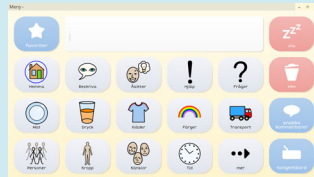

Symbol Talker B bygger på språk och inlärd färdigheter och erbjuder ordförråd för att bygga meningar med upp till tre val.

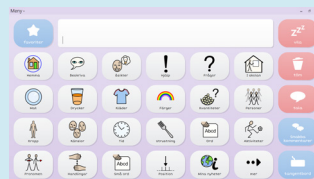

Symbol Talker C ger en övergång för personer som framgångsrikt har kommunicerat med en ämnesbaserad vokabulär och är redo för att använda mer språkverktyg för att säga mer. Kärnordförråd är det ord vi använder mest. I Symbol Talker C kan du få tillgång till vokabulär på varje ämnessida, vilket ger dig möjlighet att skapa ett mycket bredare utbud av meningar.




Symbol Talker D har kärnordförrådet redan på startsidan. Detta innebär att du kan skapa meningar mycket snabbt och du behöver bara gå till ämnessidorna för att hitta mindre vanliga ord. Det smarta Grammatik verktyget i Grid 3 hjälper dig att skapa grammatiskt riktiga meningar med färre val.




Text kommunikation

Fast Talker 3 är en kommunikations anpassning för kompetenta användare. Från startsidan kan du välja om du vill chatta eller öppna en av apparna, till exempel SMS, telefon, email, sociala medier, music och mycket mera.

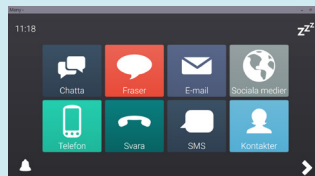

Fast Talker 3 utnyttjar Grid 3`s kraftfulla ordprediktion och chat historik för att avsevärt påskynda kommunikationen.

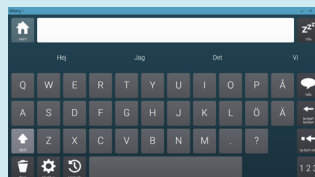

Text Talker är en textbaserat kommunikations system för kompetenta användare. Det innehåller ordprediktion och färdiga fraser i olika kategorier.




Enkelt tangentbord är ett enkelt qwerty tangentbord med symbol prediktion för personer som behöver stöd av symboler för språkinläring.




Interaktivt lärande

Interaktivt lärande är ett helt nytt sätt för personer att lära och utforska. Varje aktivitet har skapats för att göra det möjligt att lära sig genom lek och utvecklas mot alternativ kommunikation, och varje aktivitet är motiverande och följs av sidor som gör att du kan prata om vad du har åstadkommit. Du kan välja mellan 25 olika aktiviteter som är uppdelade i fyra inlärningsområden.


I **Orsak & Verkan** aktiviteterna kan du samverka med hunden Dilbert, spela på ett magiskt piano och skapa ditt eget fyrverkeri.

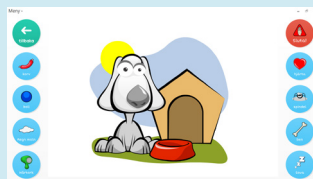

I **Välja aktiviteterna** ges du möjlighet att vara kreativ med ett urval av aktiviteter – från att vara modedesigner och visa upp dina kreationer på catwalken, att baka en galen kaka eller bygga dig en ny sportbil.

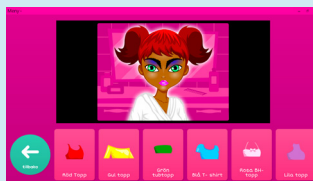

Aktiviteterna i Utmaning använder färdigheterna från de andra områdena. Du kan tävla med en bil runt en racerbana, spela fyra-i-rad och gå på ett actionfyllt äventyr med Robo snigel.

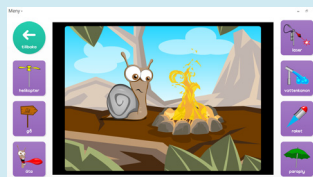

Interaktiva Visuella Scener ger motivation och dynamiskt innehåll som hjälper dig att lära och utveckla språket och skrivkunnighet.



Tillgängliga appar



Grid 3 levereras med ett paket av färdiga anpassningar för musik, foton, SMS, surfa på Internet, sociala medier, email, telefon, ordbehandling och mycket mera!

Sociala medier och Internet


Skriv ett inlägg, dela och utforska dina sociala medier konton med Twitter och Facebook anpassningarna. Skicka dina uppdateringar och tweets snabbt och enkelt.

Den inbyggda webbläsaren ger tillgång till webbsidor intuitivt och är uppdaterad med den senaste webbt tekniken. Rutorna som innehåller alla länkar på en webbsida kan genereras automatiskt.




Omgivningskontroll

Grid 3's omgivningskontroll ger dig möjlighet att styra allting, från lampor till din ytterdörr via din dator. Detta inkluderar allting du har som drivs av en infraröd fjärrkontroll, som din TV, satellitbox och musikanläggning.

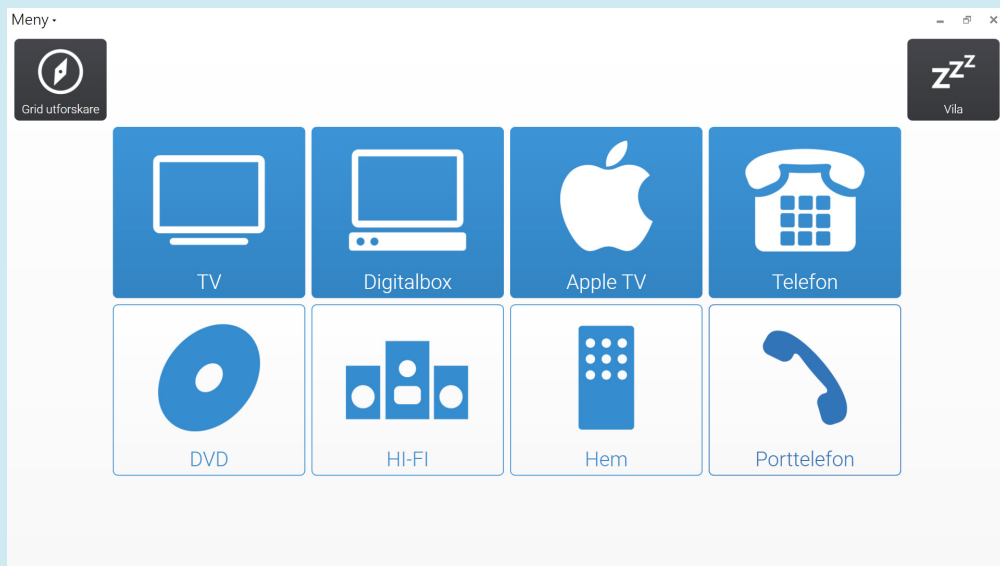

Två anpassningar ingår – en komplett, och en enklare för de som just har börjat styra sin omgivning.

Den rena och enkla designen av anpassningen Omgivningskontroll gör navigeringen och att göra val enkelt och intuitivt.

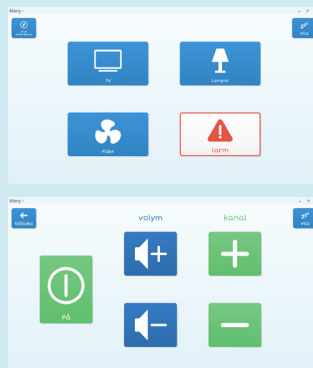


Datorkontroll


Datorkontroll i Grid 3 sätter dig i förarsätet, med alla verktyg du behöver för att få tillgång till din dator med ögonstyrning, musenheter eller kontakter. Det finns anpassningar för att kontrollera varje applikation du behöver för hemmet, arbetet eller skolan.

Två typer av anpassningar för Datorkontroll är tillgängliga - en för muspekare (optimerad för ögonstyrning och huvudmus användare), och en för kontaktstyrning.

Muspekar användare kan välja en av klick rutorna och därefter titta var som helst på skärmen för att zoom klicka med exakthet. Kontakt användare kan använda sig av en rad olika kommandon för full kontroll av en programvara.

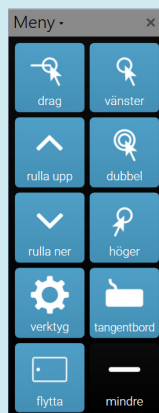

Skärmtangentbordet kan öppnas för att skriva i Windows program, Webbläsare, Microsoft Office med flera.


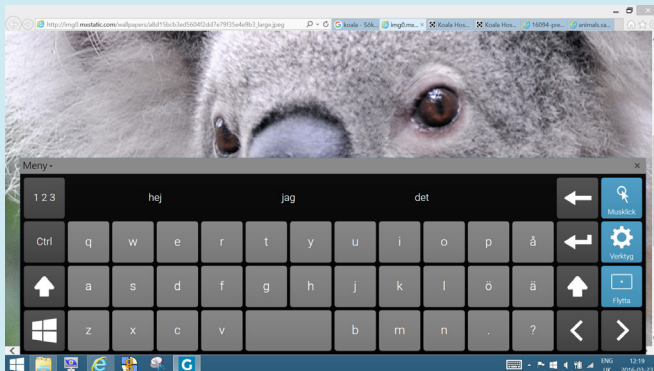


★ Tips

Glöm inte att kontrollera Online Grids för flera färdiga anpassningar.


Grid Utforskaren är ditt skrivbord för att hantera och lägga till olika anpassningar. Det är fullt tillgängligt oberoende av vilken manövermetod som är vald i inställningarna.

Klicka på Meny listen på toppen av Grid utforskaren för att se olika alternativ.

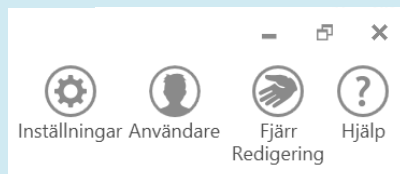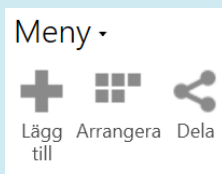

Arrangera anpassningar

Du kan ändra ordningen på anpassningarna genom att välja Arrangera från menyn.

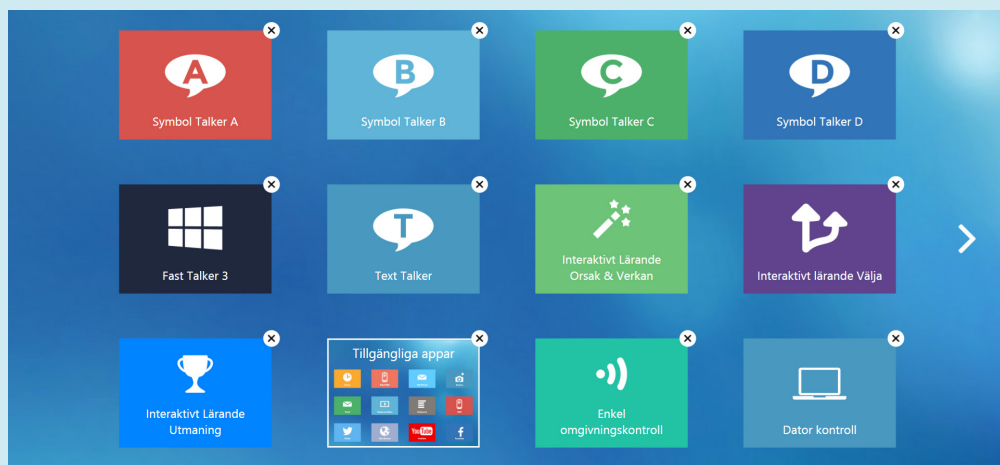


Dra dina anpassningar runt på skärmen för att ändra ordningen på dem, eller skapa mapper för att sätta dem i. Om du har mer än en sida med anpassningar, kan du svepa mellan dem eller klicka på pilarna i kanten.

När du är klar med att arrangera dina anpassningar, välj Avsluta Arrangera.


Lägg till flera anpassningar

Du kan snabbt lägga till flera anpassningar till Utforskaren genom att välja Lägg till anpassning från menyn.

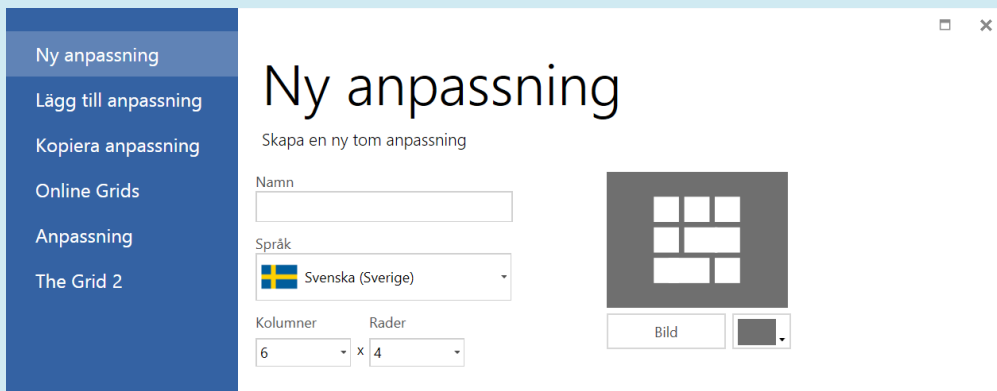

Inställningar

Klicka på Menylisten, och Inställningar. Här kan du utforska och göra ändringar för den aktuella användaren, t ex manövermetod, tal och omgivningskontroll (Se Lektion 3 i träningskortet för mer information).

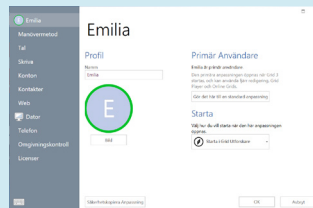


★ Tips

Dessa inställningar gäller för alla anpassningar för den här användaren. Det betyder att du behöver bara göra inställningarna en gång.

Användare


Du kan byta användare och skapa nya användare genom att välja Användare från menyn i Grid Utforskaren.

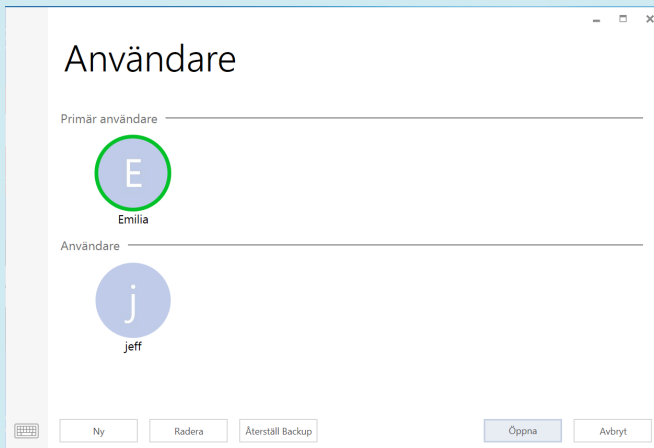

Fjärr redigering

Fjärr redigering tillåter någon annan att redigera din anpassning online.

Du kan logga in till att fjärr redigera en annans anpassning genom att välja Fjärr Redigering från menylisten. (Se lektion 2.8 för mer information).

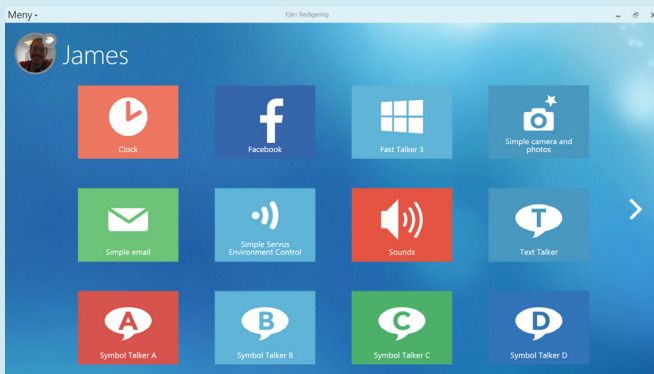

Använda en anpassning

Använda en anpassning är lätt och intuitivt. Varje anpassning ser olika ut, men vi använder den här sidan från Symbol Talker A för att visa dig grunderna.

Den stora rutan i toppen är skrivytan. Det är där som dina meningar komponeras. Genom att klicka på den här rutan kommer meddelandet att läsas upp eller flytta markören, beroende på dina inställningar.



De gröna rutorna är början på meningar. De vita rutorna är Ordlisterutor. Både gröna och vita rutor skickar text till skrivytan för att komponera ett meddelande. I det här fallet finns det mer vokabulär tillgänglig än vad som ryms på sidan – klicka på Mera för att få tillgång till mer vokabulär.

De röda rutorna är Kommando rutor som utför specialfunktioner. Vila rutan i hörnet kommer att pausa ögonstyrning eller huvudmus användare – klicka på den igen för att fortsätta.

Gå till rutor används för att navigera till andra sidor i en anpassning. I det här exemplet kan du gå till start sidan genom att klicka på Start.

★ Tips

För att snabbt hitta vilken sida ordet finns på, klicka på Menylisten och Sök Ord.

Snabbredigering

Det är snabbt och enkelt att göra ändringar på en ruta. Vi visar här hur du gör ett flertal små ändringar på en ruta, och hur snabbt du kan lägga till ett ord på en ruta.

Ändra text eller bild

Klicka på Menylisten, välj Redigera (eller tryck F11 på tangentbordet) Välj den ruta du vill redigera genom att klocka på den.




Nu kan du ändra text som visas på rutan genom att klicka på Ändra Text, eller välj en annan bild. Klicka på Avsluta Redigering och spara ändringarna när du är klar.

För mer om redigering av rutor, se lektion 1.1 och 1.2.

Lägg till i en ordlista

Om din anpassning använder ordlistor, kan du snabbt lägga till ett ord genom att klicka på Menylisten och Ordlista. Klicka på Lägg till, skriv in ditt nya ord, välj en bild och klicka på OK. För mer om Ordlista, se lektion, se Lektion 2.1.

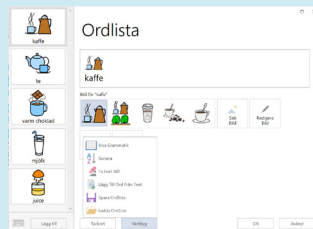


★ Tips

Du kan hämta upp ett skärmtangentbord genom att klicka på ikonen i nedre vänstra hörnet.

Starta

Du kanske vill ställa in Grid 3 för att starta automatiskt när du startar din dator.

I inställningarna klickar du på Dator, och välj Starta Grid 3 med windows.

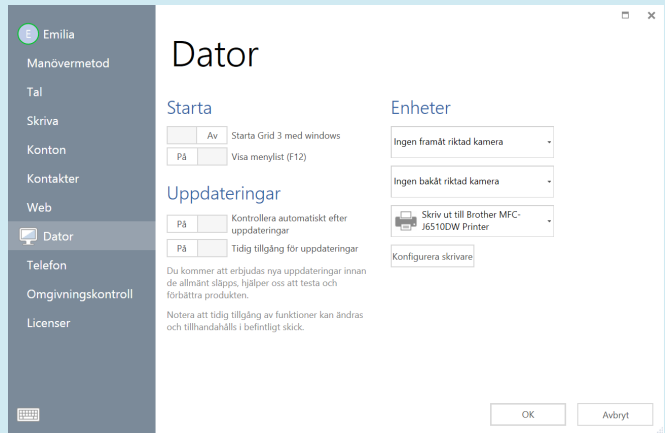


★ Tips

Du kan också ställa in Grid 3 för att använda din kamera eller skrivare här.

Startanpassning

För att välja vilken anpassning som ska starta när Grid 3 startas, se till att den Primära användaren är vald och klicka på Meny listen i toppen av skärmen - välj Inställningar – klicka på rullgardinsmenyn under Starta och välj startanpassning eller Grid Utforskare.

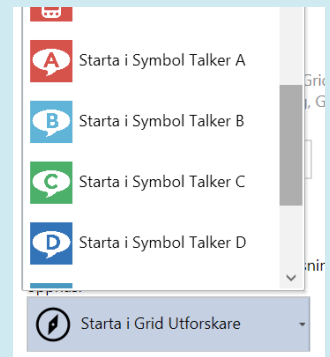

För support videos, webbinstruktioner och
mer information besök oss på
www.thinksmartbox.com

Smartbox