


Malem klockan – Mellan

1) Klockans display:

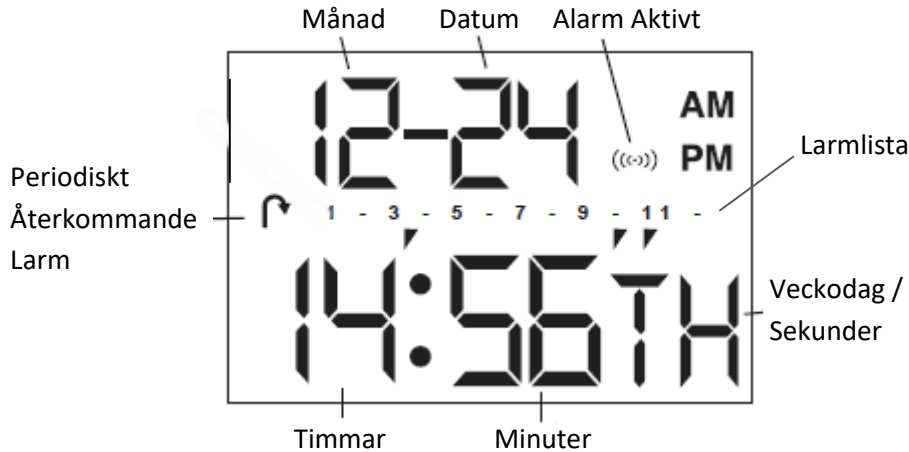


((-)) ALARM AKTIVT visas under tiden klockan programmeras och när det finns aktiva larm inställda. Visas inte symbolen finns det inga aktiva larm.

↪ PERIODISKT ÅTERKOMMANDE LARM visas när det finns återkommande larm inställda.

2) Knapp funktioner:

Ingen funktion (B)

Ändrknappen (C)

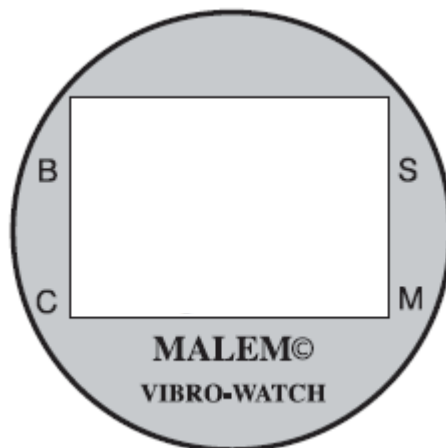


Väljknappen (S)

Lägesknappen (M)

Spärr: För att inte oavsiktligt ändra inställningarna i klocka måste Väljknappen (S) hållas inne i 2 sekunder innan ändringar kan göras.

- Väljknapp (S) – Tryck kort för att alternera mellan att visa sekunder eller veckodagar. Tryck och håll inne i 2 sekunder för att ändra i inställningar. Tryck inte för hårt.
- Lägesknappen (M) – Tryck på M för att växla mellan:

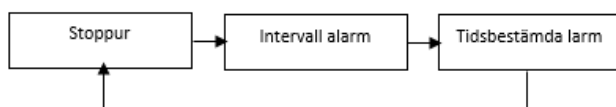

- Knapp (B) – Har ingen funktion.

- Ändrknapp (C) – Tryck för att göra ändringar i inställningsläget.

3) Ställa in tid och datum:

- Tryck (S) knapp och håll i 3 sekunder tills att sekunderna blinkar
- Tryck (C) knapp för att nollställa sekunderna
- Tryck (S) knapp åter för att gå vidare så att minuter blinkar
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskade minuter
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmarna blinkar
- Tryck (M) knapp för att växla mellan AM/PM eller 24 timmars format
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad timme
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att månad blinkar
- Tryck (C) knapp för korrigera till önskad månad
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att dag blinkar
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad dag
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att veckodag blinkar
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad veckodag
- Tryck (S) knapp en gång för att gå tillbaka till aktuell tid

4) Stoppur


- Tryck (M) knapp en gång för att gå över till stoppursläge
- Tryck (S) knapp en gång för att starta räkningen
- Tryck (S) knapp för att stoppa räkningen
- Tryck (C) knapp för att nollställa stoppuret
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid


5) Intervall larm

- Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm.
- Tryck och håll inne (C) för att nollställa displayen.
- Tryck (S) knappen och håll ca 3 sekunder tills minuter börjar blinka
- Tryck (C) knappen för att ställa önskade minuter, mellan 0-59 för intervallet
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmar blinkar
- Tryck (C) knapp för att ställa önskade timmar, mellan 0-23 för intervallet
- Tryck (S) knapp för att starta timer
- Tryck (C) knapp för att se vald intervall tid, tiden återgår sedan att fortsätta räkna ner när du släpper knappen
- Tryck (C) knapp och håll inne för att nollställa tiden
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid.

För att aktivera, försäkra att Intervall larm symbolen ^(TR) syns i aktivera/avaktivera vibrationslarm fönster (se avsnitt 7). När den är aktiverad visas symbol ^(TR) i displayen vid visning av aktuell tid (normal visning)






6) Inställning av tidsbestämda larm:

- Tryck (M) knapp tre gånger för att komma in i tidsbestämda larm.
- Tryck (S) knapp upprepade gånger för att välja önskat larmnummer mellan 1-12.
- Tryck (S) knapp tre sekunder tills minuter börjar blinka.
- Tryck (C) knapp för att ställa in önskade minuter.
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmar blinkar.
- Tryck (C) knapp för att ställa in önskad timme.
- Tryck (S) knapp för att bekräfta larmtiden
- Tryck (C) för att välja att aktivera larmet, denna symbol visas då i displayen, 
- Tryck (C) igen för att avaktivera larmet och symbolen försvinner.
- Tryck (S) knapp för att ställa fler larm vid behov enligt procedur ovan. Tänk på att det går att ställa max 12 larm.
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid

För att aktivera det tidsinställda vibrationslarmet försäkra att symbol  visas i aktivera/avaktivera vibrationslarm fönster (se avsnitt 7). När det är aktiverat kommer symbolen och larmnumret visas i displayen för normalvisning.

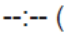7) Att aktivera eller avaktivera tidsbestämda eller intervalllarm

Alarm aktivering/avaktivering

- Tryck (M) knapp fyra gånger tills  eller  visas i displayen
- Tryck (S) för att välja  för att aktivera de 12 tidsbestämda larmen (eller de som är inställda och valda).
- Tryck (S) för att välja  för att aktivera intervall larmen.
- Tryck (S) för att välja  för att avaktivera både intervall och tidsbestämda larm utan att tappa inställningarna. Användbart för att inte blir störd på natten av intervall larmen.

Om varken intervall- eller tidsbestämda larmen är inställda och valda kommer detta val ej att vara synligt.

Observera att det inte går att aktivera båda larmsystemen samtidigt.

8) Vibrationslarmets längd och avaktivering

- Vibrationslarmets längd är 15 sekunder
- Tryck någon av (C, S eller M) för att stoppa larmet

Notera att Malm klocka mellan inte har någon belysning eller ljud.

9) Batteriindikator vid lågt batteri


LCD-skärmen visar och blinkar när batterispänningen blir låg, byt ut batteri för att återställa driften.

10) Batteribyte


Ett batteribyte bör utföras av urmakare. Batteri: CR-2032

Batteriet håller vid normal användning (2 larm per dag) i upp till 1,5 år. Fler larm minskar batteritiden

1. Vrid batterilocket moturs för att öppna.
2. Ta bort det gamla batteriet.
3. Tryck (M) knapp i tre sekunder och släpp
4. Var noga med att inte tappa bort O-ringen
5. Dra metallkontaktremsan i botten av klockan något uppåt för att säkerställa god batterikontakt.
6. Placera nytt batteri i batteriluckan åt rätt håll vad gäller polariteten. Se bild...

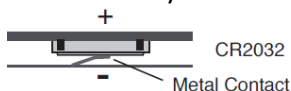

7. Sätt tillbaka luckan. Se till att punkt och pil "open" är mitt för varandra.
8. Undvik att upprepade gånger kontakt mellan batteri och klocka uppstår flera gånger då detta kan påverka displayen och orsaka funktionsfel. (Klockan kommer att vibrera)
9. Vrid luckan till stängd position
10. Om klockans display är tom eller ser felaktig ut, börja om från steg 1.

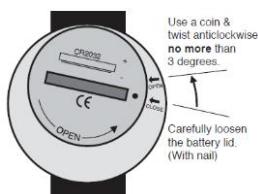

11) Villkor

Notera att Malem vibro-Watch 'S' är tänkt att vara ett hjälpande och diskret larm eller påminnelse.

Den är inte avsedd att ersätta mänsklig vård eller tillsyn och tillverkaren Malem Medical är inte ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av användarens felaktiga hantering eller misstag.