


A-Funktioner

- Realtidsvisning i timmar, minuter och sekunder
- Datumvisning genom att trycka in knapp C
- Stoppur
- Intervall-alarm med inställbart intervall mellan 1 minut och 23 timmar och 59 sekunder
- 12 specifikt tidsbestämda larm
- Intervall och tidsbestämda larmen kan användas samtidigt
- Minnet lagrar alla inställningar vid batteribyte. Ingen omprogrammering behövs.
- 15 sekunder vibrations- och eller ljudlarm
- Olika alarm ljud för de tidsbestämda och intervall larmen
- Knapptrycknings respons med ljud och vibration vid tryck på de olika funktionsknapparna
- Bakgrundsbelysning
- Låsbara inställningar för att undvika att oavsiktliga ändringar

B – Knapp funktioner

- Lagesknapp (M) – Tryck på M för att växla mellan:

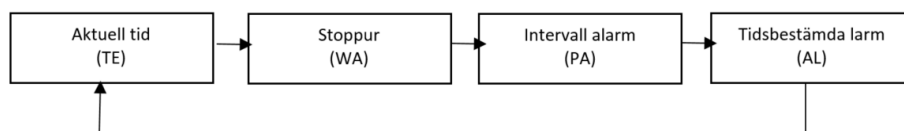

- Väljknapp (S) – Tryck för att alternera mellan att visa sekunder eller veckodagar. Använd även för att göra val i inställningsläget.
- Ändrknapp (C) – Tryck för att visa datum eller för att göra ändringar i inställningsläget.
- Belysningsknapp (L) – Tryck en gång för att lysa upp displayen i 3 sekunder
- Stänga av larm – Tryck på valfri knapp för att stänga av aktivt larm.

C – Inställningar

1. Ställa tid och datum (TE)

- Tryck (S) knapp och håll i 3 sekunder tills att sekunderna blinkar
- Tryck (C) knapp för att nollställa sekunderna
- Tryck (S) knapp åter för att gå vidare så att minuter blinkar
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskade minuter
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmarna blinkar
- Tryck (M) knapp för att växla mellan AM/PM eller 24 timmars format
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad timme
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att månad blinkar
- Tryck (C) knapp för korrigera till önskad månad
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att dag blinkar
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad dag
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att veckodag blinkar
- Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad veckodag
- Tryck (S) knapp en gång för att gå tillbaka till aktuell tid (TE)

2. Stoppur (WA)

(i) Vanlig räkning

- Tryck (M) knapp en gång, först visas WA och sedan går den automatiskt över i stoppursläge
- Tryck (S) knapp en gång för att starta räkning
- Tryck (S) knapp för att stoppa räkningen
- Tryck (C) knapp för att nollställa stoppuret
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid

(ii) Mellantid

- Tryck (M) knapp en gång, först visas WA och sedan går den automatiskt över i stoppursläge
- Tryck (S) knapp en gång för att starta räkning
- Tryck (C) knapp för att läsa den första mellantiden
- Tryck (C) knapp för att återgå till räkningen
- Tryck (C) knapp för att läsa av den andra mellantiden
- Detta kan upprepas tills (S) knappen trycks för avslut
- Tryck (C) knapp två gånger för att nollställa
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid

3. Intervall larm (PA)





(i) Ställa intervall larm

- Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge

- Tryck (S) knappen och håll ca 3 sekunder tills minuter börjar blinka
- Tryck (C) knappen för att ställa önskad minuter, mellan 0-59 för intervallet
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmar blinkar
- Tryck (C) knapp för att ställa önskad timmar, mellan 0-23 för intervallet
- Tryck (S) knappen en gång för att ställa intervallens starttid, "St" kommer att synas och därefter blinkar minuter.
- Tryck (C) knappen för att ställa önskad starttid i minuter.
- Tryck (S) knappen för att gå vidare så att timmar börjar blinka.
- Tryck (C) knappen för att ställa önskad starttid i timmar.
- Tryck (S) knappen en gång för att ställa intervallens sluttid, "En" kommer att synas och därefter blinkar minuter.
- Tryck (C) knappen för att ställa önskad sluttid i minuter.
- Tryck (S) knappen för att gå vidare så att timmar börjar blinka.
- Tryck (C) knappen för att ställa önskad sluttid i timmar.
- Tryck (S) knappen för att bekräfta och starta intervall larmet.
- Intervall larmen är endast aktiverade inom inställd start- och sluttid.
- Maximal intervalltid är 23 timmar och 59 minuter.
- Tryck (M) knapp en gång för att återgå till aktuell tid (TE).
- Intervall larmen kan startas om genom att trycka (C)knappen 3 sekunder.

OBS! Om starttiden och sluttiden är den samma kommer intervall larmen att vara kontinuerlig.

(ii)Att aktivera och stänga av intervall larm (PA)

- Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge.
- Tryck (C) knappen för att välja mellan vibration, ljud eller både vibration och ljud.  
- Visas ingen av ikonerna så betyder det att intervall larm är inaktivt men inställd tid är sparad och kan startas genom att aktivera någon av larmalternativen ovan.
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE)
- Ikonen  visas på displayen om ett larm är aktiverat
- När ikonen  blinkar så indikerar den på att intervall larmet är på och den räknar ner.
- Intervall larmet är endast aktiverat inom inställd start- och sluttid.

(iii)Visa inställningar



- Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge.
- Displayen visar intervall status.
- Tryck (S) knappen en gång för att visa intervall tiden.
- Tryck (S) knappen igen för att se inställd starttid.
- Tryck (S) knappen igen för att se inställd sluttid.
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE).

(iii)Omstart av intervall larm (PA)



- Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge.
- Tryck (C) knappen i tre sekunder
- Intervalltiden nollställs och startar från början igen.
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE).

4. Tidsbestämda larm (AL)

(i) Att ställa in tidsbestämt larm

- Tryck (M) knapp tre gånger för att komma in i tidsbestämda larm (AL). Först visas AL och sedan går den automatiskt över i tidsbestämda larm läget.
- Tryck (S) knapp upprepade gånger för att välja önskat larmnummer mellan 1-12.
- Tryck (S) knapp tre sekunder tills minuter börjar blinka.
- Tryck (C) knapp för att ställa in önskade minuter.
- Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmar blinkar.
- Tryck (C) knapp för att ställa in önskad timme.
- Tryck (S) knapp för att bekräfta inställningarna
- Tryck (C) knapp för att välja mellan vibration, ljud eller både vibration och ljud.  
- Tryck (S) knapp för att ställa fler larm vid behov enligt procedur ovan. Tänk på att det går att ställa max 12 larm.
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE).

(ii) Att aktivera eller avsluta tidsbestämt larm

- Tryck (M) knapp tre gånger för att komma in i tidsbestämda larm (AL). Först visas AL och sedan går den automatiskt över i tidsbestämda larm läget.
- Tryck (S) knapp för att välja larmnummer.
- Tryck (C) knapp för att välja mellan vibration, ljud eller både vibration och ljud.  
- Visas ingen av ikonerna så betyder det att det tidsbestämda larmet är inaktivt men inställd tid är sparad och kan startas genom att aktivera något av larmalternativen ovan.
- Tryck (S) knapp igen för att vid behov välja något annat tidsbestämt larm där justering är nödvändig.
- Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE).
- De aktiverade larmnumren kommer visas i tidsdisplayen.

5. Datum och tid

- Tryck (C) knapp en gång
- Tids displayen ändras till datum visning
- Displayen återgår automatiskt efter fem sekunder till aktuell tid (AT)
- Tryck (C) knapp konstant och datum visas tills knapp C släpps.



6. Veckodag och sekund visning

- Tryck (S) knapp en gång
- Sekundvisning övergår till veckodagsvisning
- Tryck (S) knapp igen och veckodagsvisning växlas tillbaka till sekundvisning

7. Uppllysning av display

- Tryck (L) knapp en gång
- LCD displayen tänds upp i tre sekunder

8. Låsa och låsa upp inställningar

- Tryck (S) knapp och (M) knapp samtidigt för att låsa alla funktioner.
- Ikonen  kommer att visas i displayen
- Tryck (S) knapp och (M) knapp samtidigt igen för att låsa upp alla funktioner.
- Ikonen  kommer att försvinna från displayen.

D - Batteribyte

Ett batteribyte bör utföras av urmakare. Batteri: CR-1632

Batteriet håller vid normal användning (2 larm per dag) i upp till 1,5 år. Fler larm minskar batteritiden.

Använd den medföljande nyckeln för att öppna

batterihållaren. Gummibiten under batterihållaren bör inte skadas. Lyft försiktigt

den lilla metallkontakten innan du sätter in nytt batteri. Var noga med att placera batteriet rätt i batterihållaren, (polariteten).

Var noga med att placera batterilucka enligt bild. Hamnar den snett så kommer inte ljudet att fungera.



E - Garanti

Malem VibroS Garantin täcker tillverkningsfel under ett år från inköpsdatum.

Den omfattar inte batteri, glas, rem, missfärgning eller skada orsakad av slitage eller felaktig användning.

F - Villkor

Notera att Malem vibro-Watch 'S' är tänkt att vara ett hjälpande och diskret larm eller påminnelse.

Den är inte avsedd att ersätta mänsklig vård eller tillsyn och tillverkaren Malem Medical är inte ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av användarens felaktiga hantering eller misstag.