

## Bruksanvisning

# Montera Kapacitiv spets på Pannpinne



Avser montering på Artnr 1828178 Pannpinne

I detta kit ska det finnas 1st Adapter för Kapacitiv spets (aluminium pinne med kapacitiv spets) samt 1st Limflaska



Pannpinnen levereras med tre olika längder av pinne.  
Välj ut den som längd du vill använda.  
Ta bort gummitoppen



Följ instruktionerna på limflaskan för att ta av korken.  
Applicera ett tunt lager lim utmed pinnen, ca  $\frac{3}{4}$ , med start från änden utan gummitopp.



För in Adaptern i pannpinnens rör.  
Rotera den så att limmet sprids jämnt.  
Låt torka.  
Montera ev ihop pannpinnen igen.