

SR2 Reläbox IR - MK



En liten och smidig Reläbox för både Kontaktstyrning och IR- styrning med en kanal.

Du kan slå av och på elektriska apparater som radio, lampa, elvisp eller kaffebryggare. Reläboxen ansluts till ett 230V vägguttag och den apparat du vill styra ansluts i reläboxens uttag.

Styrning på tre olika sätt

Anslut valfri manöverkontakt eller använd en IR-sändare.

1. Växlande: t ex en lampa tänds vid tryck på manöverkontakten. Tryck igen och lampan släcks.
2. Momentan: t ex en elvisp körs när manöverkontakten hålls nere. Släpp kontakten och vispen stannar.
3. Fördröjning: t ex en kaffebryggare startar vid tryck på manöverkontakten. Efter en förinställd tid stängs bryggaren av.

IR-Styrning

En signal programmeras in från en IR – sändare in i reläboxen. Tryck på IR-sändaren och lampan tänds, tryck igen och lampan släcks.

Tekniska specifikationer

Storlek:	100x50x30mm
Vikt:	140 gram
Spänning:	230 – 250V
Max belastning:	10A
Manöverkontakt:	3,5mm telepropp

Artikelnr: 1828219 SR2 Reläbox IR-MK