

P150 Larmmatta

1828566 – P150 Larmmatta 6,3mm plugg

1828562 – P150 Larmmatta



Det finns två typer av Larmmattor och båda placeras nedanför användarens säng och registrerar och triggat ett larm så snart användaren placerar en fot på mattan. Hur larmet vidaresänds kan variera beroende på modell.

1828566 P150 Larmmatta 6.3 mm plugg kopplas in direkt i befintligt larmuttag. För att möjliggöra för användare att själv kunna larma kan en, 1828599 Y-Kabel Larm 6.3 1 Ha-2Ho, kopplas mellan mattan och larmingången i väggen. I denna går det då att koppla in ytterligare en larmkontakt som placeras vid användaren i sängen.

1828562 P150 Larmmatta kopplas in direkt i en separat larmsensor typ en 1828549 P154 Companion. Den har då möjlighet att vidaresända larmet till en personsökare.

P150 Fakta	
Storlek	910x610x5,5mm
Vikt	1,6kg
Material	Grå PVC
Minimumvikt	Golv 40kg och tunn matta 25kg
CE-certifiering	REACH med <0,1% ftalater
	P150 Larmmatta har utvecklats och tillverkats som ett Medicintekniskt tillbehör i enlighet med Medicintekniskt direktiv 93/42/EEG

OBS: Mattan får ej vikas och ska förvaras plant. För att säkerställa funktion ska mattan bytas 1ggr/år.

Larmmattan kan användas direkt på golvet utan något ovanpå men fungerar även bra liggande under en tunn matta. Då döljs och skyddas både matta och kablage. Undvik mörka mattor då vissa personer, tex med demens, kan uppfatta detta som ett obehagligt "hål" i golvet.

Larmmattan ligger stabilt på de flesta golv men om larmmattan verkar glida på golvet kan man använda en vanlig anti-glid skydd under den.

Se till att larmmattans alla kanter ligger platt på golvet.

Lägg kabeln under möbler eller fäst den på golvet med tejp för att undvika snubbelrisk och slitage.

Anslut till en Alert-iT Larmsändare

Ta bort skarvdosan från sladden genom att klicka ur modularkontakten. Kontakten kan nu anslutas i en larmsändare som med radio kan skicka larmet vidare.



Anslut till larmuttag i väggen

Anslut den förlängda kabeln till larmmattan via skarvdosan.
Anslut 6,3mm Teleplugg i väggens larmuttag

Test!

Det är viktigt att testa mattans funktion innan den tas i bruk!


Stå på de 5 positionerna och säkerställ att larm aktiveras. Kom ihåg att återställa larmet mellan varje testpunkt. Vikten bör vara samma eller lägre än hos personen som ska ha larmmattan.



Rengöring

Larmmattan kan rengöras med Ytdesinfektion (alkohol) eller vanlig ytrensning för golv, bänk osv.

Väldigt enkel att använda

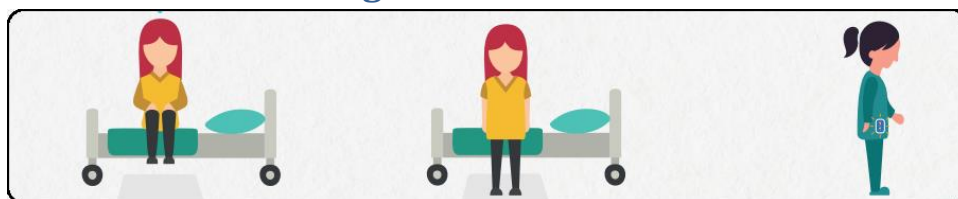

Steg 1: Brukaren sätter sig eller lägger sig ner.

Steg 2: När brukaren ställer sig upp på larmmattan, då skickas ett larm omgående.

Steg 3: Skötaren aviseras via personsökare eller befintligt larmsystem.