

Läs igenom manualen innan du börjar använda produkten.

OBS:

Innan du startar röstförstärkaren, se till att mikrofonen inte pekar emot förstärkaren. Detta minimerar risken för rundgång.

Tips

För att få bästa förstärkning, vrid mikrofonen så den pekar mot munnen när du talar. Avståndet mellan röstförstärkaren och mikrofonen bör vara mer än 60 cm för att undvika rundgång.

Placera röstförstärkaren vid midjan, eller lite åt sidan så den inte hamnar för nära mikrofonen vid sittande.

Vad ingår vid leverans:


1. Röstförstärkare
2. Trådlöst headset (mikrofon)
3. Laddare med två USB portar
4. Två USB ladd sladdar
5. Bärrem
6. Manual
7. Väska

Specifikation:

Max uteffekt:	18 W
Laddare:	5 V, 1 A
Vikt:	395 g (headset 46 g)
Mått:	45 x 96 x 120 mm
Arbetstemperatur:	-10° C till 45° C
Användningstid:	10 - 12 timmar
Uppladdningstid:	3 - 5 timmar

Röstförstärkaren är regnskyddad, men inte den trådlösa mikrofonen.

Knappar och ingångar:

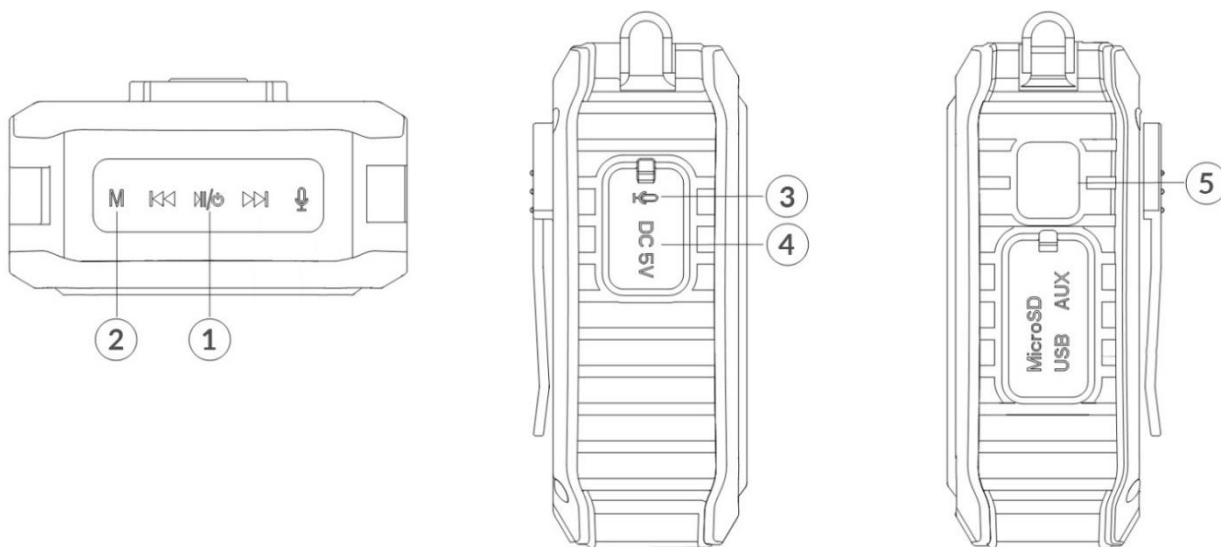

1. På/Av knapp:

Tryck på "M/0" knappen i 3 sekunder för att slå på/av röstförstärkaren.

2. Ihopparnings knapp "M":

Tryck på "M" tills högtalaren säger

"UHF Waiting for connection", håll sedan knappen för ihopparring intryckt på den trådlösa mikrofonen.

För att ändra vilken kanal som används tryck på "+" eller "-" på den trådlösa mikrofonen, vi nyttjar kanalerna 823-829 MHz och 863-865 MHz.

3. Ø 3,5 mm mikrofoningång:

Här ansluts mikrofon med sladd (om inte trådlös mikrofon används).

4. DC 5V laddning

Ingång för laddning, laddas med medföljande laddare.

5. LED-skärm (visar batterinivån.)

Tips: Då denna indikator mäter spänningen på batteriet så sjunker nivån från 100 till ca 70 ganska snabbt. Sen stabiliseras den på 70 – 60 väldigt länge. När högtalaren sjunker närmare 10 är det dags att ladda.


Användning:

Ladda högtalaren

Stänga av röstförstärkaren när det är dags att ladda den. Vid låg batterinivå säger den *"Low battery, please charge"*. Röstförstärkaren laddas med 5 V laddare, använd laddaren som följer med produkten. Efter ca 5 h är röstförstärkaren fulladdad, koppla då bort den från laddning.

Man ska aldrig låta produkter ligga på laddning över natten.

Trådlös mikrofon:

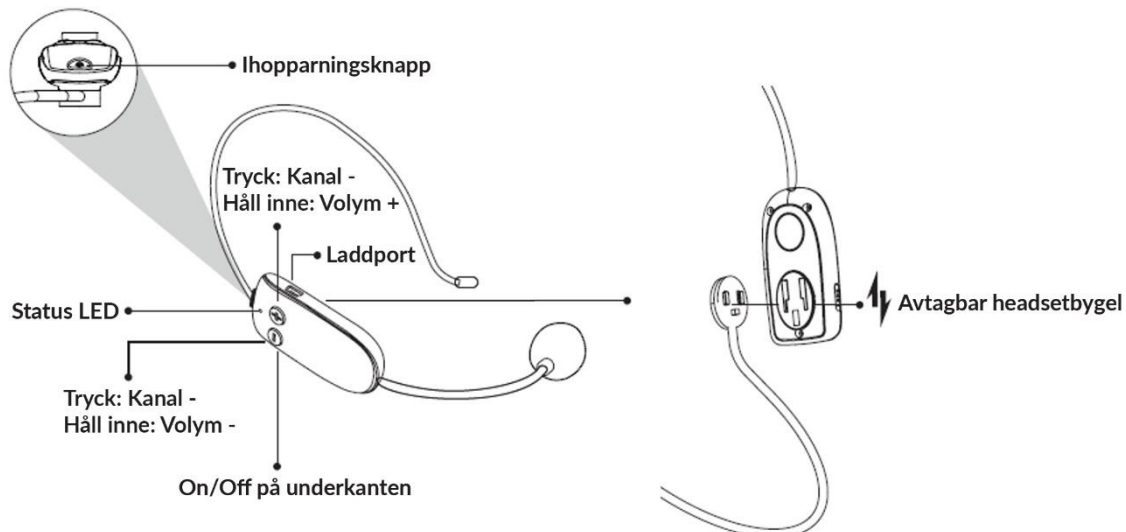

- Mikrofonen är parkopplad vid leverans och kan användas direkt. Om mikrofonen behöver paras om på nytt eller av någon anledning förlorat anslutningen till röstförstärkaren, behöver den ihopparas manuellt.
- 2. Manuell ihopparning:
Steg 1. Starta Röstförstärkare, håll nere "M"-knappen i 5 sekunder, röstförstärkaren säger *"UHF Waiting for connection"*.
Steg 2. Starta den trådlösa mikrofonen och håll inne ihopparningsknappen "📶" i 5 sekunder. Röstförstärkaren bekräftar genom att säga *"UHF is connected"*.

Volymkontroll:

- 1) Justera volymen genom att hålla inne "+" eller "-" på den trådlösa mikrofonen. Volymen går att reglera i 13 steg.
- 2) Du kan ytterligare justera volymen på röstförstärkaren genom att trycka länge på "◀" eller "▶".
OBS. Höjer du volymen till max ökar risken för rundgång, var observant så inte mikrofonen hamnar för nära röstförstärkaren.

Laddar den trådlösa mikrofonen:

När mikrofonens blå lampa blinkar betyder det låg batterinivå. Stäng av mikrofonen och ladda med medföljande laddare. Den lyser rött medan den laddas, indikatorn släcks när den är fulladdad.

1. Normala uppladdningstid är 3 till 5 timmar. Koppla ur laddaren så snart mikrofonen är fulladdad. Låt inte den ligga på laddning över natten.
2. Stäng av den mikrofonen när du inte använder den.

Felsökning:

Allt är påslaget, men förstärkaren ger inget ljud.

1. Håll nere "M" i 10s för att återställa högtalaren, slå sedan på den igen. Röstförstärkaren startar alltid på en standardvolym.
2. Gör en manuell ihopparring (se föregående sida)
3. Finns flera röstförstärkare i samma lokaler, då kan man behöva byta kanal. Se "**2. Ihopparnings knapp "M":**" på sida 2.

Röstförstärkaren tjuter (rundgång).

1. Flytta mikrofonerna så den inte hamnar för nära röstförstärkaren.
2. Om du är i ett litet rum, sänk volymen.