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


Talk Pad

Din guide



Använda din Talk Pad på ett säkert sätt

Använda Talk Pad i en medicinsk miljö

Talk Paden får inte vara användarens enda möjlighet att ringa ett larmsamtal eller påkalla uppmärksamhet vid nödsituationer.

Grid for iPad är inte utformat att göra en medicinsk bedömning av användaren.

thinksmartbox.com/safety

Grid for iPad och dina data

Grid for iPad lagrar inga användardata online utan din tillåtelse. Alla data kring dina sociala konton och e-postkonton lagras lokalt och delas aldrig.

När du skapar ett konto i Grid for iPad kommer du få välja sekretessinställningar. Med ditt medgivande kan Grid for iPad spara samtalshistorik och använda platsdata för att förbättra prediktionen över tid. Dessa data lagras alltid lokalt och skickas inte till Smartbox.

thinksmartbox.com/privacy

Vem är Talk Pad tillför?

En AKK-användare



- Kommunikation
- Tillgängliga Appar
- Tillgång till annan programvara

Stöd för en AKK-användare




- Ändra inställningar
- Skapa användarprofiler i Grid
- Lägga till anpassningar
- Redigera eller skapa rutnätsset
- Remote editing

Talk Pad är byggd på Apple iPad


Se till att du har läst manualen och känner till hur du använder enheten och operativsystemet för iPad.

Din Talk Pad information


Denna Talk Pad är en...

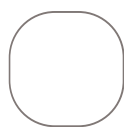

Talk Pad 8

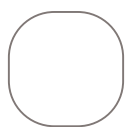

Talk Pad 10

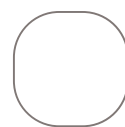


Talk Pad 13

Den här Talk Padens modellnummer är...

Den här Talk Padens serienummer är...


Vem är ansvarig för din Talk Pad?

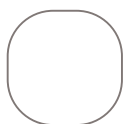

Den här samtalsdynan är redo att användas



Den här Talk Paden är klar för manuell installation

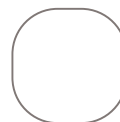

Vi vet att det ibland kan vara förvirrande att ta hand om en enhet, med alla olika konton och lösenord. Vi vet att det ibland kan vara förvirrande att ta hand om en enhet, med alla olika konton och lösenord.

Ditt Apple-ID är...

En påminnelse om ditt Apple ID-lösenord...

Ditt Smartbox-konto...

En påminnelse om ditt Smartbox-kontolösenord...

Ditt lösenkod

Lösenkod för Guidad åtkomst

Vem att ringa för hjälp och support...

Picomed Support

Swe: 08-711 20 30


thinksmartbox.com/smart-support




Vad är en Talk Pad?

Din Talk Pad är en **pekskärmsenhet**.

Interagera med skärmen genom att trycka med fingrarna!

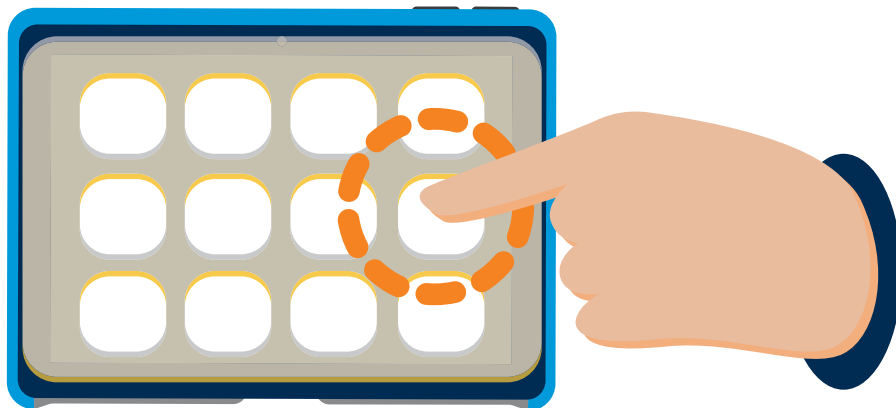

Du kan kommunicera med hjälp av pekskärmen eller genom att konfigurera andra åtkomstmetoder som kontakter eller pekdon.

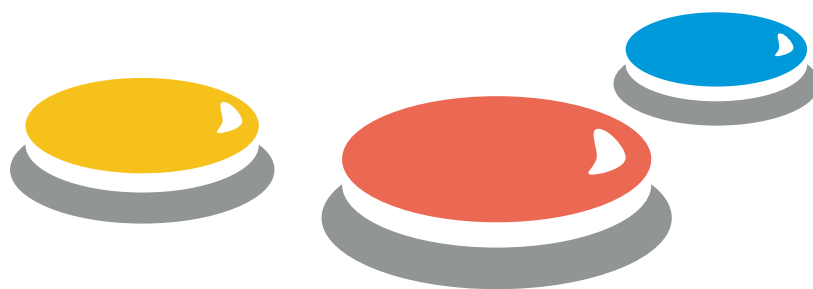

Det finns några mer avancerade funktioner och inställningar som du kan komma åt med knapptryckningar och med fler än ett finger.




Din Talk Pad drivs av **Grid for iPad**, en komplett AKK-app som inkluderar omedelbar åtkomst till ett stort bibliotek med **anpassningar**.

Det finns innehåll för alla – från kraftfulla kommunikationsverktyg för textanvändare till anpassningar för kommunikation med symboler och utveckling av läs- och skrivkunnsighet.

Allt kring designen av Grid 3 är tänkt för att göra det enklare att tala, bygga meningar och språkinläring.


Konfigurera din apparat

Steg 1

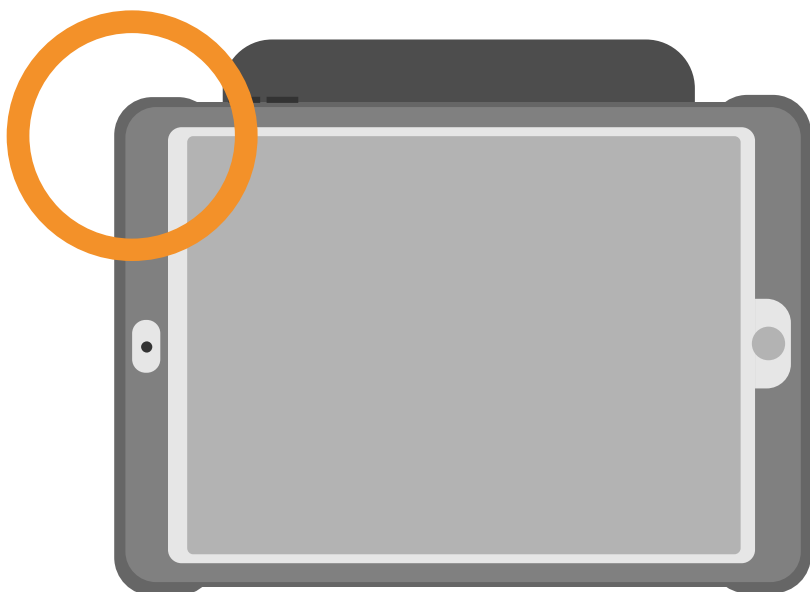

Starta på din Talk Pad med strömknappen på enhetens vänstra sida.

Steg 2

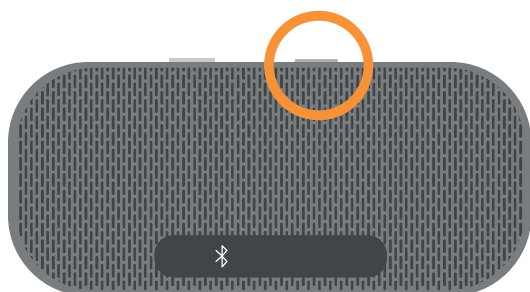

Slå på högtalaren med knappen på ovansidan av högtalaren.

Steg 3

Talk Pad kan tillhandahållas Redo att användas eller för Manuell installation.

Det finns en kort guide som hjälper dig med konfigurationen.



Kom ihåg att anteckna dina kontouppgifter. Det finns plats för dig att göra detta på framsidan av den här guiden.

Innehåll

Din Talk Pad apparat 12

1	Talk Pad 8	14
2	Talk Pad 10	16
3	Talk Pad 13	18
4	Starta din Talk Pad	20
5	Stänga av din Talk Pad	21
6	Ladda din Talk Pad	22
7	Bluetooth-högtalaren	24
8	Placera din Talk Pad	26
9	Använda stativet	28
10	Fästa axelremmen	30
11	Monteringsatsen	31
12	Ansluta hörlurar	32
13	Använda ett raster	33

Komma igång med iPad OS 34

14	Använda pekskärmen	36
15	Startskärmen på din Talk Pad	38
16	Öppna och stänga appar	40
17	Inställningar	42
18	Konto och säkerhet	43
19	Låsa din Talk Pad	44
20	Åtkomstinställningar	45
21	Guidad åtkomst	46
22	App Store	47

Komma igång med Grid for iPad 48

23	Komma igång med Grid	50
24	Ditt Smartbox-konto och din profil	52
25	Grid Utforskaren	53
26	Alternativ för Grid Utforskaren	54
27	Anpassningar	56
28	Anpassningens meny	58
29	Redigeringsläge	60
30	Att dölja menyn i Grid for iPad	62

Ta hand om din Talk Pad 64

31	Uppdatera Grid for iPad	66
32	Uppdaterar iPad OS	68
33	Säkerhetskopiera dina anpassningar med Dropbox	69
34	Säkerhetskopiera din Grid-användare	70
35	Support	72
36	Hitta modell- och serienumret	73
37	Ta bort iPad	74
38	Sätta i iPad	75
39	Säkerhetsföreskrifter	76

Din Talk Pad apparat

I det här avsnittet beskrivs allt du behöver veta om maskinvaran i din Talk Pad.


Använd detta för att lära dig mer om vilka portar och knappar din Talk Pad har samt andra funktioner i enheten, t.ex. högtalare, anslutning av bärrem och stativ.

1	Talk Pad 8	14
2	Talk Pad 10	16
3	Talk Pad 13	18
4	Starta din Talk Pad	20
5	Stänga av din Talk Pad	21
6	Ladda din Talk Pad	22
7	Bluetooth-högtalaren	24
8	Placera din Talk Pad	26
9	Använda stativet	28
10	Fästa axelremmen	30
11	Monteringsatsen	31
12	Ansluta hörlurar	32

1


Talk Pad 8

- iPad mini i ett tåligt skal
- Bärrem
- Laddkabel för iPad
- Laddkabel för högtalare
- Skärmskydd
- Väska
- Grid for iPad

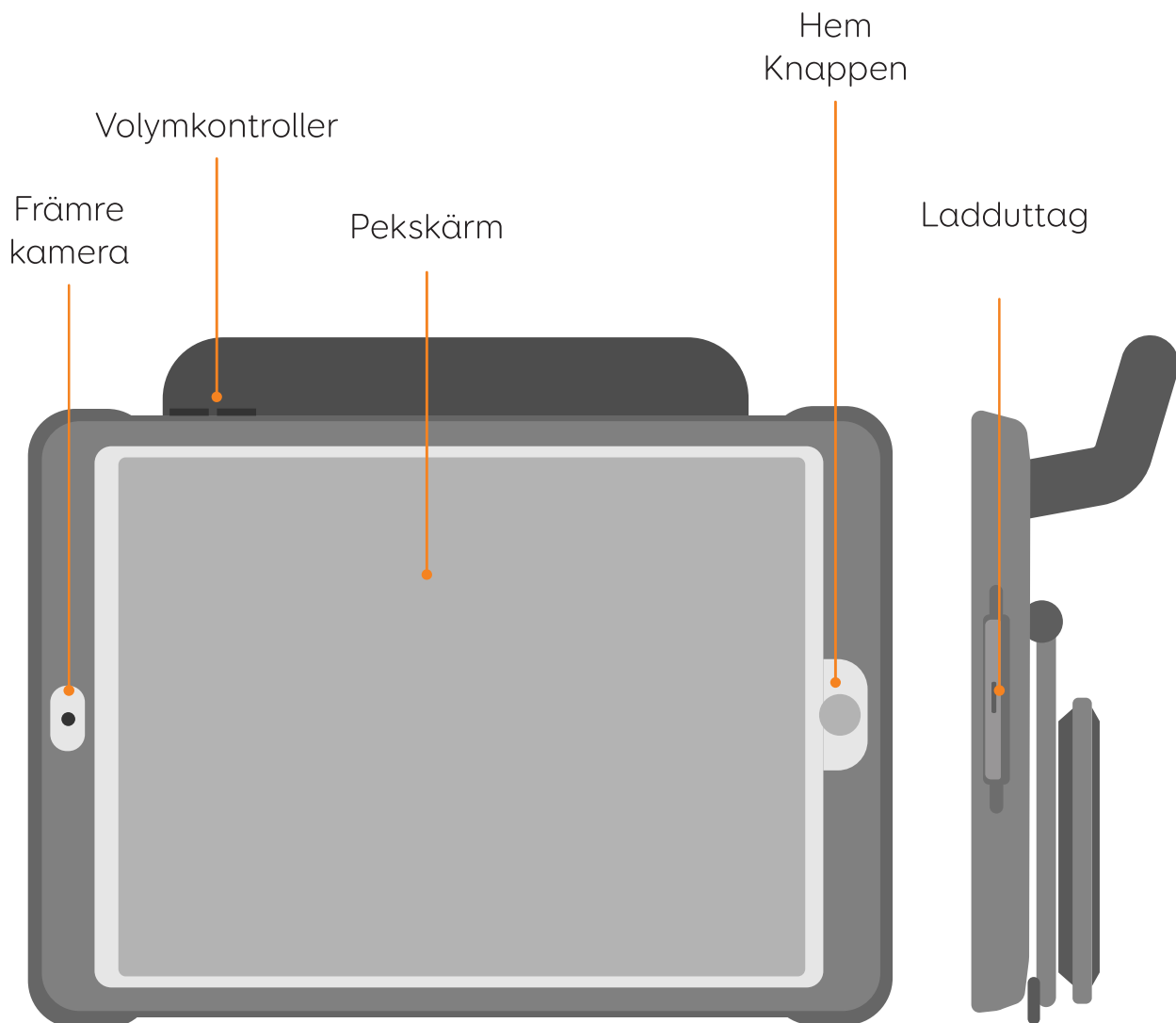

Talk Pad 8 har en 8-tumsskärm och är tillräckligt lätt att bära med sig med handtaget eller den medföljande axelremmen.


Det tåliga fodralet och skärmskyddet skyddar din iPad, medan Bluetooth-högtalaren alltid är ansluten och ser till att du kan höras i alla situationer.

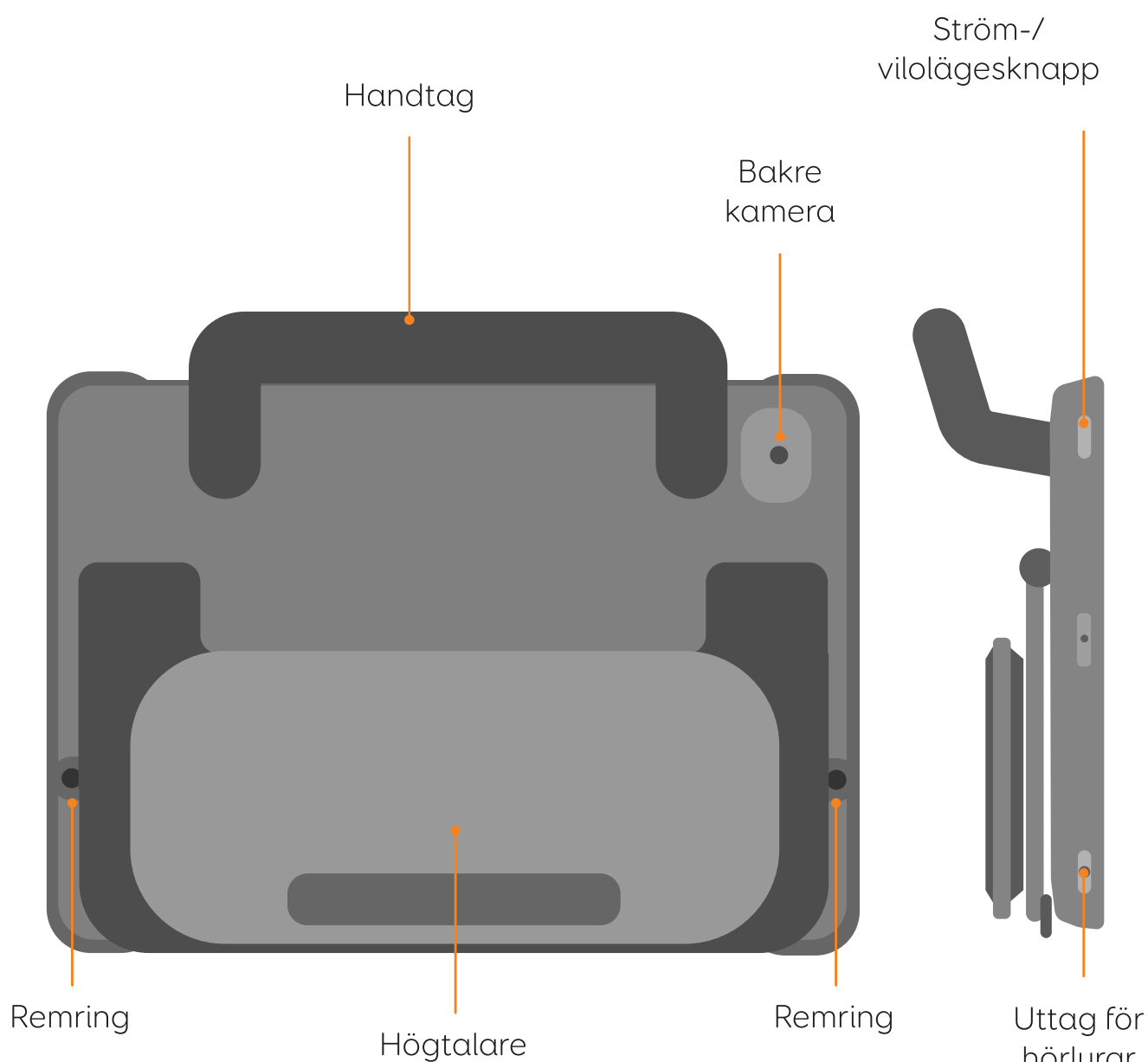

2

Talk Pad 10


- iPad i tåligt fodral
- Bärrem
- Laddkabel för iPad
- Laddkabel för högtalare
- Skärmskydd
- Väska
- Grid for iPad

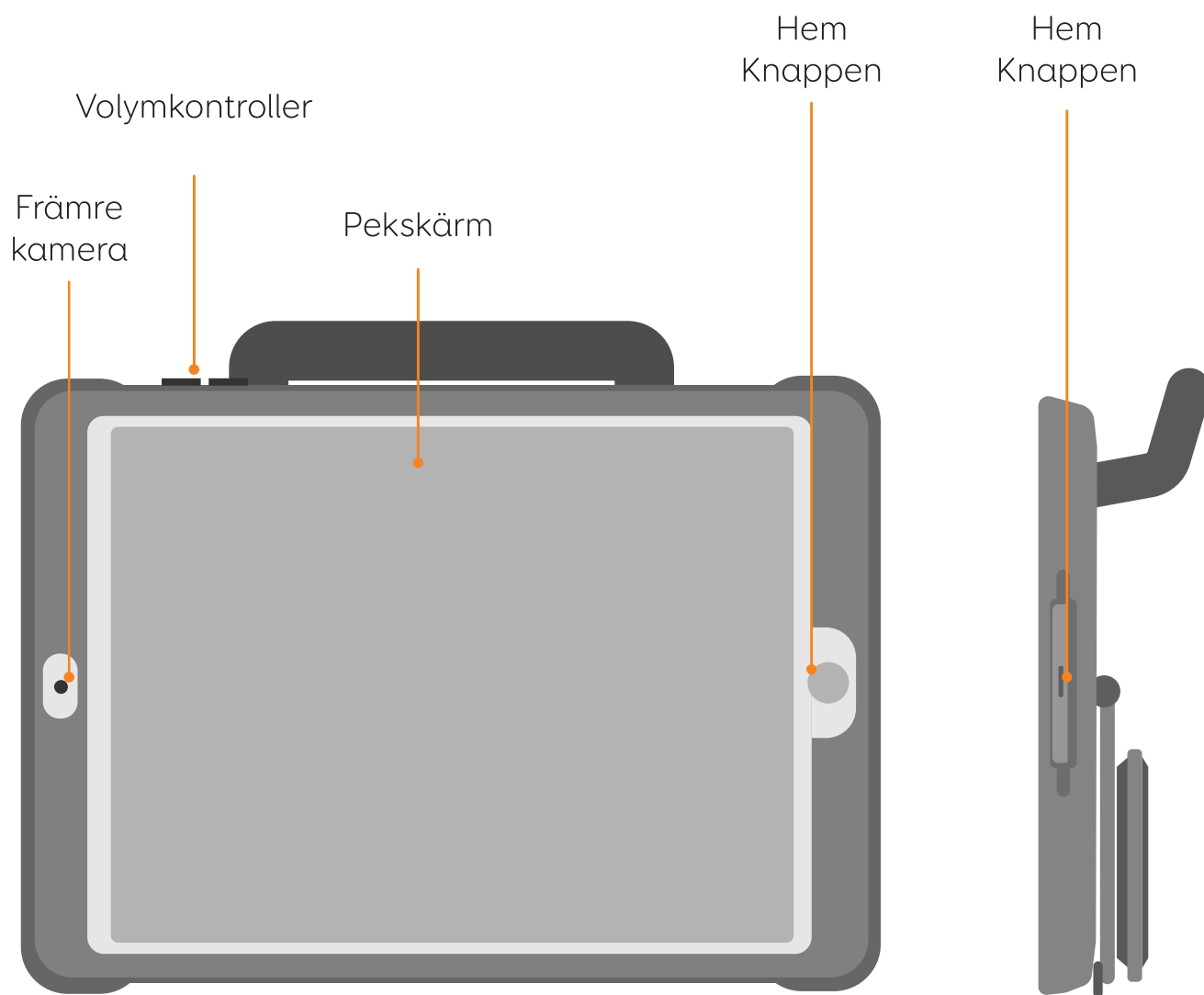

Talk Pad 10 har en 10-tumsskärm och är tillräckligt lätt att bära med sig med handtaget eller den medföljande axelremmen.

Talk Pad 10 har en 10-tumsskärm och är tillräckligt lätt att bära med sig med handtaget eller den medföljande axelremmen.


Anslutningspunkter för monteringsplattan innebär att du kan montera enheten på en rullstol eller ett stativ.

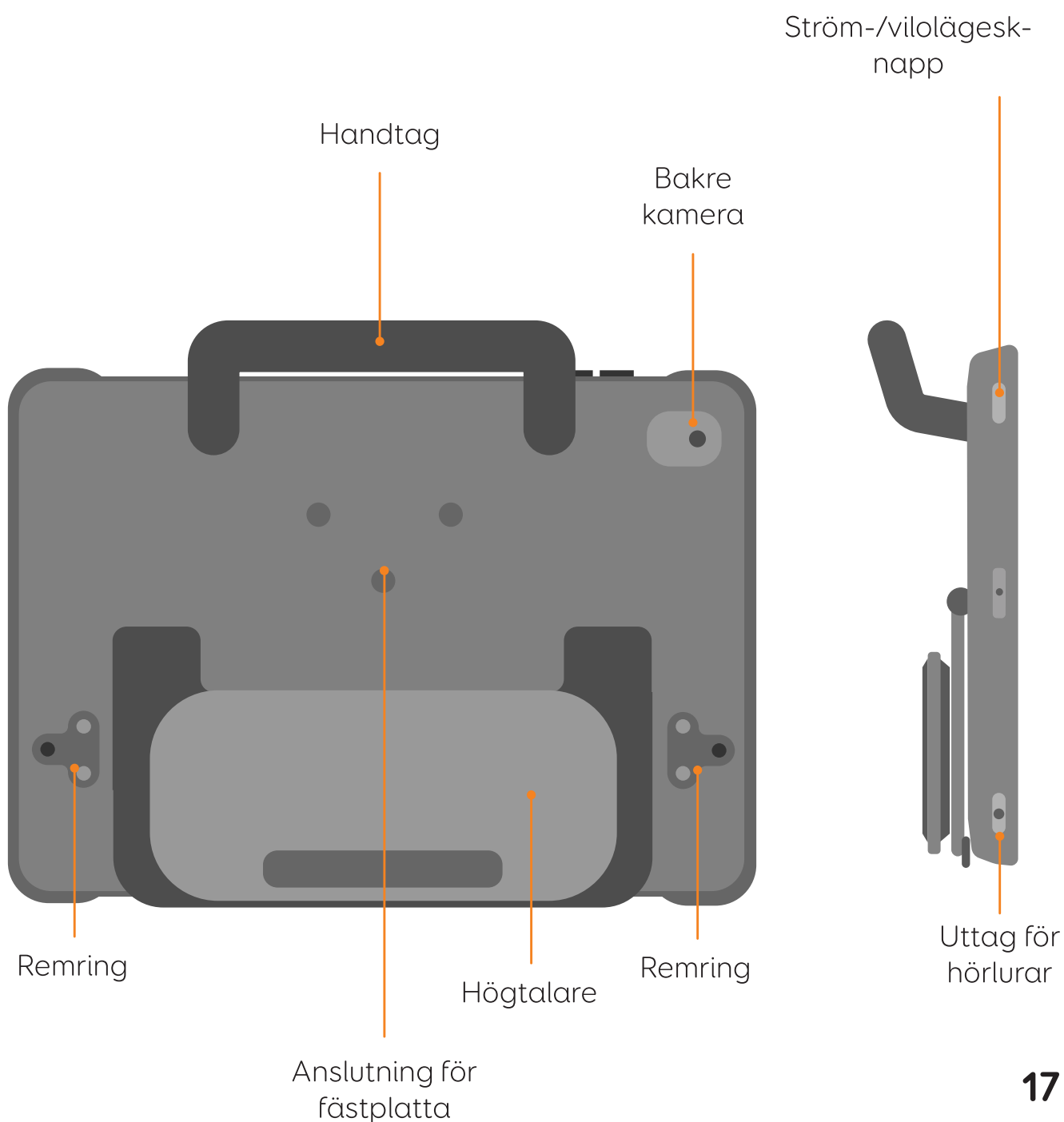

3

Talk Pad 13


- iPad Pro i tåligt fodral
- Bärrem
- Laddkabel för iPad
- Laddkabel för högtalare
- Skärmskydd
- Väska
- Grid for iPad

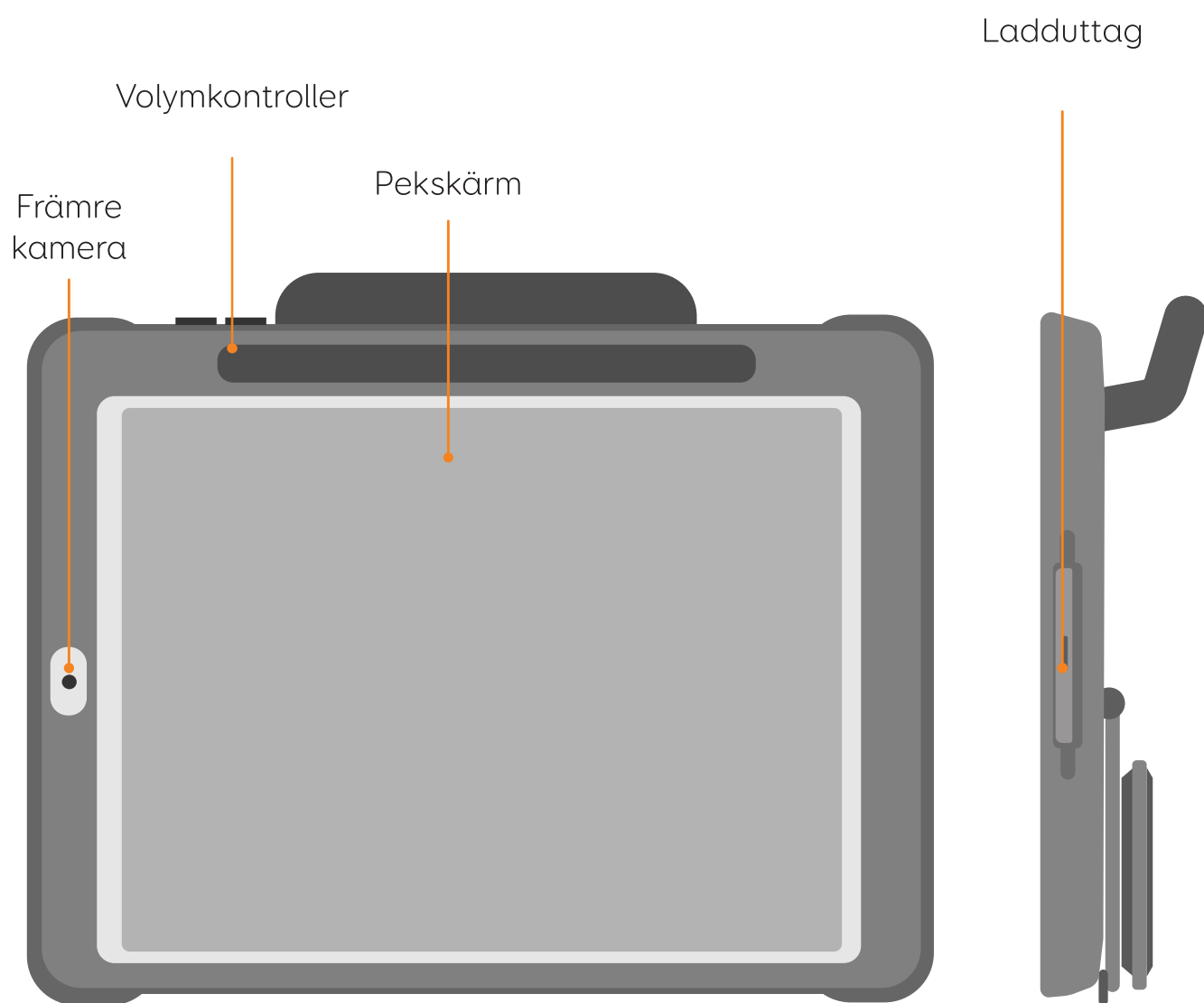

Talk Pad 13 har en 13-tumsskärm och kan enkelt bäras runt med handtaget eller den medföljande remmen. Den stora skärmen och den kraftfulla processorn gör enheten snabb och responsiv.

Det tåliga fodralet och skärmskyddet skyddar din iPad när Bluetooth-högtalaren alltid är ansluten.

Anslutningspunkter för monteringsplattan innebär att du kan montera enheten på en rullstol eller ett stativ.

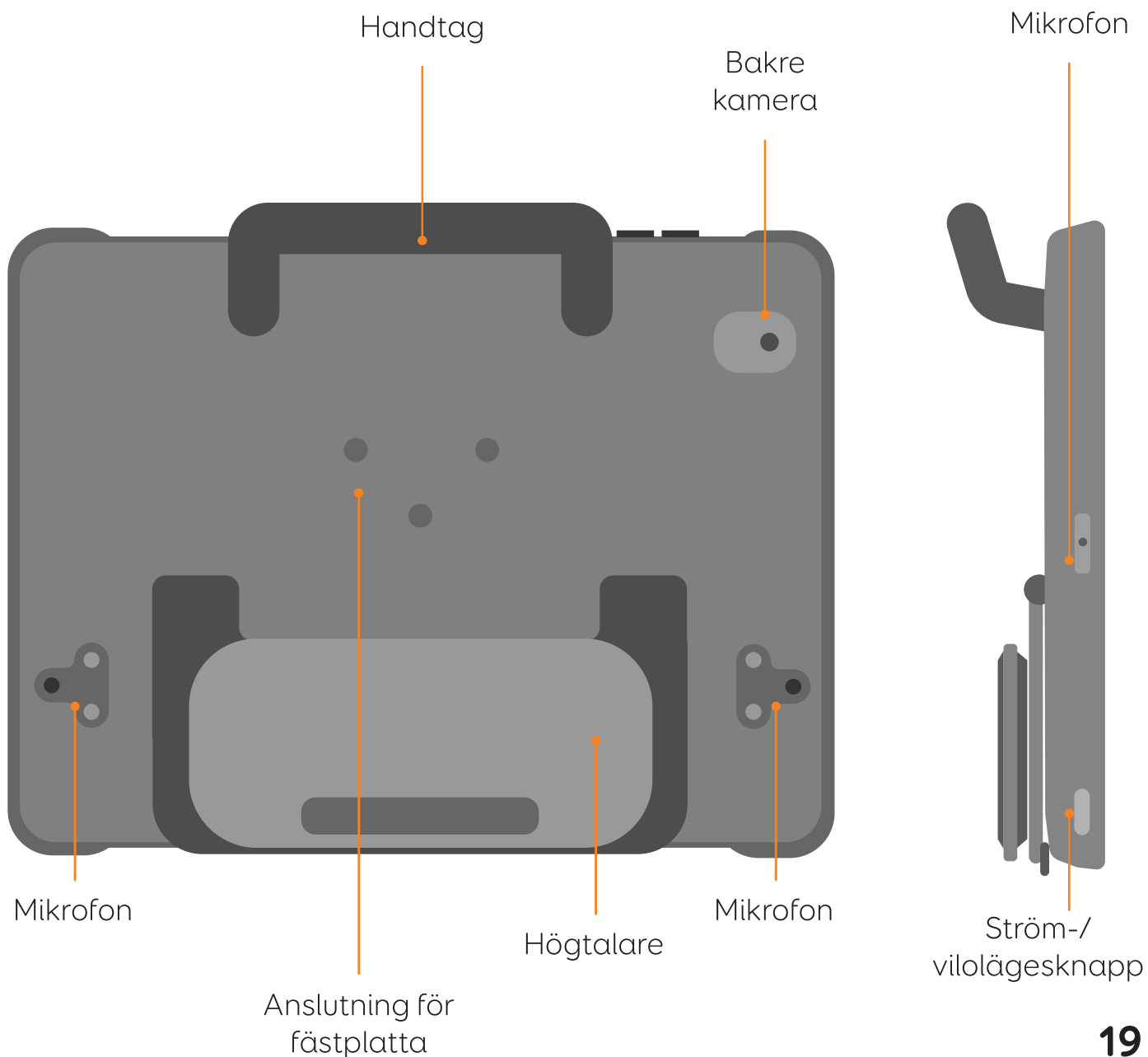


4

Starta din Talk Pad

Strömknappen finns längst upp till vänster på din Talk Pad.

Starta din apparat genom att hålla strömbrytaren intryckt i 3 sekunder.

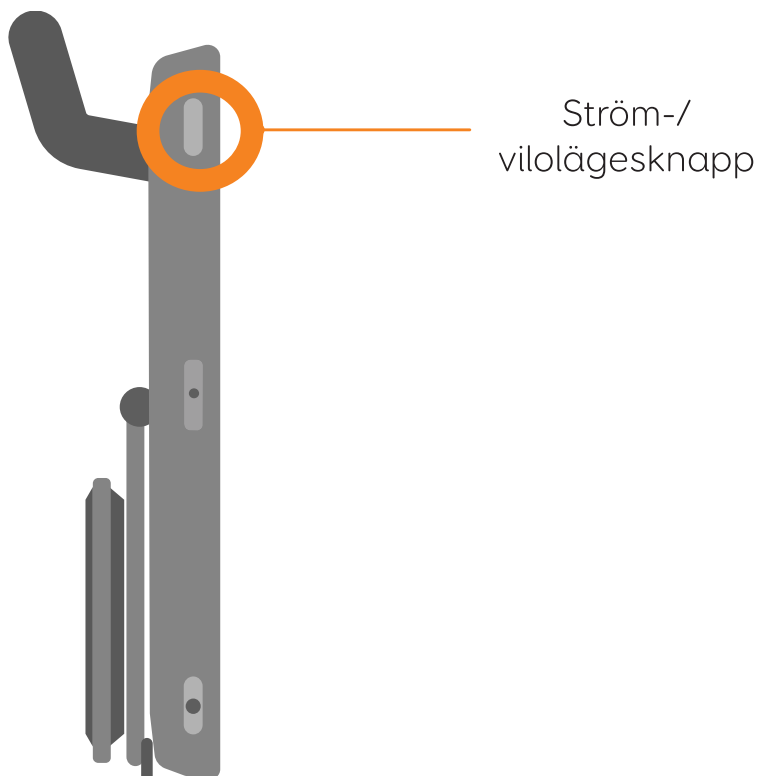

Sätt din Talk Pad i viloläge

Viloläge är ett energisparläge där enheten är inaktiv och skärmen är avstängd.

Tryck på strömbrytaren för att försätta enheten i viloläge.

Om du trycker på strömbrytaren igen aktiveras enheten.


Stänga av din Talk Pad

5

Stäng av enheten genom att hålla strömbrytaren intryckt i 3 sekunder.

Om du har en Talk Pad 13 håller du strömknappen intryckt och trycker på volymknappen.

Dra sedan reglaget "Svep för att stänga av" på skärmen för att stänga av enheten. Tryck på X för att avbryta avstängningen.

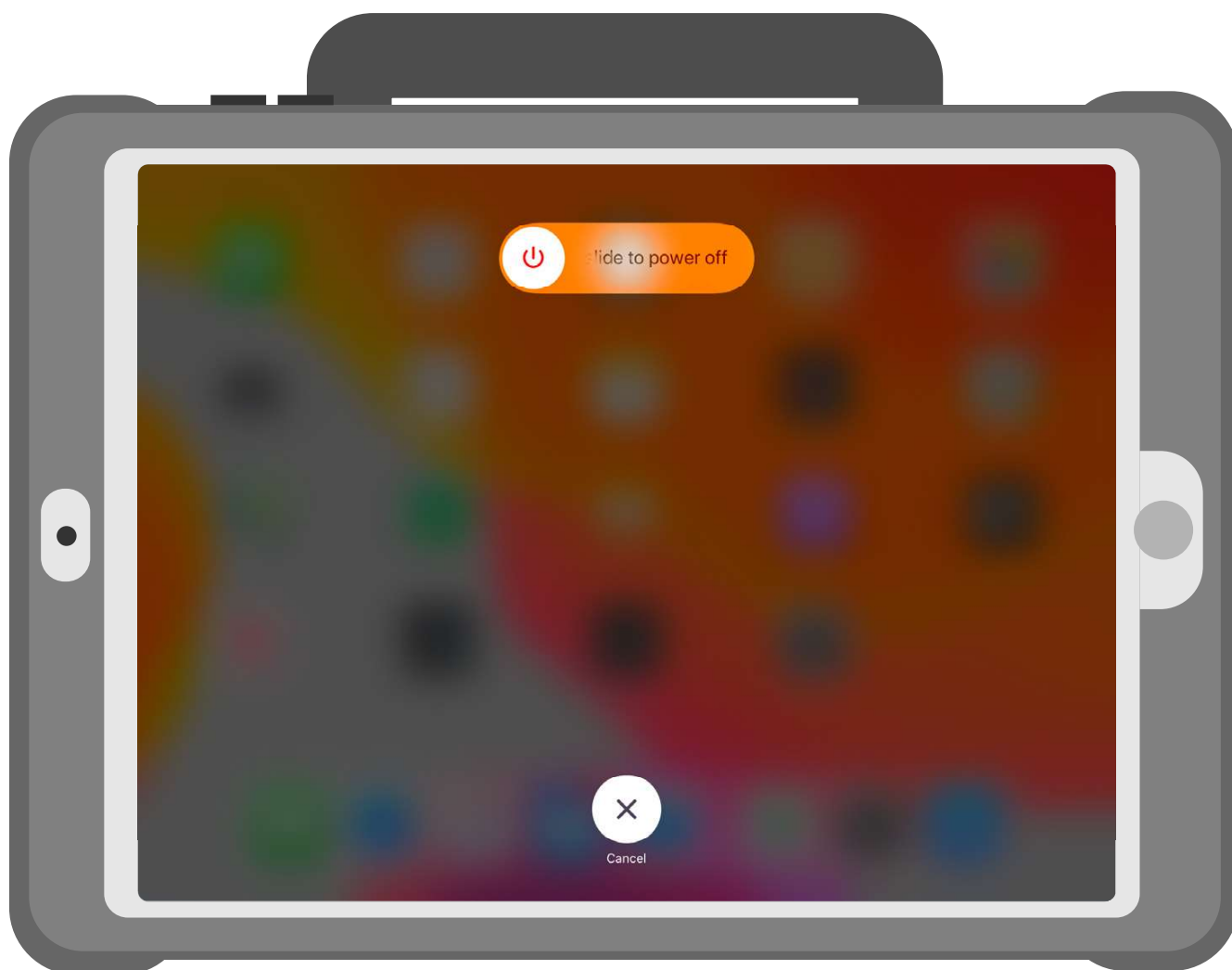

6

Ladda din Talk Pad


Talk Pad och högtalaren har separata batterier så båda bör laddas samtidigt.


Anslut din Talk Pad till nätadaptern med sin laddkabel. Adaptern är tydligt märkt.

Anslut högtalaren till nätadaptern med sin laddkabel.

Anslut nätadaptern till eluttaget för att ladda.


Det är bäst att ladda din Talk Pad när den inte används.

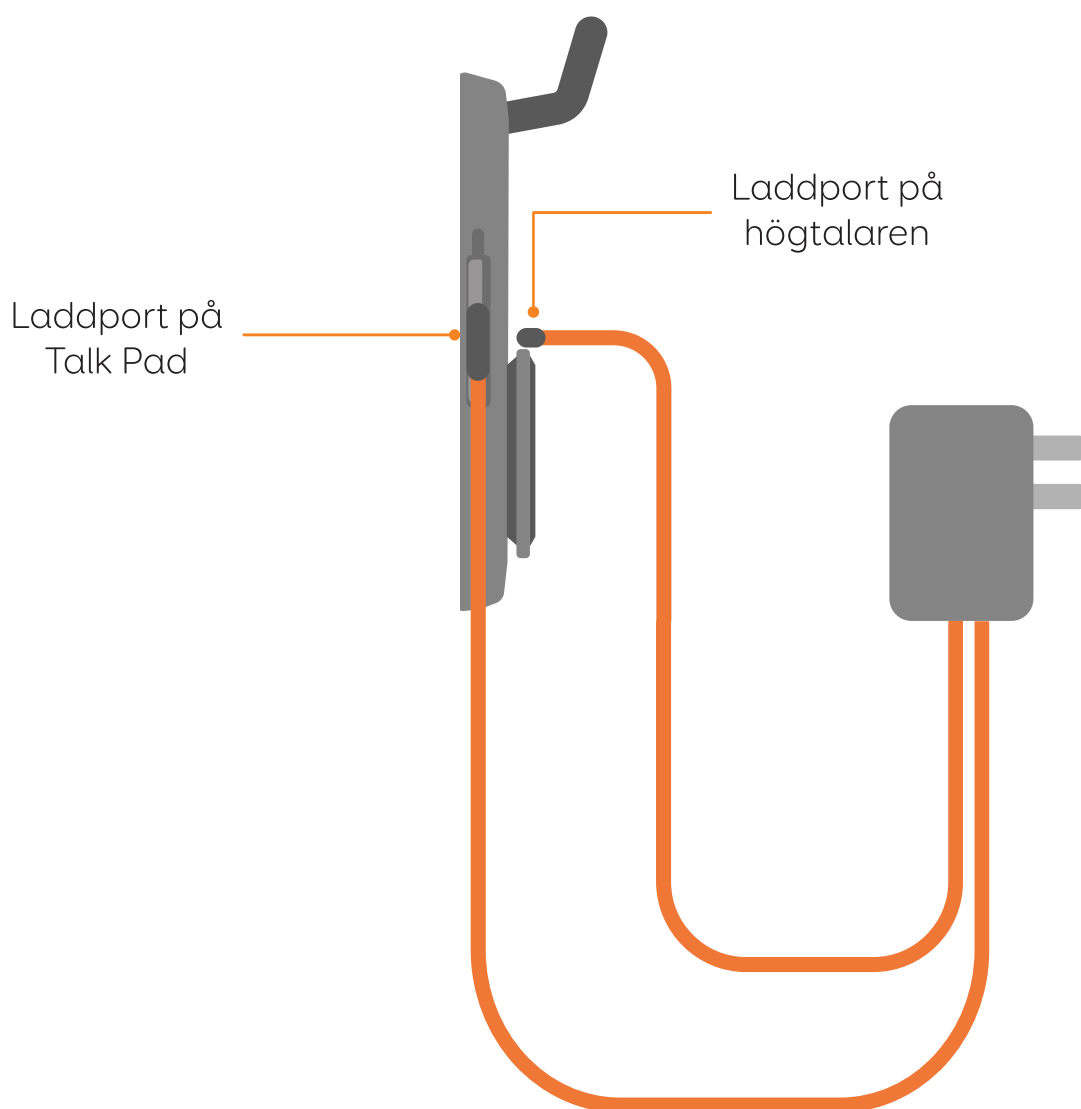

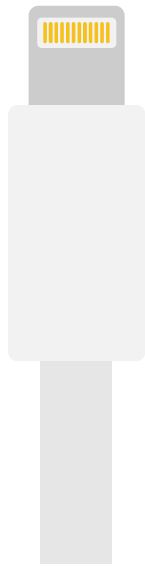


Lightning-kontakt

Talk Pad 8 och 10
laddportar

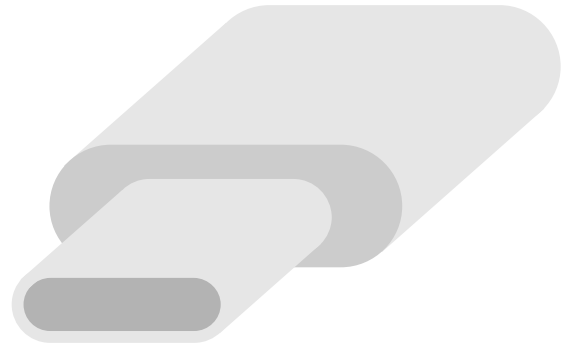

USB - C-kontakt

Talk Pad 13 och
Högtalarens laddportar

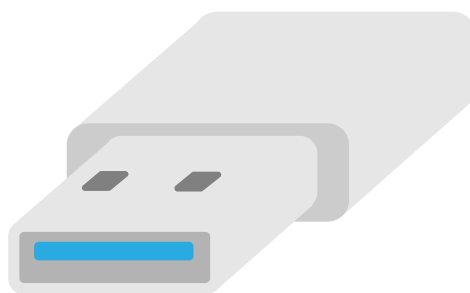

USB - A-kontakt


Ansluts till Lightning-
kabel och USB-kablar till
nätadaptern

7

Bluetooth-högtalaren

Din Talk Pad har en inbyggd Bluetooth-högtalare.


Beroende på hur din Talk Pad är konfigurerad kommer den antingen att paras ihop när du packar upp enheten eller så måste du para ihop högtalaren som en del av installationsprocessen.

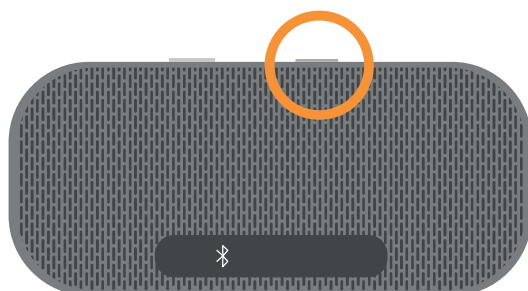

Högtalaren har en egen strömbrytare och batteri. Kom ihåg att ladda högtalaren när du laddar din apparat!

Var finns dina Bluetooth-inställningar?

Bluetooth-inställningarna finns i appen **Inställningar**. Välj **Inställningar** och sedan **Bluetooth** så visas en lista över alla anslutna enheter. Högtalaren listas som **Lenovo 700BT**.

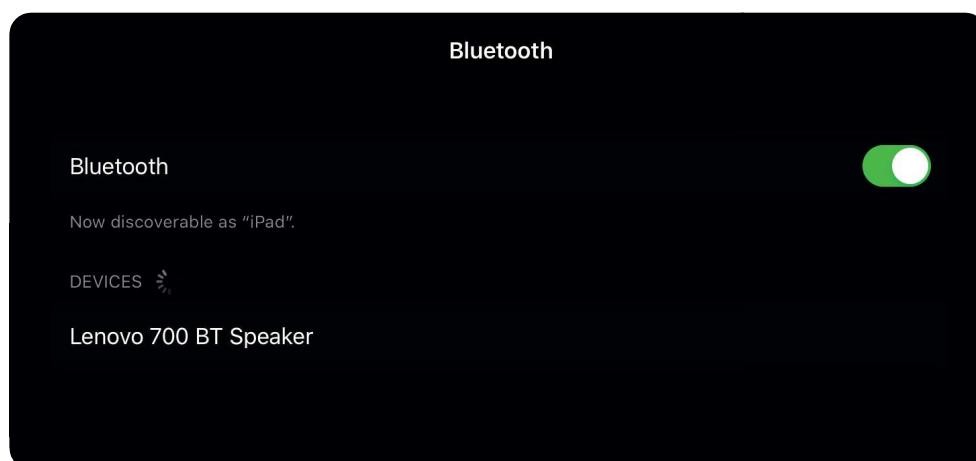


Återansluter din Bluetooth-högtalar

Om högtalaren kopplas bort från Talk Pad kan du enkelt återansluta den.


Steg 1

Om du har satt Smartbox-etiketten över högtalaren måste du ta bort den.

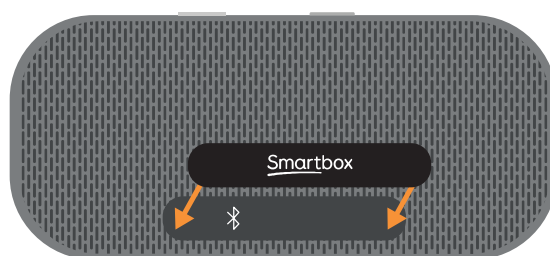

Steg 2

Håll Bluetooth-knappen nedtryckt i flera sekunder tills en blå lampa lyser på högtalaren.

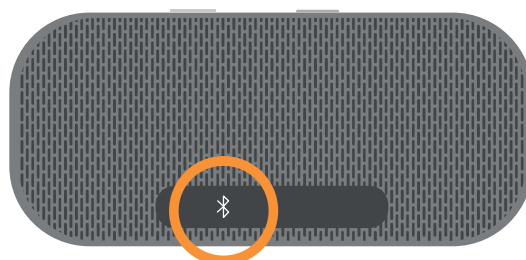

Steg 3

Öppna appen Inställningar och välj Bluetooth. Peka på Lenovo 700 BT Speaker för att ansluta högtalaren.

8

Placera din Talk Pad

Talk Pad kan bäras med det tåliga handtaget.

Stativet på baksidan av Talk Pad kan användas för att placera enheten på ett bord eller ett skrivbord.

För extra säkerhet kan du montera den medföljande remmen så att du kan bära enheten runt halsen.



Talk Pad 10 och 13 kan också monteras på ett stativ med den kombinerade Daessy-/Rehadapt-monteringsplattan som finns som tillval.


På så sätt kan du också placera Talk Pad på en rullstol eller ovanför en säng.




9

Använda stativet

Stativet för din Talk Pad kan användas för att placera det på ett skrivbord eller bord så att det kan användas bekvämt i alla vinklar.

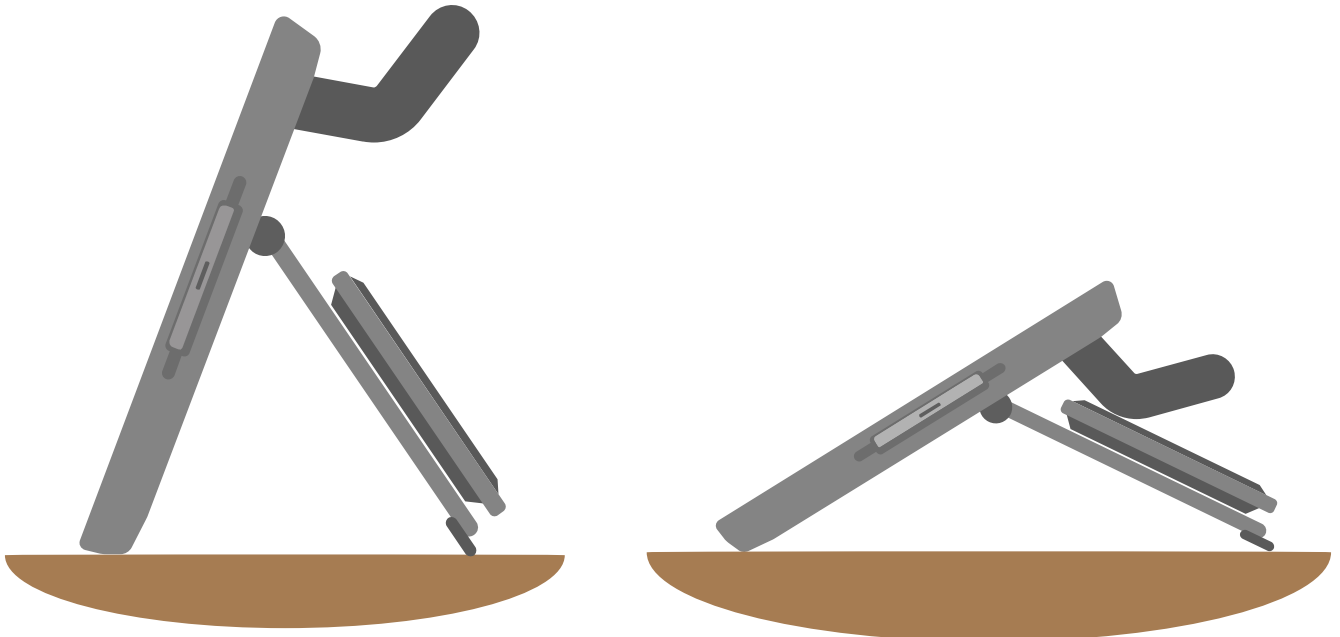


Observera att om du har fästplattan monterad på din Talk Pad ska du montera bort den innan du använder stativet eftersom det kan skada högtalaren.

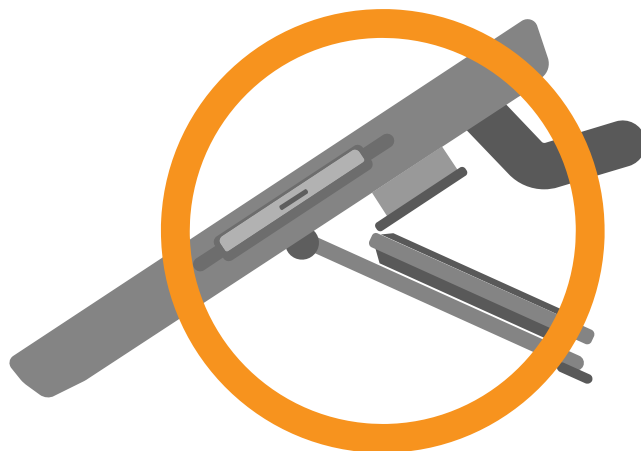

Justera stativet

Stativet på apparaten kan vinklas med viss tröghet och behåller sin position vid användning. Om du vill justera stativets tröghet kan du använda en insexnyckel för att dra åt låsmuttern. Dra inte åt för hårt.

Obs! Du måste göra det på båda sidorna!

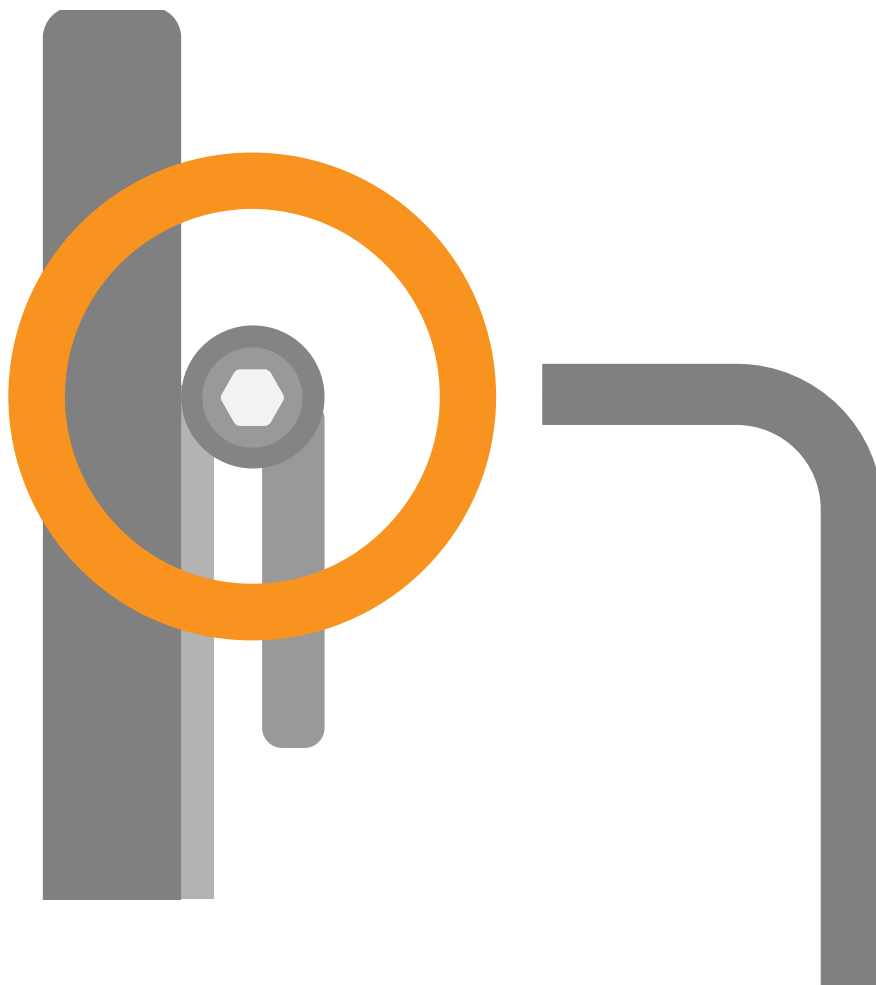


10

Fästa axelremmen

Väskan levereras med en axelrem som tillval.


Denna kan monteras genom att slingorna placeras runt hålen på baksidan av väskan.

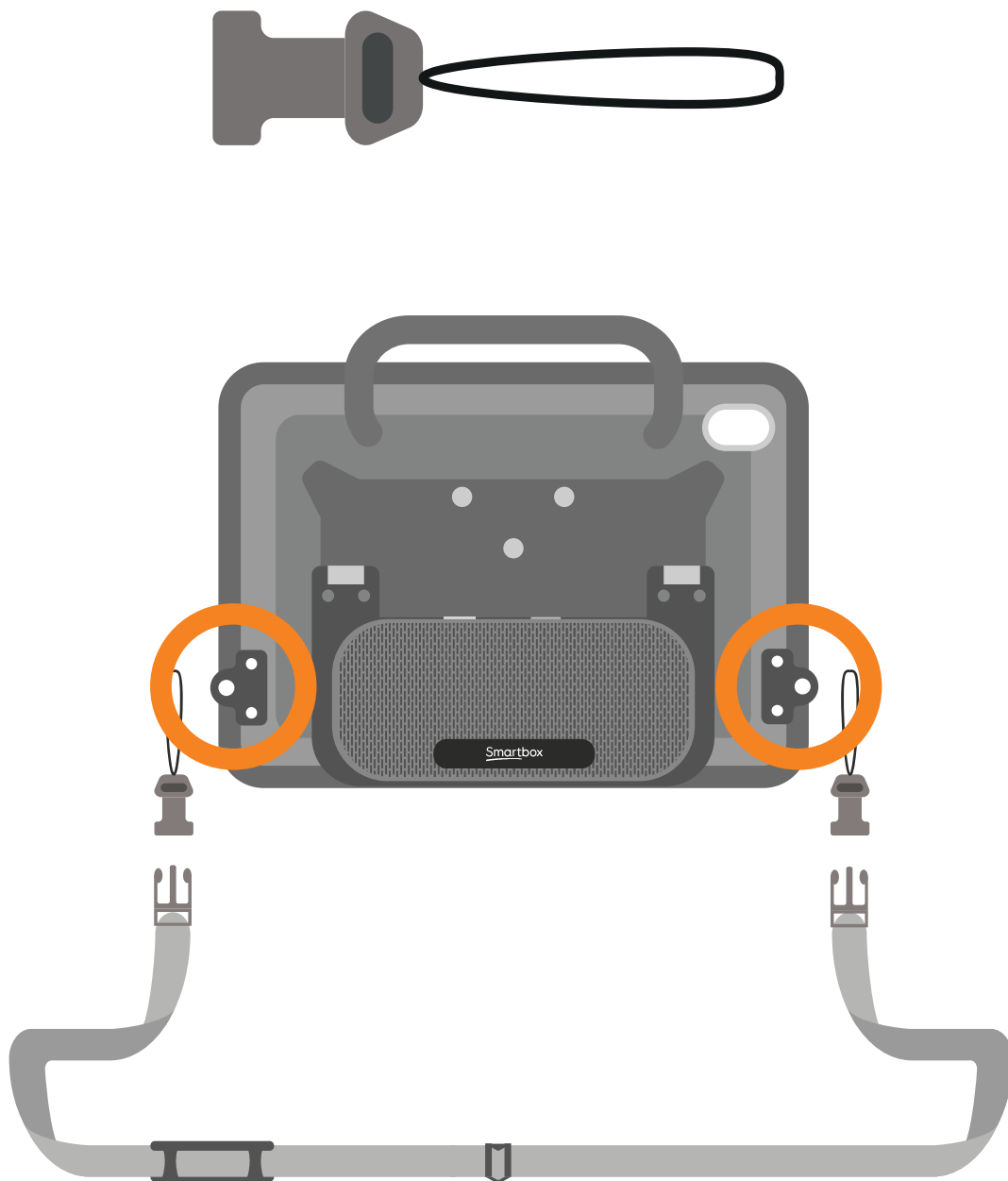

Monteringsatsen

11

Med iPad-fodralet kan du fästa en monteringsplatta så att du kan montera enheten efter behov.

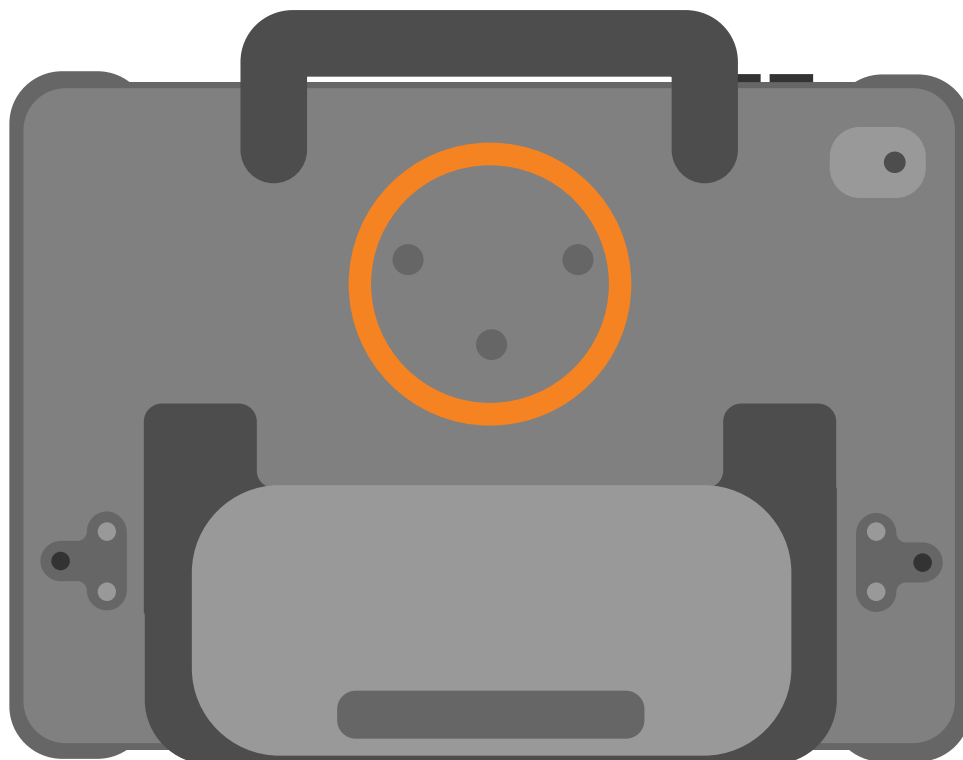

Monteringsplattan säljs separat.


Fäst distanserna och monteringsplattan i de tre skruvhålen på baksidan av apparaten.



12

Ansluta hörlurar

Talk Pad 8 och 10 har ett 3,5 mm hörlursuttag. Du kan använda den för att ansluta ett par hörlurar till enheten för personligt lyssnande.

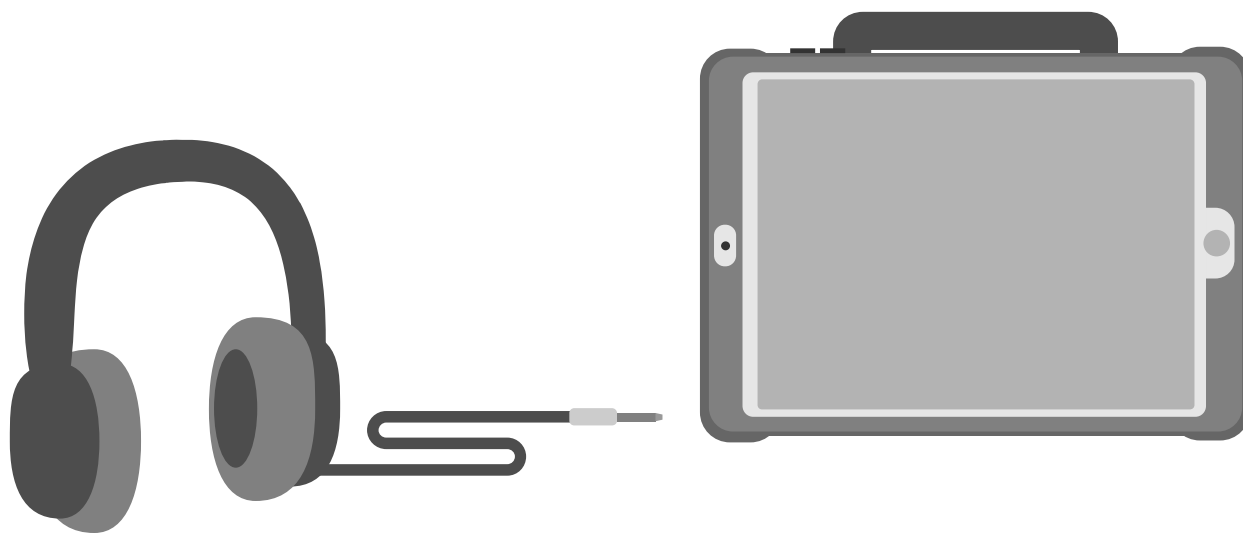

När du ansluter hörlurar slutar ljudet att komma genom Bluetooth-högtalaren.

När du ansluter hörlurar slutar ljudet att komma genom Bluetooth-högtalaren.

Använda ett raster

13

Ett raster kan enkelt fästas på skärmen på din Talk Pad.

Rastret är i plast och placeras framför pekskärmen och har skurits ut för att passa olika anpassningar i Grid for iPad. Med hjälp av dessa kan du göra mer exakta val på pekskärmen.

Talk Pad-rastret har en unik tejp. Denna håller fast rastret på skärmen, men kan tas bort utan att det blir kladdigt. De kan sättas fast och tas bort flera gånger och rengöras enkelt.

Sätta på ett raster

Se till att skärmen är ren och att skyddsfilmen är borttagen från baksidan av rastret.

Se till att Grid for iPad är öppen och är inställt på den anpassning du behöver.

Placera rastret på skärmen och passa in det mot din anpassning.

Tryck fast kanterna på rastret ordentligt mot skärmen.

Ta bort ett raster

Dra din nagel, ett kreditkort eller annat platt föremål emellan rastret och skärmen och lyfta försiktigt. Rastrets fastsugningsförmåga släpper och du kan ta bort rastret.

Komma igång med iPad OS

Din Talk Pad är byggd på en Apple iPad. iPad körs på ett operativsystem som kallas iPad OS (ibland kallat iOS).

iPad OS har ett antal funktioner som hjälper dig att navigera runt din Talk Pad och hjälpmedelsfunktioner för bättre åtkomst.

13	Använda pekskärmen	36
14	Startskärmen på din Talk Pad	38
15	Öppna och stänga appar	40
16	Inställningar	42
17	Konto och säkerhet	43
18	Låsa din Talk Pad	44
19	Åtkomstinställningar	45
20	Guidad åtkomst	46
21	App Store	47

14

Använda pekskärmen

Talk Paden är i första hand en pekskärms apparat. När du navigerar i iPad OS finns det några gester som hjälper dig att komma runt snabbt.



Knacka på

Peka med fingret på skärmen och ta sedan bort den snabbt.

När skulle du behöva göra det? –

För att öppna appen Grid for iPad, följ en webblänk, använd tangentbordet på skärmen.



Tryck och håll kvar

Peka med fingret på skärmen och håll kvar fingret en stund.

När skulle du behöva göra

det? – För att markera ett ord som ska kopieras eller öppnar en snabbmeny.



Svep

Dra snabbt ett finger över skärmen.

När skulle du behöva göra det? –


För att flytta mellan sidor, bläddra i listor eller i en samling bilder.



Skrolla

Tryck på skärmen och dra med fingret.

När skulle du behöva göra det? – För att navigera uppåt och nedåt på en webbsida eller i ett dokument eller i en bild.

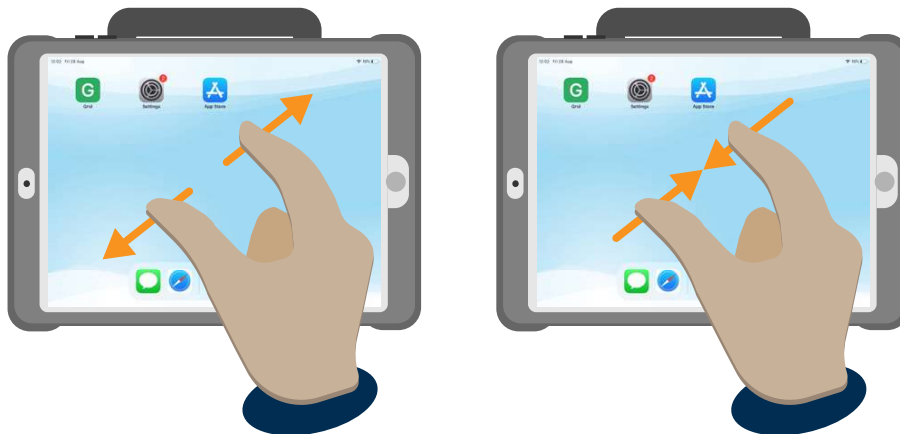

Zooma

Placera två fingrar på skärmen och dra isär dem för att zooma in, nyp ihop dem för att zooma ut.


När skulle du behöva göra det? – För att förstora en bild, eller text.

Kom ihåg att dessa gester kan kombineras! Till exempel Tryck och håll på på en text, följt av en svepning, då markeras texten du för fingret över.


15

Startskärmen på din Talk Pad

Det här är din iPad OS-startskärm. Beroende på din installation kan det se lite annorlunda ut, men det fungerar alltid på samma sätt.

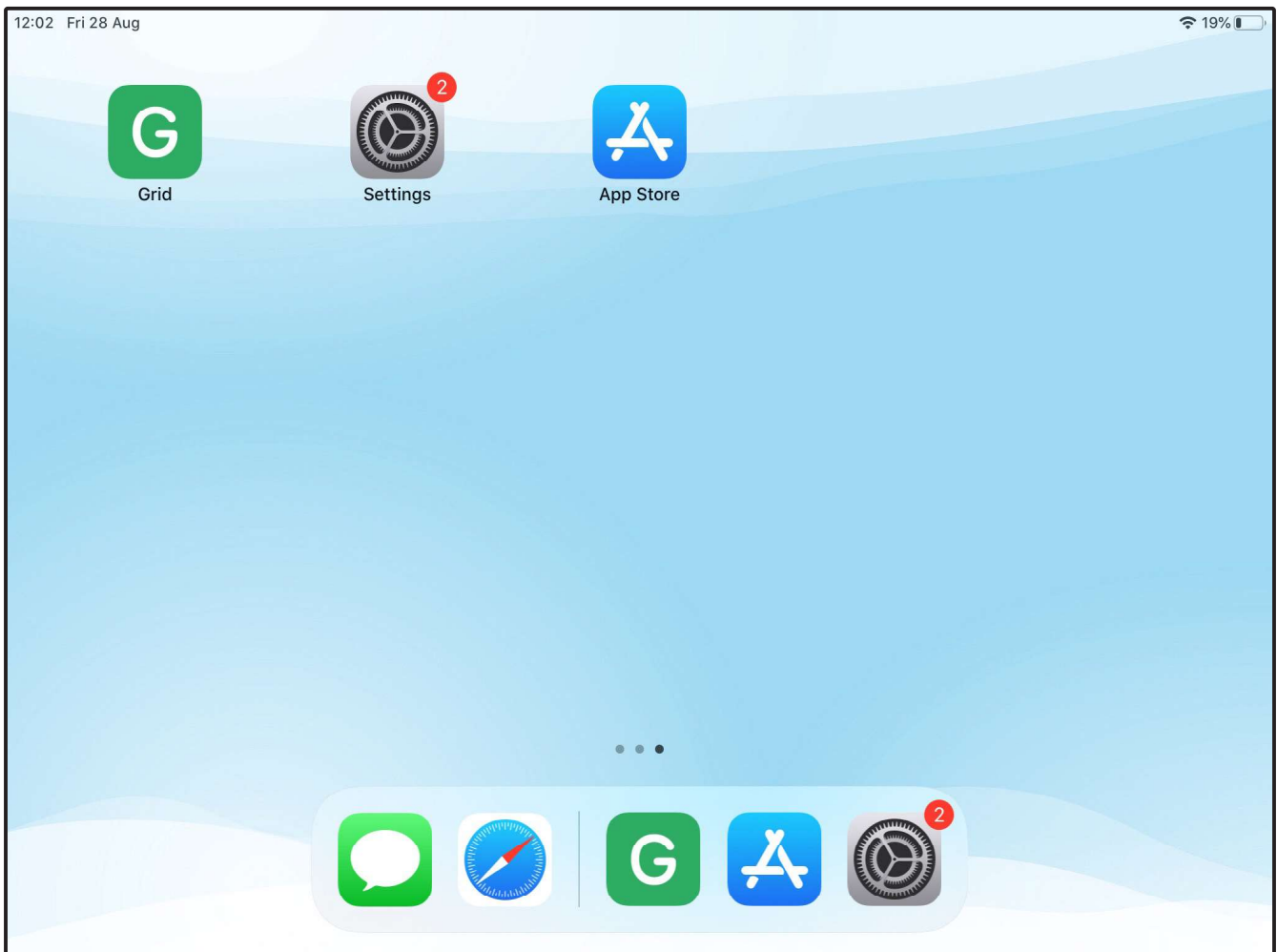

Om du hämtar fler appar till din Talk Pad fyller dessa upp startskärmen som kan ha flera sidor. Du kan svepa mellan sidor.

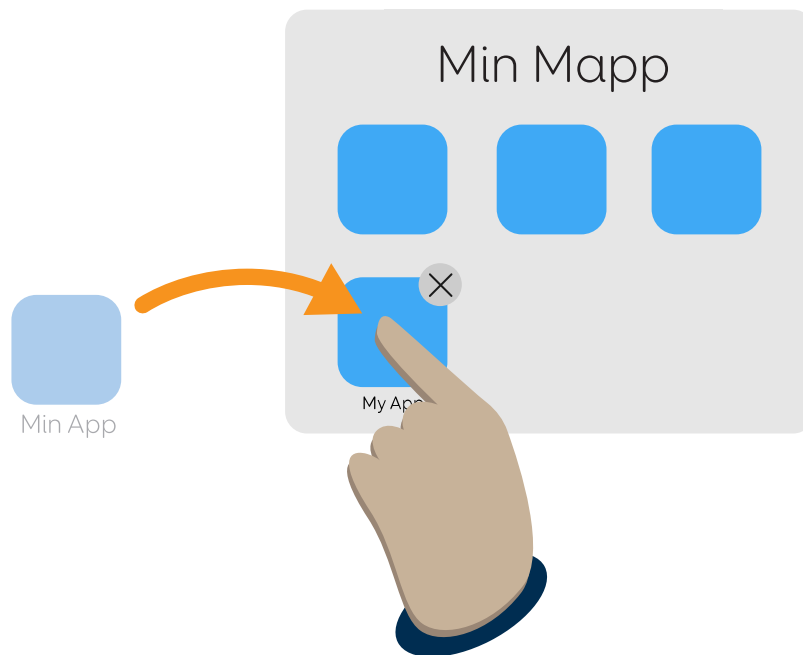

Appar kan organiseras i mappar. Du kan göra det genom att trycka och hålla kvar på en app tills den börjar skaka. Dra den sedan över den mapp du vill placera den i. Om du drar appen över en annan app skapar du en ny mapp.

Tips: Om du har en Talk Pad med manuell inställning har du många appar som Apple har tillhandahållit som du kanske inte behöver! Om du har en Talk Pad med manuell inställning har du många appar som Apple har tillhandahållit som du kanske inte behöver!

Du kan också skapa en mapp med appar som du kanske inte behöver hela tiden!

16

Öppna och stänga appar


Öppna en app genom att trycka på dess ikon! Appen öppnas.



När en app öppnas fyller den skärmen.

Lämna en app på Talk Pad 8 och 10

Om du vill stänga en app och återgå till startskärmen trycker du på Hem knappen en gång.

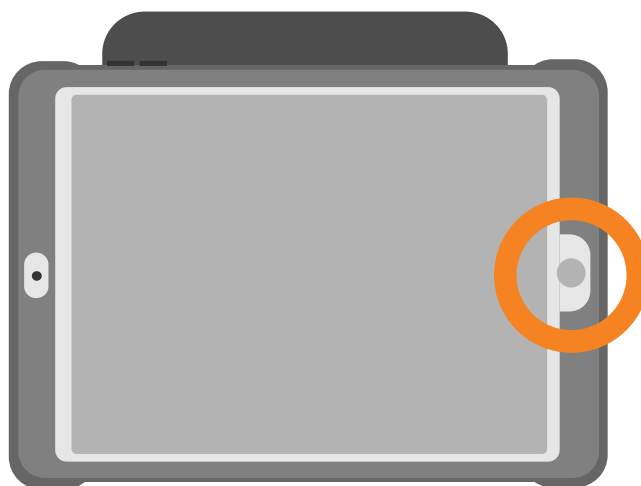

Lämna en app på Talk Pad 13

Om du vill lämna en app och återgå till startskärmen sveper du uppåt från skärmens nederkant.

Stänga appar

När du lämnar en app och återgår till startskärmen stänger du inte appen. I stället är appen **suspenderad**. Det innebär att du kan återvända dit du var, till exempel kan du hoppa direkt tillbaka till Grid for iPad.

Du vill till största delen lämna appar suspenderade om du växlar mellan dem.

För att stänga en app på Talk Pad 8 och 10

Tryck två gånger på hemknappen. Detta visas alla suspenderade och öppna appar. Dra sedan uppåt över den app du vill stänga.

För att stänga en app på Talk Pad 13

Svep uppåt från skärmens nederkant till mitten. Detta visas alla suspenderade och öppna appar. Svep sedan uppåt den app som du vill stänga.

17

Svep sedan uppåt den app som du vill stänga.

Anpassningar och justeringar av iPad OS görs i appen **Inställningar**.

Här kan du styra nästan alla aspekter av Talk Pad, från att ansluta till Wi-fi, ändra meddelandeljud och mycket mer.



Användbara inställningsområden

Wi-Fi

Anslut till Internet och hantera nätverk.


Allmänt

Ta reda på mer om din Talk Pad.

Skärm & Ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka, växla mellan ljust och mörkt läge och justera textstorleken.

Vissa inställningar kan aktiveras eller avaktiveras. Tryck på 'reglaget' bredvid inställningen för att ändra den.

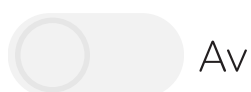

iPad OS har ett antal konto- och säkerhetsalternativ.

Ditt Apple-ID

Det här är det viktigaste kontot på enheten. Med det här kontot kan du köpa appar från AppStore, säkerhetskopiera din Talk Pad till iCloud, använda Hitta min enhet med mera. Du har skapat det här kontot under installationen om du har en samtalsplatta med manuell inställning.

Lösenkod

En sexsiffrig kod som används för att låsa upp Talk Paden och specifika inställningar.

Tvåfaktorsautentisering

Detta är kopplat till ditt Apple-ID och länkar ditt konto till en annan Apple-enhet eller mobiltelefon. Detta skickar en autentiseringskod till en annan enhet för att bekräfta inloggningar, inköp med mera.

Touch ID

Talk Pad 8 och 10 har en fingeravtrycksläsare Hem knappen. Denna kan användas istället för ett lösenord för att låsa upp enheten och bekräfta vissa åtgärder.

Face ID

Talk Pad 13 har en avancerad framåtriktad kamera som kan låsa upp enheten med ditt ansikte

Lösenkod för Guidad åtkomst

Med den här koden kan du avsluta läget för Guidad åtkomst.

19


Låsa din Talk Pad

Om du trycker på strömknappen på din samtalsplatta försätts enheten i viloläge.

Om du vill aktivera enheten måste du ange ditt lösenkod eller använda ditt Touch ID.

Om din Talk Pad levererades med manuell inställning har du lagt till ditt lösenord eller Touch ID under installationsprocessen.

Du kan aktivera eller avaktivera låset i appen Inställningar under Touch ID & Lösenkod.

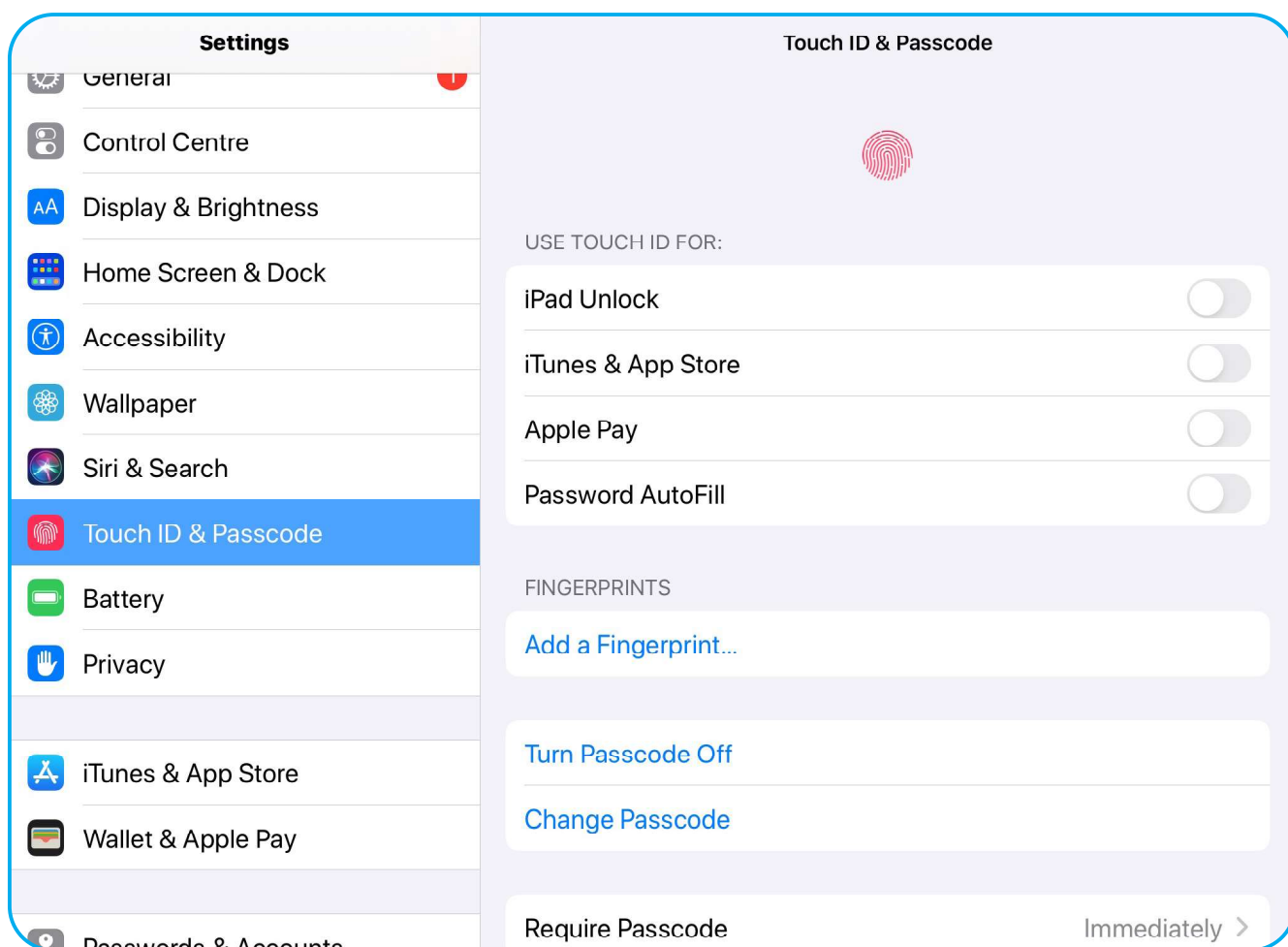

Åtkomstinställningar


20

iPad OS har många hjälpmedelsfunktioner som du kan använda för att underlätta navigering.

Hjälpmödelnsfunktionerna finns i appen Inställningar.

Tillgänglighetsinställningarna är utformade för iPad OS. Grid for iPad är redan utformat med tillgänglighet i åtanke och kräver därför inte alla funktioner.

Vi rekommenderar inställningarna för **Pek** och **Reglagestyrning**.

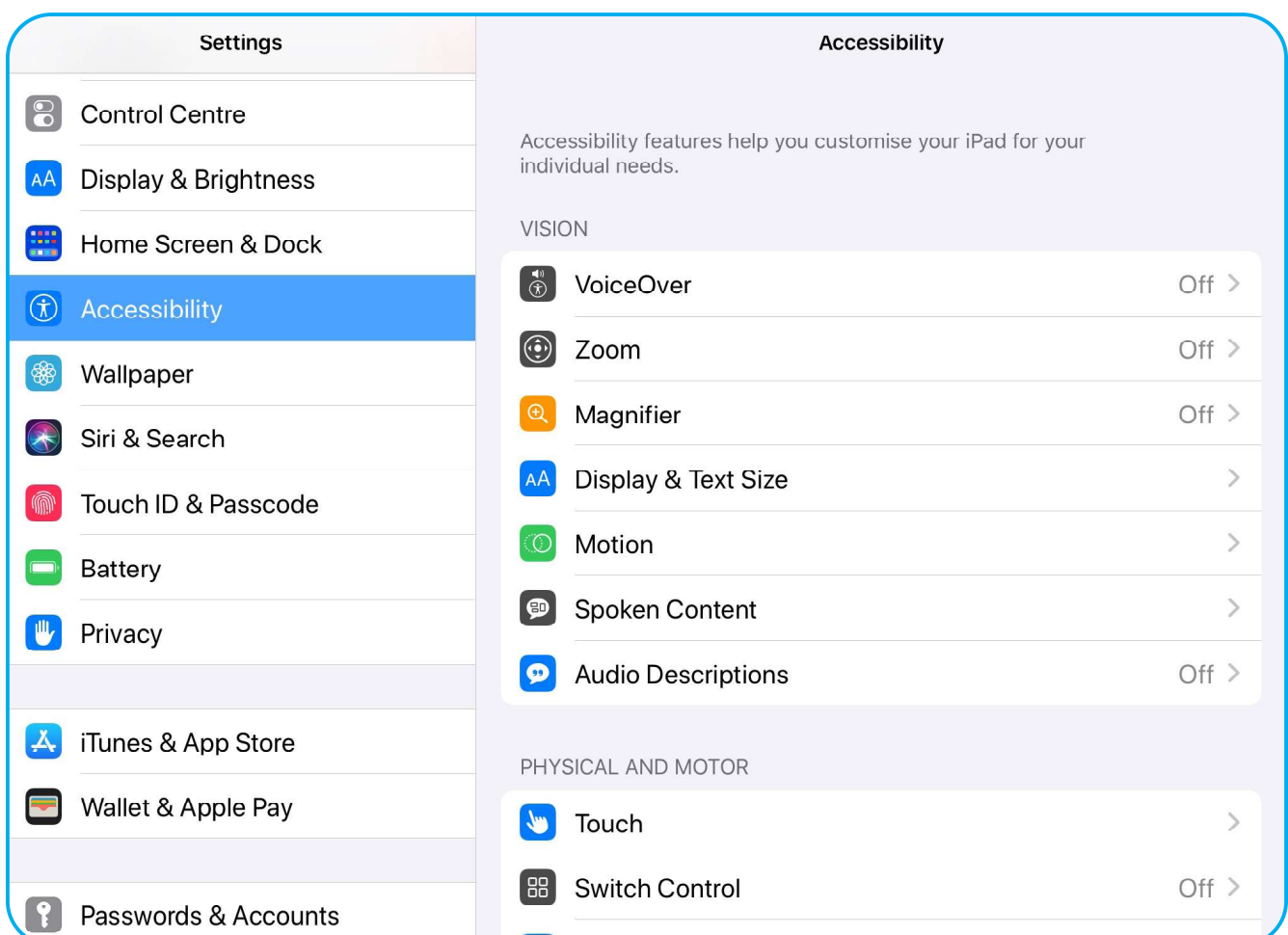

Du kan använda Guidad åtkomst för att låsa din Talk Pad till endast en app.

Under **Inställningar - tillgänglighet** väljer du Guidad åtkomst och slår sedan på reglaget.

Du måste ange en Lösenkod för Guidad åtkomst. Den här koden används för att avsluta Guidad åtkomst. Se till att du har koden nedskrivnen!

Du kan maskera ett område på skärmen för att förhindra åtkomst, till exempel täcka för knappen Grid Utforskaren i Grid for iPad.

Aktivera Guidad åtkomst på Talk Pad 8 och 10

Trippelklicka på knappen **Hem** för att komma till menyn Tillgänglighet.

Aktivera guidad åtkomst på Talk Pad 13

Trippelklicka på strömknappen för att öppna menyn för Tillgänglighet.

Stänga av Guidad åtkomst på Talk Pad 8 och 10

Trippelklicka på knappen **Hem** och ange lösenkode för Guidad åtkomst. Välj **Avsluta**.

Stänga av Guidad åtkomst på Talk Pad 13


Trippelklicka på strömbrytaren och ange lösenkoden för Guidad åtkomst. Välj **Avsluta**.

Om du har konfigurerat ett Apple-ID kan du använda det för att komma åt App Store. Här kan du hämta nya appar till din Talk Pad.

Du kan söka i App Store, bläddra efter kategori och visa listor med populära kostnadsfria och betalda appar.

Så här betalar du för appar

För att betala för en app måste du ha en betalningsmetod kopplad till ditt Apple-ID.

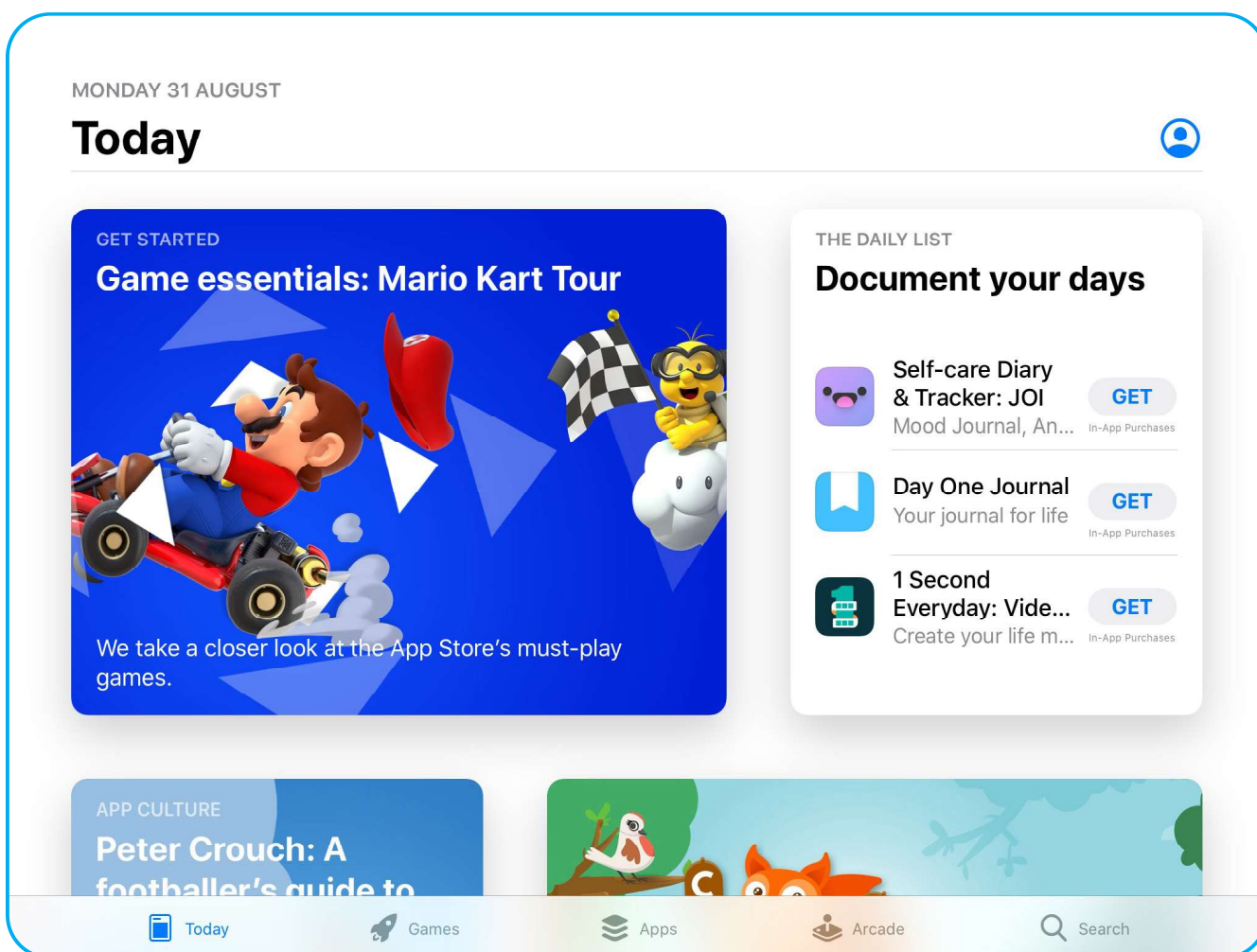

Komma igång med Grid for iPad

Grid for iPad är en komplett AKK-app som innehåller tillgång till ett stort bibliotek med anpassningar. Med Grid for iPad kan du ställa in en röst, bygga meningar, kommunicera med både text, symboler och mycket mer.

22	Komma igång med Grid	50
23	Ditt Smartbox-konto och din profil	52
24	Grid Utforskaren	53
25	Alternativ för Grid Utforskaren	54
26	Anpassningar	56
27	Anpassningens meny	58
28	Redigeringsläge	60
29	Att dölja menyn i Grid for iPad	62


23

Komma igång med Grid




Din profil

Din användarprofil lagrar ditt Smartbox-konto, Anpassningar och andra inställningar.

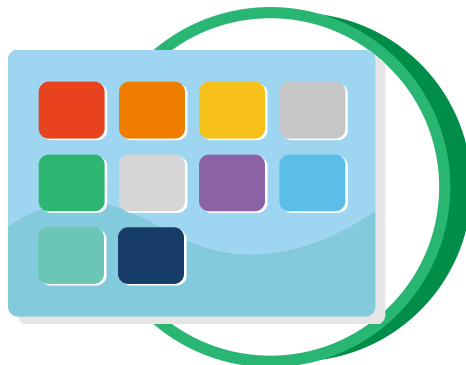

Grid Utforskaren

Grid Utforskaren är din hemskärm och det är där du hittar dina Anpassningar.

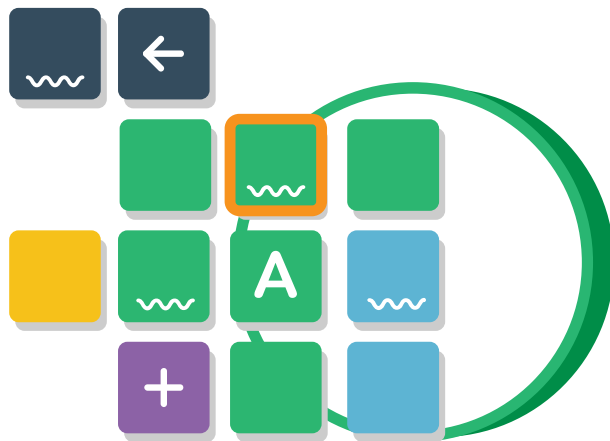

Anpassningar

En anpassning är som en app i Grid 3. Det här är dina resurser för kommunikation och mycket mer.



Redigeringsläge

Varje anpassning kan anpassas och redigeras eller bygger du en ny anpassning helt från grunden.

Ditt Smartbox-konto och din profil

När du startar Grid for iPad för första gången går du igenom några steg för att skapa ett Smartbox-konto och skapa din profil.

Om du redan har ett Smartbox-konto kan du logga in från startskärmen för att få tillgång till många av dina inställningar.

Om du vill konfigurera ett Smartbox-konto behöver du en e-postadress.

Du kan också länka ditt konto till Dropbox, en lagringslösning online. Detta möjliggör säkerhetskopiering av dina anpassningar och ger nätverket runtomkring möjligheten att redigera dina anpassningar via fjärrredigering.

Ditt Smartbox-konto kommer att spara

Ditt användarnamn

Dina röstinställningar

Dina Dropbox-åtkomstinställningar


Ditt Dropbox-konto kommer att spara

Dina Anpassningar

Dina Meddelandebanks fraser

Grid Utforskaren

25

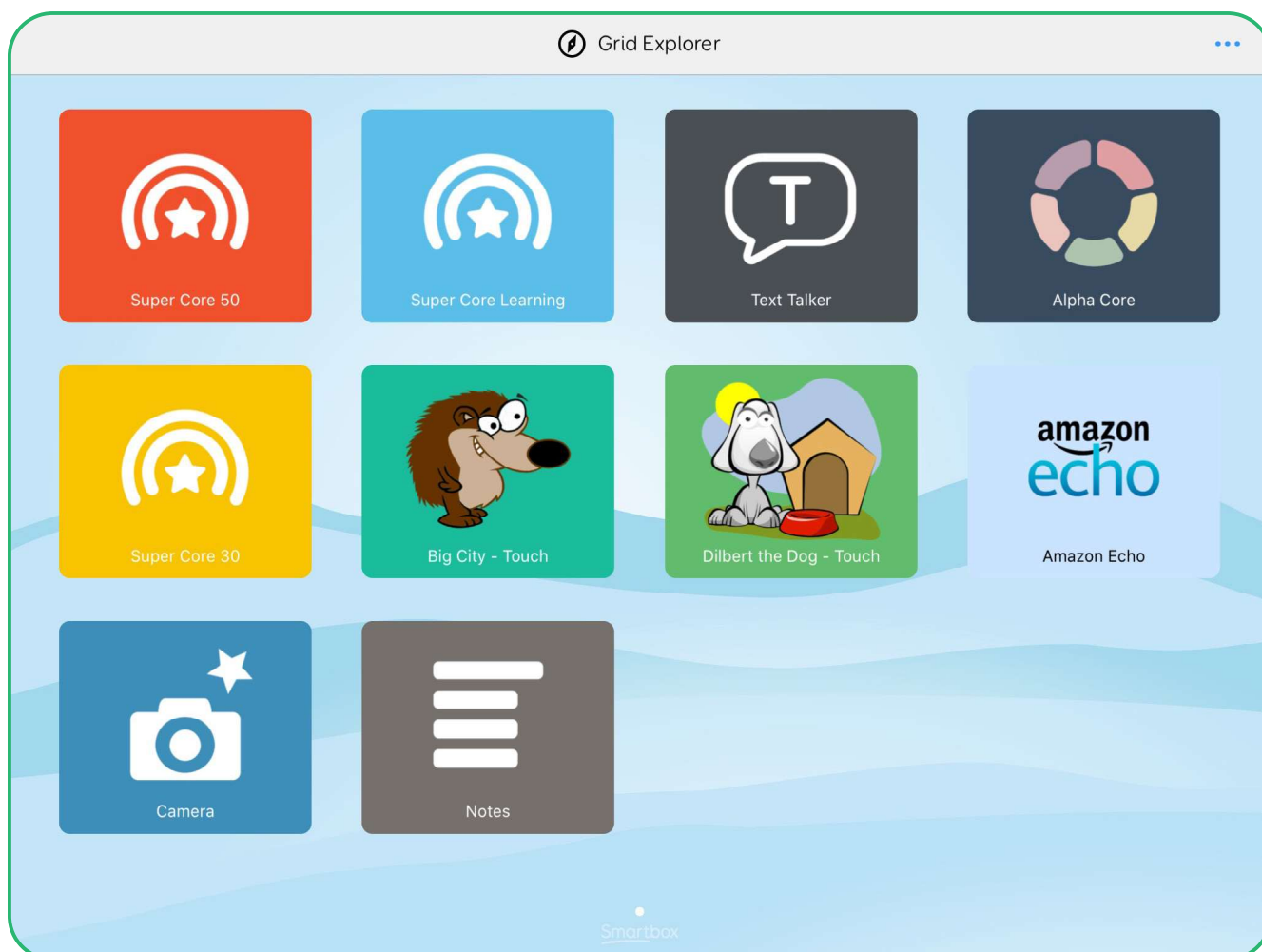


Det här är Grid Explorer, din startsida i Grid for iPad. Varje ikon är en anpassning. Öppna en anpassning genom att trycka på dess ikon.

Om Grid Utforskaren inte har några anpassningar kan du lägga till dessa från Lägg till anpassning..

Alternativ för Grid Utforskaren

Om du trycker pekar på de tre punkterna längst upp till höger i Grid Utforskaren öppnas menyn för Grid Utforskaren.

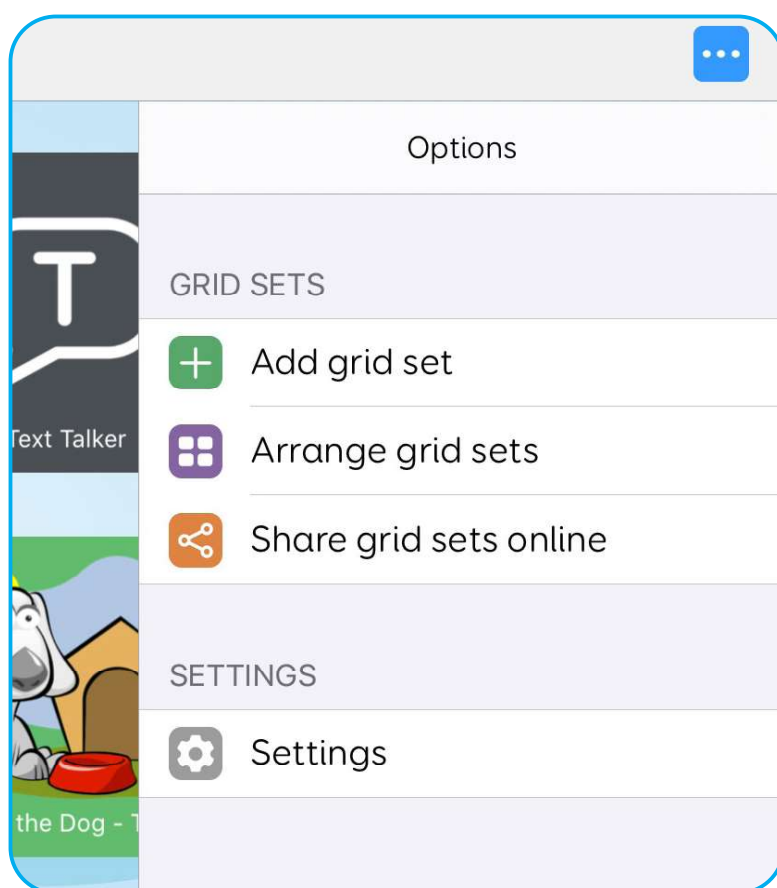

Lägg till anpassning

Öppna dialogen Lägg till anpassning där du kan bläddra bland anpassningar efter kategori.



Arrangera anpassningar

Arrangerar, skapa mappar och tar bort anpassningar från din Grid Utforskare.



Dela anpassningar online

Öppna fönstret dela anpassning. Du kan överföra dina anpassningar till Online Grids, vår plattform för delning av anpassningar. Anpassningar som överförs till Online Grids är tillgängliga för alla Grid användare.



Inställningar

Få åtkomst till dina Grid inställningar. Här kan du anpassa hur Grid fungerar, justera din profil med mera.

Anpassningar ordnas i kategorier. Du kan bläddra bland dessa när du väljer Lägg till anpassning i menyn från Grid Utforskaren.



Symbolkommunikation

Symbolbaserade anpassningar som använder kärnvokabulär eller bygger meningar utifrån ämnen.



Textkommunikation

Textbaserade anpassningar som erbjuder olika tangentbordslayouter och ytterligare funktioner som meddelandebank.



Interaktivt lärande


Roliga aktiviteter som kan användas för att introducera orsak och verkan, valfrihet och ett bra sätt att utforska åtkomst, med animeringar och spel.



Tillgängliga Appar

Surfa på internet, ta foton eller styr en Google Nest. Tillgängliga appar är extra verktyg för Grid-användare.

Grid for iPad har många anpassningar inkluderade. Nedan finns tre populära alternativ på start anpassningar.

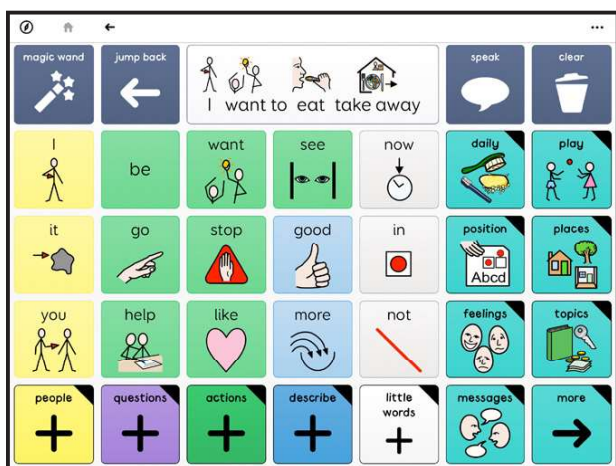


Super Core

Ett symbolbaserat kärnvokabulär, utformat för att hjälpa AKK-användare att få framgång med symbolkommunikation.

Text Talker

En kraftfullt tangentbords anpassning. Skapa meddelande snabbt i nuet och förbered för konversationer i förväg.

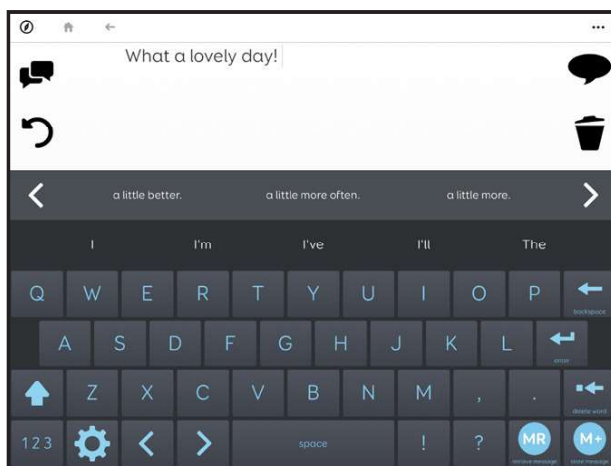

Alpha Core

Ett textbaserat AKK-vokabulär, utformat för läskunniga vuxna med varierande åtkomstbehov.


28

Anpassningens meny

När du befinner dig i en anpassning ändras Anpassnings menyn så att du får fler alternativ.

Den övre listen i en anpassning har följande alternativ:

Home grid

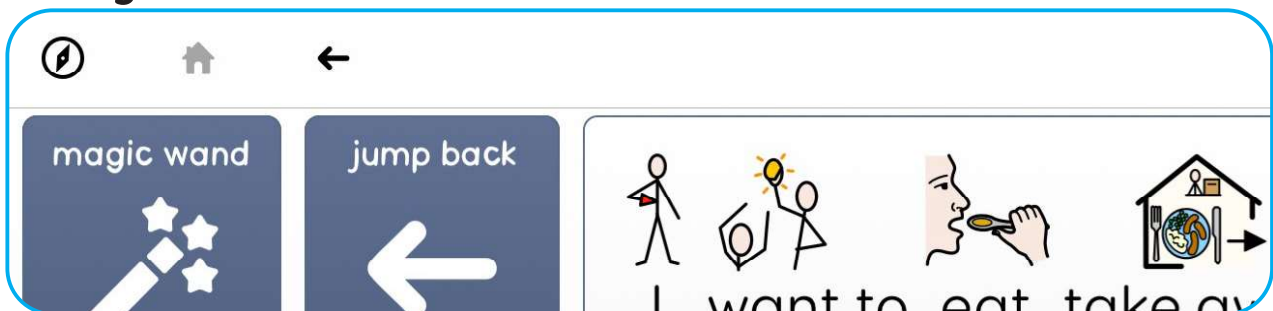

Grid Utforskaren

Stäng anpassningen och gå till Grid Utforskaren.



Startside

Går till anpassningen startside.



Tillbaka

Gå tillbaka till föregående sida.

Om du pekar på de tre punkterna längst upp till höger öppnas alternativmenyn.



Redigera sida

Öppna redigeringsläge för att börja redigera din anpassning .



Redigera ordlista

Redigera ordlistan på aktuell sida, om det finns någon.



Inställningar

Öppna inställningarna för anpassningen.



Sök ord

Öppna verktyget Sök ord, där du kan hitta förekomster av ord i anpassningen och visa hur du navigerar till dem.



Manual till Anpassningen

Öppna en webbläsare för att hämta hem dokumentationen till anpassningen.


29


Redigeringsläge

I redigeringsläget kan du redigera och ändra på en anpassning eller skapa en helt ny anpassning från början.

I redigeringsläge har du fullständig kontroll över hur anpassningen ser ut och du kan ändra hur varje cell beter sig.

Det kan vara så enkelt som att lägga till ett ord i en anpassning genom att skapa en ny skrivruta eller lägga till ett mer komplext kommando i en ruta som att ta ett foto på en kamera sida.

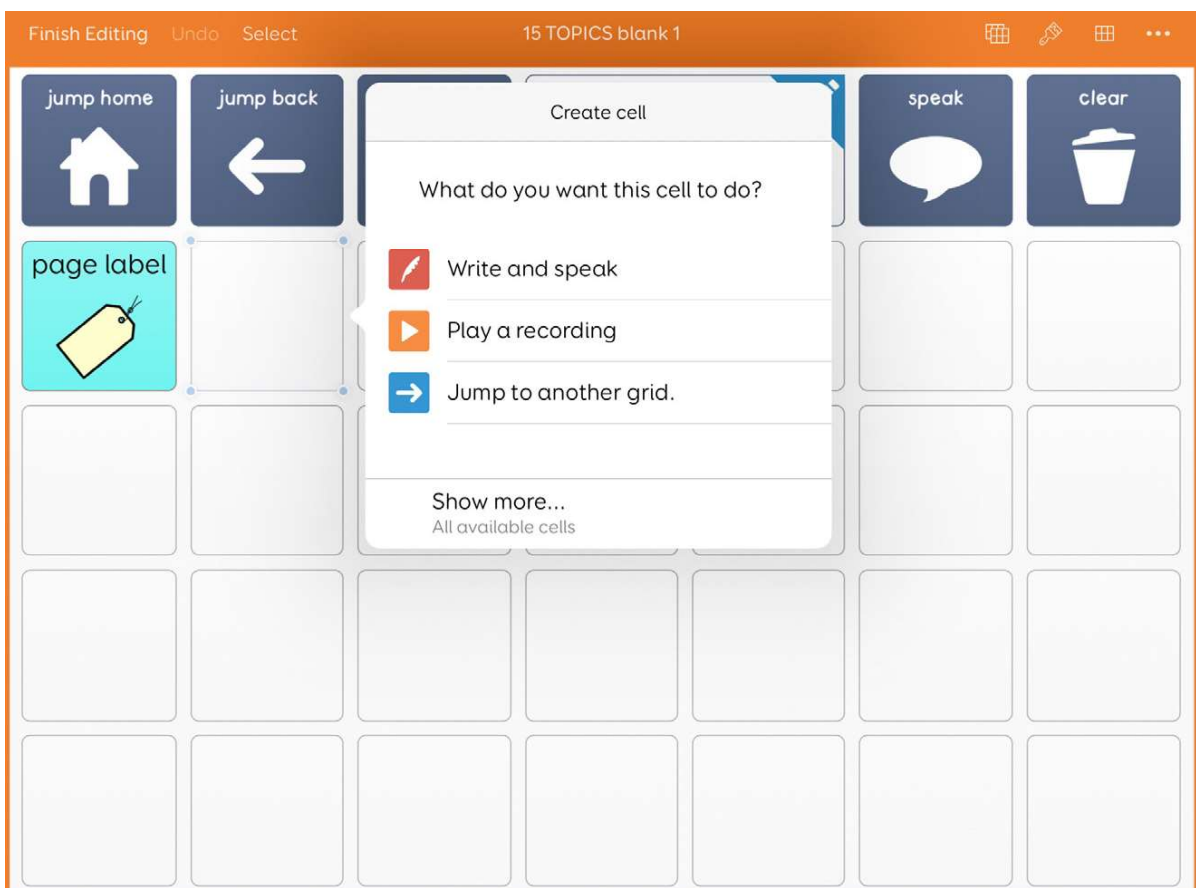

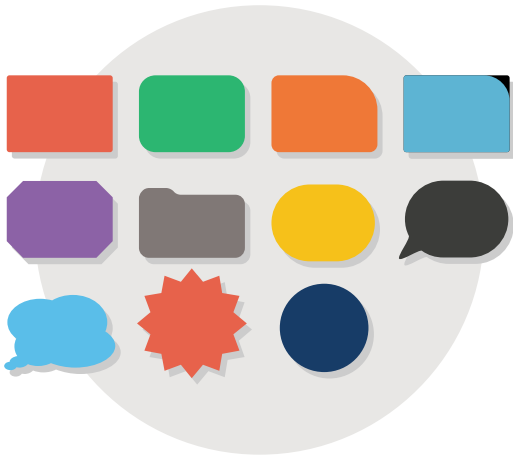

Utseende

Kontrollera storlek, färg och form för varje ruta.

Etikett

Justera etikettens teckensnittets och storlek.

Hello Hello Hello



Symbol

Du kan ändra eller redigera symbolen i varje ruta. Du kan även välja ett foto.


Läs mer på vårt utbildningscenter för Grid
thinksmartbox.com/training-centre

30

Dölj Trepunkts menyn i Grid for iPad

Du kanske vill förhindra åtkomst till menyerna i Grid for iPad vid användning.

Du kan fortfarande använda Grid utforskare, Hem- och bakåtknapparna för att navigera. Om du vill förhindra åtkomst till dessa måste du ställa in Guidad åtkomst.

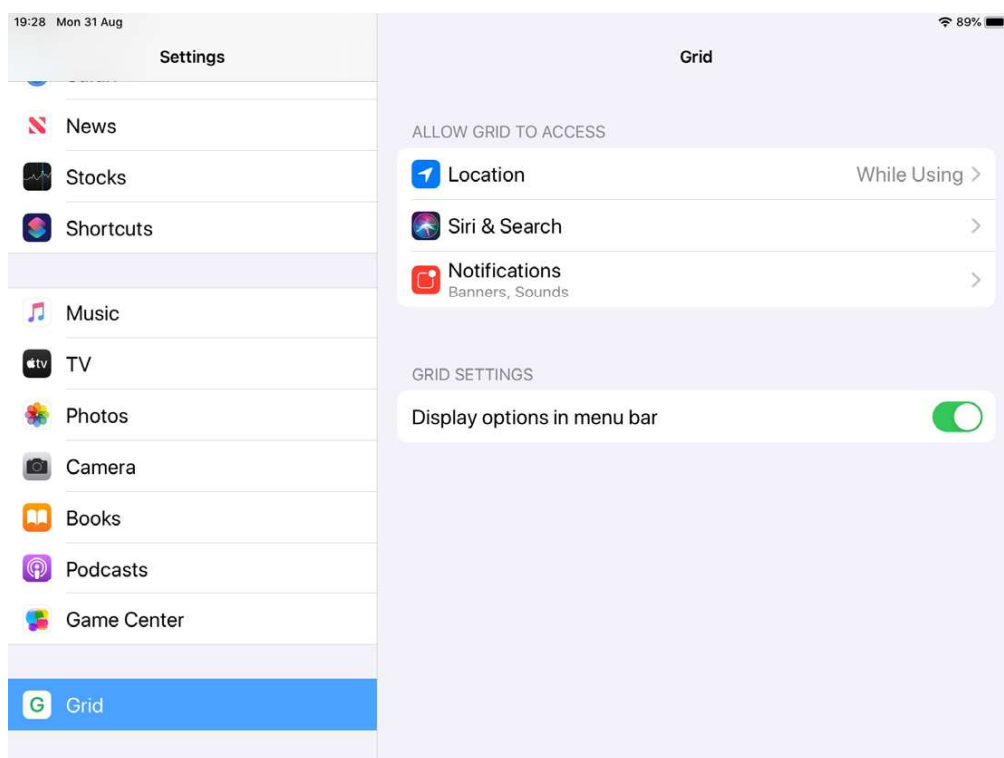

Inställningen för att dölja menyn finns utanför Grid for iPad, i iPad OS egna Inställningar. Scrolla ned det vänstra alternativet tills du hittar Grid.

Slå av eller på "Visa Inställningsmenyn i sidofältet".

**Ta hand
om din Talk
Pad**

I det här avsnittet beskrivs hur du tar hand om Talk Pad och hur du får hjälp.

Säkerhetsmeddelandena innehåller viktig användningsinformation och överensstämmelse.

31	Uppdatera Grid for iPad	66
32	Uppdaterar iPad OS	68
33	Säkerhetskopiera dina anpassningar med Dropbox	69
34	Säkerhetskopiera din Grid-användare	70
35	Support	72
36	Hitta modell- och serienumret	73
37	Ta bort iPad	74
38	Sätta i iPad	75
39	Säkerhetsföreskrifter	76

Uppdatera Grid for iPad

Grid for iPad uppdateras ständigt med nya funktioner, Anpassningar och för att dra nytta av nya iPad-funktioner.


Automatiska uppdateringar

Om din Talk Pad är ansluten till internet kan den hämta uppdateringar automatiskt.

I appen iPad-inställningar väljer du ditt Apple-ID.

Välj iTunes och App Store.


Under rubriken automatiska hämtningar växlar du programuppdateringarna till på.

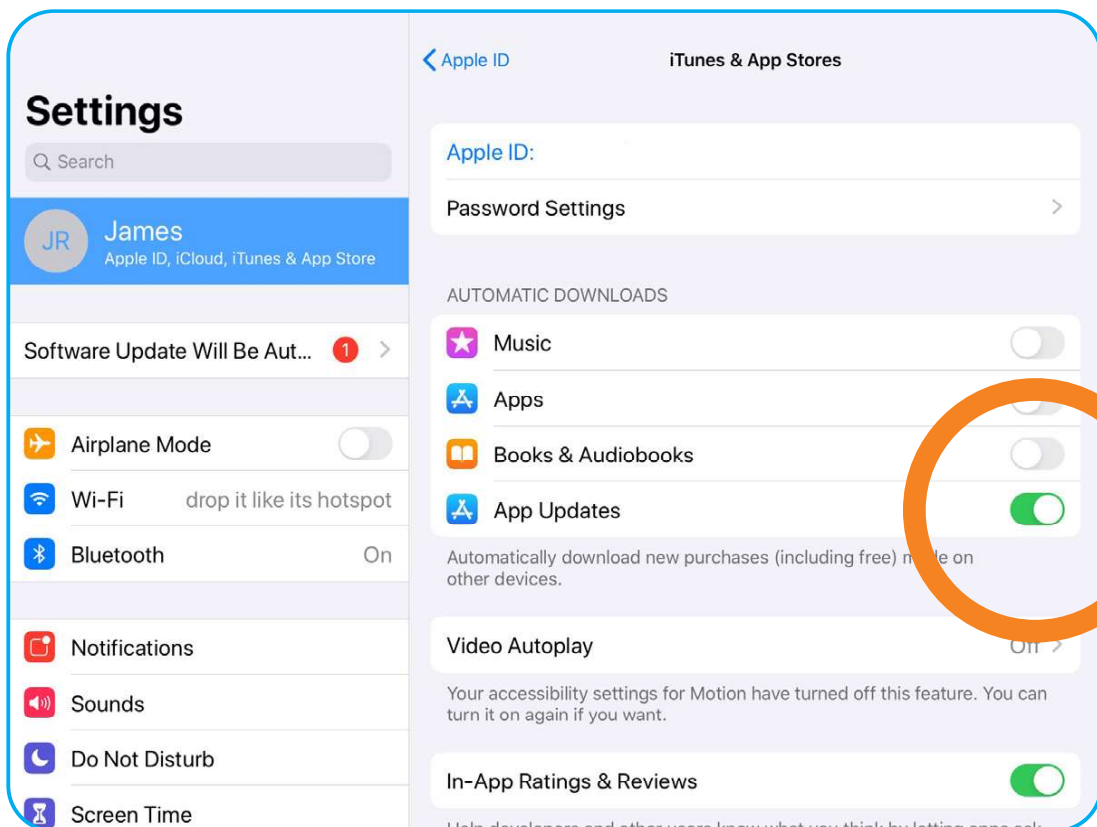

Manuella uppdateringar

Du kan söka efter en manuell uppdatering i App Store-appen.

Tryck på ikonen Användare längst upp till höger.

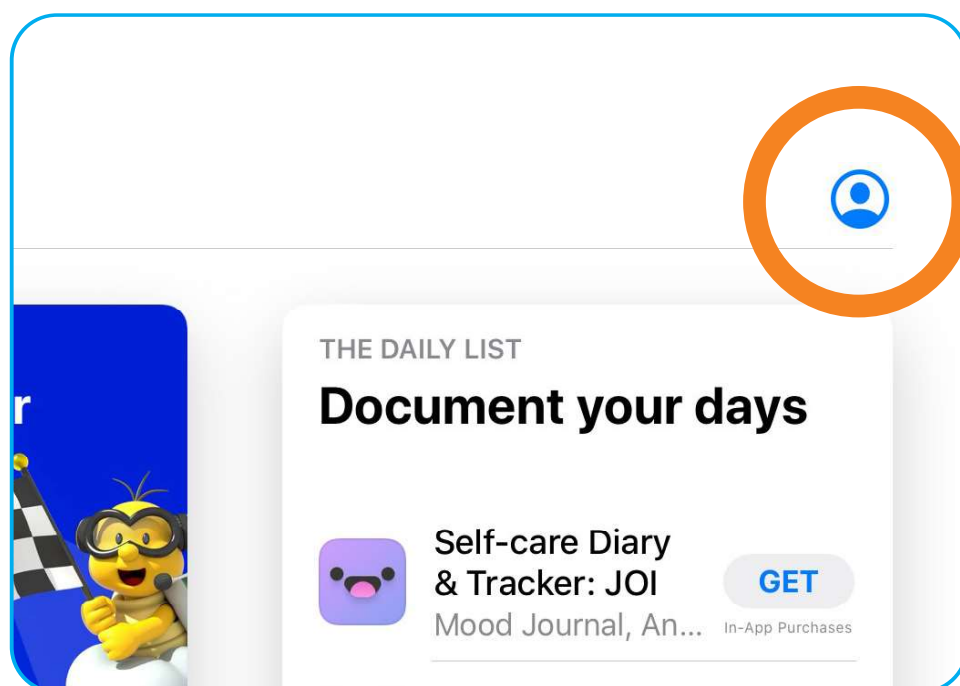


Bläddra nedåt så visas en lista över tillgängliga uppdateringar med en hämtningsikon till höger.

32

Uppdaterar iPad OS

IPad OS får regelbundna uppdateringar från Apple. Om din Talk Pad är online hämtas dessa automatiskt.

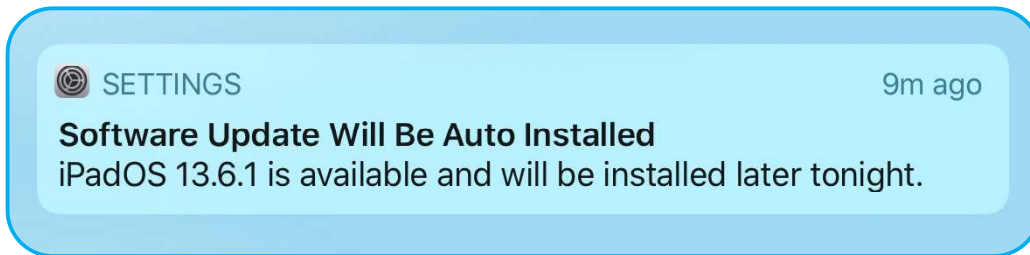

Du kan se ett meddelande på låsskärmen. Uppdateringar installeras endast om Talk Pad är på laddning.


Du kan söka efter uppdateringar manuellt i appen Inställningar under Allmänt.



Säkerhetskopiera dina anpassningar med hjälp av Dropbox

33

Det är viktigt att du säkerhetskopierar dina Anpassningar och din användarprofil.

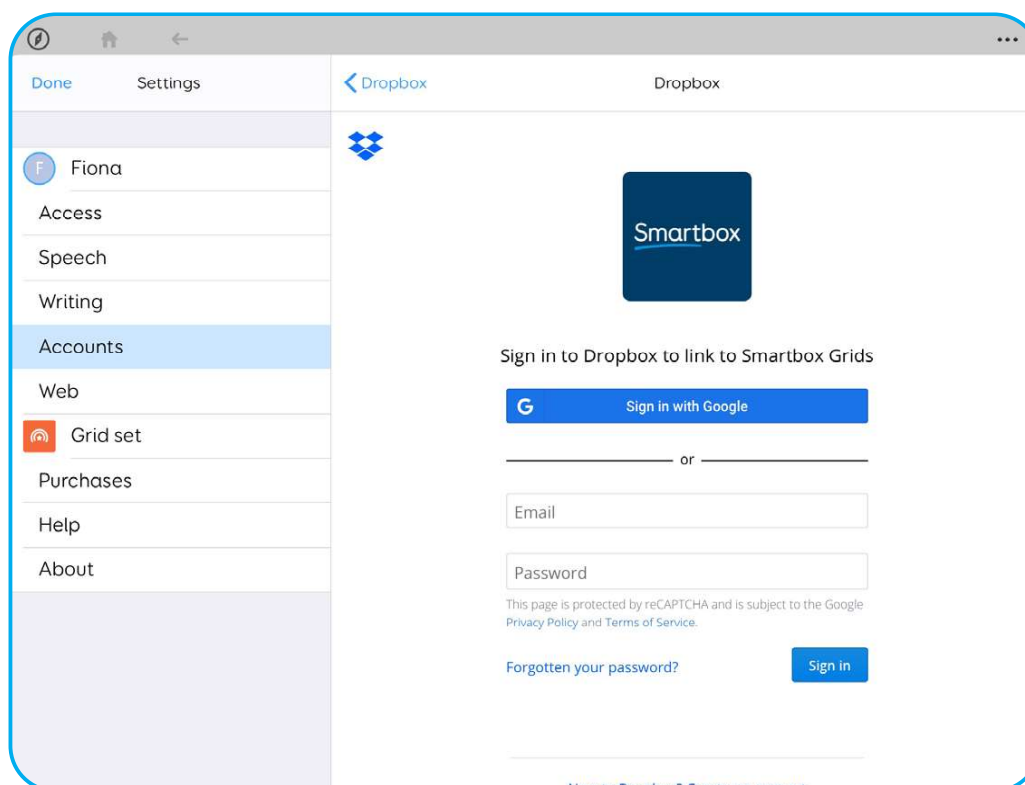

Du kan länka ditt Smartbox-konto till ett Dropbox-konto under Inställningar - konton. Välj Dropbox och logga sedan in för att länka dina konton.

När ditt Smartbox-konto är länkat till Dropbox kommer dina Anpassningar och filer för meddelandebank att överföras automatiskt.


Det innebär också att du kan använda Grid 3 i Windows, och Grid for iPad och hålla Anpassningarna synkroniserade.

34

Säkerhetskopiera din Grid-användare


Du kan säkerhetskopiera din fullständiga användarprofil i Grid för iPad.

I Grid för iPad, gå till **Inställningar**.

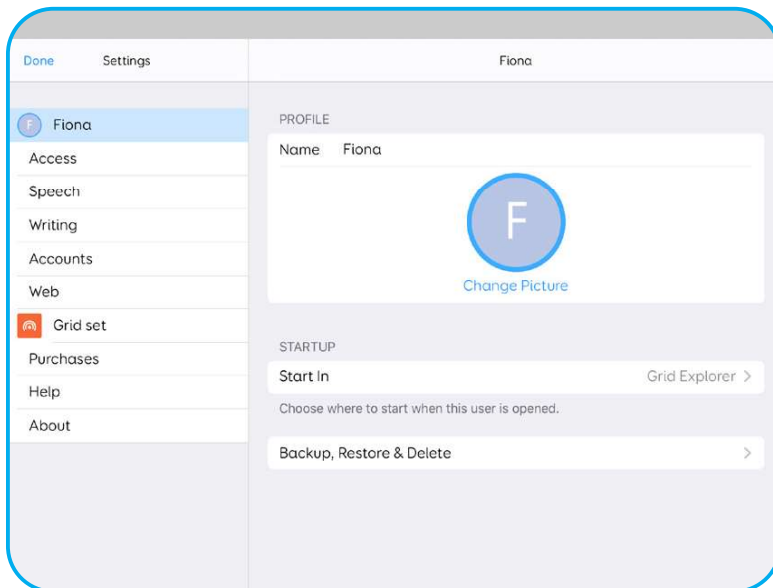


Från användarinställningarna väljer du **Säkerhetskopiera**, **Återställ** och **ta bort**.

Du kan välja **Säkerhetskopiera** för att skapa en säkerhetskopia. Med **Återställ** raderas din användare och ersätts med en tidigare säkerhetskopia. Om du väljer **Ta bort** tas din användare och dina anpassningar bort..

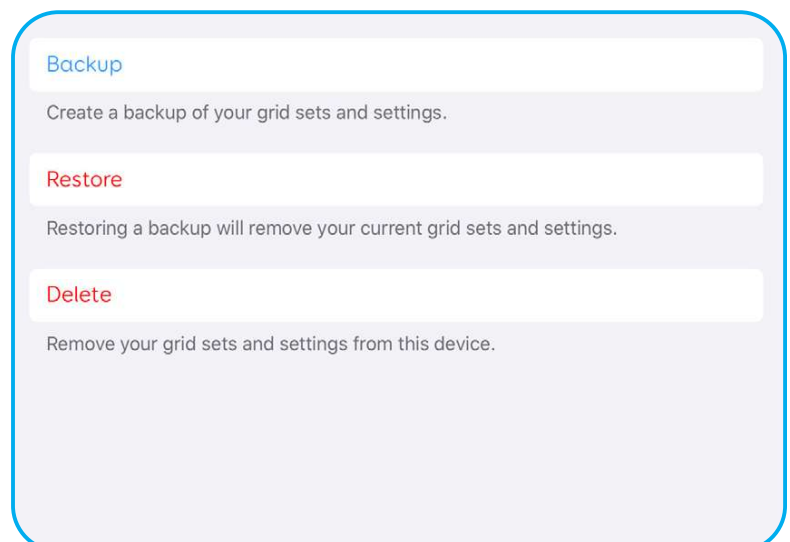

När du väljer Säkerhetskopiera har du flera alternativ för var filen ska sparas eller skickas.

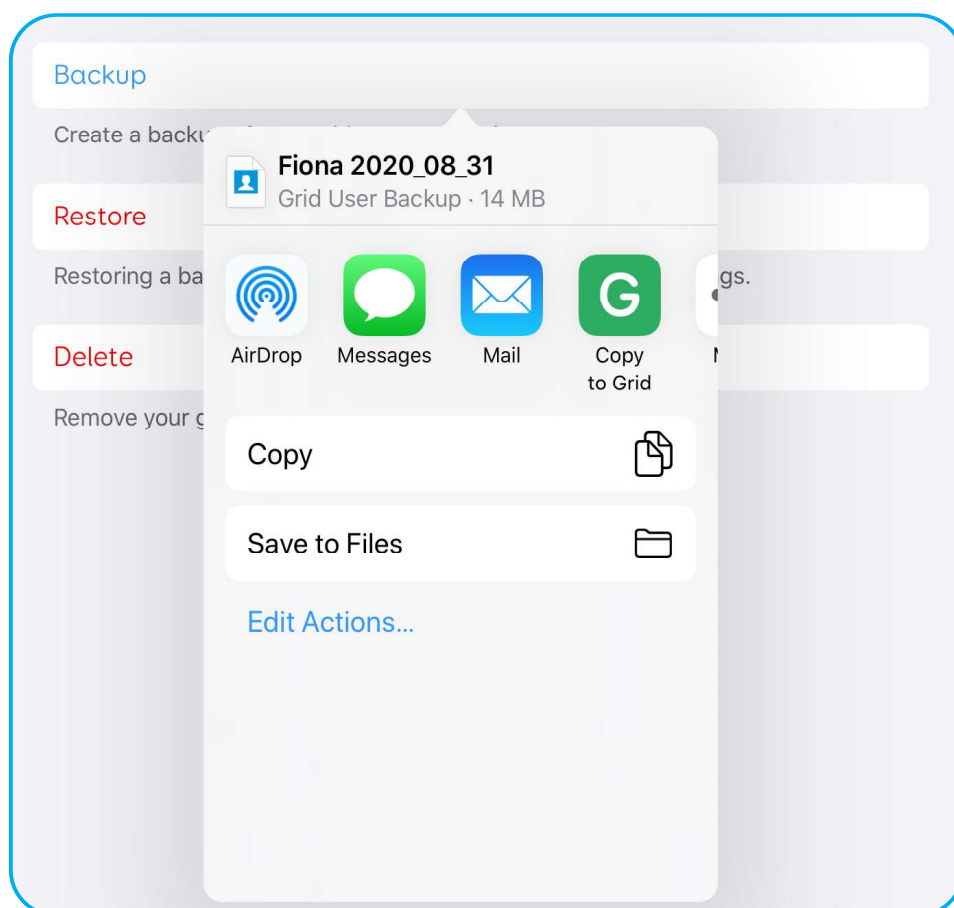

Om du väljer Spara i Filer kan du spara säkerhetskopian till ett externt USB-minne. Du kan också använda e-post appen för att skicka säkerhetskopian via e-post till en annan enhet.

35

Support

Vårt supportteam finns här för att hjälpa dig.



Online chatt

thinksmartbox.com

E-post

support@thinksmartbox.com



Telefon

SE: 08-711 20 30

Reparationer

Vårt reparationsteam kan ta hand om din enhet om den skadas.



Hitta modell- och serienumret

36

När du kontaktar vårt supportteam bör du ha enhetsmodell och serienummer till hands. Det hjälper oss att identifiera den enhet som du har problem med!

Du hittar både modell- och serienumret på baksidan av din Talk Pad.

Så här ser ett modellnummer ut:


TP13B

Serienumret för enheten är placerat under stativet, lyft upp stativet och serienumret finns här:



37

Ta bort din iPad

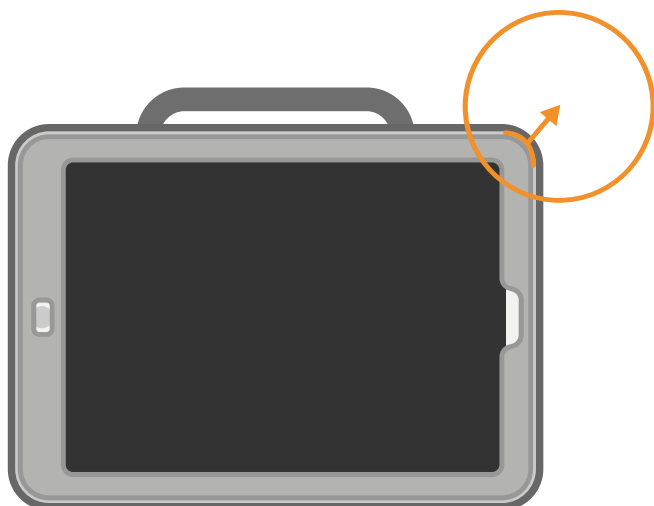

För in ett mynt eller liknande plant föremål i hörnet för att helt dela den främre och bakre kåpan. Du letar efter anslutningen mellan den hårdare plastfronten och gummibaksidan.

Lossa framsidan på skalet från framsidan av din iPad och ta bort det.



Sätta i din iPad

38

Snäpp fast framsidan av höljet på framsidan av din iPad



Skjut in din iPad i det bakre höljet, nederkanten först, sedan den övre och hela vägen runt tills kanterna fastnat

Produktspecifikation

Grid Pad är ett kommunikationshjälpmedel avsett för personer med funktionsnedsättning som inte kan tala eller på annat sätt har komplexa behov vad gäller tillgänglighetsanpassning.

Den fullständiga texten till den tekniska specifikationen finns här: thinksmartbox.com/talk-pad-specification

Modeller

Enhet	Talk Pad 8	Talk Pad 10	Talk Pad 13
Modell	TP08	TP10	TP13








Funktionsmiljö

Temperatur	0 till 40 °C
------------	--------------

Förvarings- och transportmiljö

Temperatur	Temperatur -20 °C till 60 °C
------------	------------------------------

Teckenförklaring

Symbol	Betydelse
	Uttag för hörlurar
HDMI	Uttag för högupplöst mediaöverföring (High definition media input)
	Ladduttag
	CE-märket innebär att produkten uppfyller lagstiftade krav inom EU.
	FCC-märket (Federal Communications Commission) innebär att produkten uppfyller lagstiftade krav i USA.
	WEEE-märket innebär att utrustningen ska kasseras som elektroniskt avfall i enlighet med lokala föreskrifter.
	Strömbrytare
+	Volym upp
-	Volym ned
	Läs bruksanvisningen

Säkerhetsföreskrifter

Grid for iPad är en medicinteknisk produkt klass 1. iPad och fodralet är ett tillbehör till den här enheten som gör att den kan användas i enlighet med dess avsedda syfte.

Specifikationer och standarder finns angivna i avsnittet om överensstämmelse i den här handboken.

För att du ska använda din Talk Pad på ett tryggt och säkert sätt finns det några säkerhetsföreskrifter du bör känna till.

Tillämpning

Avsedd användning

- Det används för att generera syntetiskt tal.

Avsedd användare

Den är utformad för personer med komplexa behov av kommunikation och styrsätt. Complex communication and/or access difficulties may arise as a result of a variety of conditions including but not limited to:

- Utvecklingsstörningar, t.ex. cerebral pares, taldyspraxi, autismspektrumtillstånd (AST/ASD), språkstörning (DLD), allmän utvecklingsförsening.
- Förvärvade funktionsnedsättningar till följd av t.ex. cerebrovaskulär sjukdom (stroke), demens, traumatisk eller förvärvad hjärnskada (TBI/ABI)

Grid Pad kan även användas av personer utan kommunikationsnedsättning som har komplexa anpassningsbehov med hänsyn till datorstyrning, omgivningskontroll och avståndskommunikation, däribland (men inte begränsat till) personer med

- ryggmärgsskador
- degenerativ neuromuskulär sjukdom (t.ex. muskeldystrofi, spinal muskelatrofi).

Avsedd användningsmiljö

Den kan användas i många olika miljöer i vilken personen troligtvis vill använda den enligt ovan beskrivna sätt. Dessa inställningar kan inkludera men är inte begränsade till:

- egen bostad
- gruppbofastad
- servicebostad
- förskola, skola, universitet
- allmänna miljöer som butiker, restauranger

Signifikanta kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder

Trots att Grid Pad är avsedd att vara ett kommunikationshjälpmedel bör den användas i kombination med annan alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Användaren bör inte förlita sig enbart på Grid Pad som enda metod för sin kommunikativa uttrycksförmåga.

Andra AKK-metoder kan omfatta användning av pappersbaserade system, teckenspråk eller användning av ögonpek-ramar. Trots detta är det känt att personer med betydande kommunikations- och/eller åtkomstsvårigheter kommer att förlita sig starkt på samtalshjälpmiddel (i detta fall Talk Pad) för att kommunicera med tanke på den betydande förbättring till uttrycksfull kommunikation som detta ofta medför.

Trots att utrustningen är utformad för att vara ytterst tålig och tillförlitlig finns det alltid en risk att funktionsfel uppstår till följd av strömförsörjningsfel eller andra tekniska fel. Därför bör den inte;

- användas som livsuppehållande utrustning
- användas till trygghetsfunktioner
- utgöra användarens enda möjlighet att ringa ett larmsamtal eller påkalla uppmärksamhet vid nödsituationer
- användas vid administrering av läkemedel
- vara det enda styrsättet för eventuella omgivningskontroll.

Den är inte heller avsedd att tillhandahålla information som ska ligga till grund för beslut om diagnos eller behandling.

När produkten används tillsammans med annan utrustning kan störningar uppstå mellan enheterna. Därför bör Talk Pad inte användas:

- i MRI miljö
- i röntgenmiljö
- i militär miljö
- i miljöer med kraftig radiofrekvent (RF) strålning

Förebygga hörselskador

Om du använder hörlurar och högtalare med hög volym kan det leda till permanenta hörselskador. Håll alltid enhetens volym på en säker nivå.

Hållbarhet

Din Talk Pad är tålig och robust men måste hanteras med försiktighet när du förflyttar dig. Den har dropp-testats till en meter. Observera att detta inte inkluderar några tillbehör.

Vatten och andra vätskor

Enheten är inte skyddad från vattenintrång. Se till att det inte finns vatten eller vätska på enheten, särskilt inte i portarna eller ventilationsgaller.

Incidenter

Om en allvarlig incident inträffar i anslutning till produkten ska detta anmälas till Smartbox (repairs@thinksmartbox.com) och behörig tillsynsmyndighet i landet där du bor.

Kontakt med användaren

Sår på huden kan förvärras vid kontakt med apparatens skärm.

Spädbarn och särskilt känsliga personer bör inte vidröra apparaten om det finns risk för brännskador.

Strömförsörjning och batterier

Din Talk Pad innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri. Alla laddningsbara batterier försämras med tiden. Användningstiden för en Talk Pad efter full laddning kan bli kortare med tiden.

För bästa prestanda bör Talk Pad inte laddas vid temperaturer under 0 °C eller över 45 °C. Vid temperaturer utanför detta intervall kan batteriet laddas långsammare eller inte alls.

Utsätt inte Grid Pad för öppen låga eller temperaturer över 90 °C, det kan orsaka skada på batteriet, få det att antändas eller leda till explosion.

Ladda endast din Talk Pad med den medföljande strömkabeln. Användning av inofficiella nätaggregat kan orsaka allvarliga skador på din Talk Pad och orsaka brand. Om din Talk Pad:s strömkabel är förlorad eller skadad, kontakta leverantören.

När batteriet i din Talk Pad är urladdat och enheten inte är ansluten till en strömkälla stängs enheten automatiskt av för att undvika att skada batteriet och maskinvaran. Operativsystemet försöker göra detta så säkert som möjligt, men vi rekommenderar att du ansluter strömkabeln innan din Talk Pad stängs av.

Batteriet som driver din Talk Pad omfattas av transportbestämmelser. Kontrollera med posttjänsten eller kuriren innan du skickar den för att säkerställa säker leverans av enheten.

Placera inte utrustningen på ett sätt som gör det svårt att dra ur nätsladdens kontakt ur vägguttaget.

Endast auktoriserad personal får byta ut batteriet. I annat fall kan personskador eller skador på utrustningen uppstå.

Utför inte service eller underhåll på enheten när den är i drift. Se till att stänga av enheten och koppla bort alla kablar innan du påbörjar service- eller underhållsarbete på enheten.

Transportera Talk Pad

Vid resor och förflyttningar bör du se till att Grid Pad skyddas mot slag och stötar.

Det finns stränga regler för litiumjonbatterier på flygplan. Reglerna varierar mellan olika flygbolag, så vi rekommenderar att du kontaktar flygbolaget innan du reser.

Temperatur

Blockera inte fläktarna.

Kontrollera att utrustningen är avstängd innan du ställer undan den eller packar ned den i en väska.

Om den används i varma temperaturer eller i direkt solljus kan din Talk Pad uppnå temperaturer som kan utlösa en automatisk avstängning. Detta är en säkerhetsfunktion som förhindrar bestående skador på enheten. Om det inträffar väntar du tills enheten har svalnat innan du startar om den.

Montering

När du monterar din Talk Pad följer du instruktionerna i både din Talk Pad och från tillverkaren av ditt monteringsystem. Vi har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att göra det här till en enkel och säker process, men det är ditt upp till dig att se till att enheten monteras säkert.

Använd monteringslösningen för både Daessy och Rehapt (säljs separat). Se till att det monteringsystem du väljer är korrekt för dina behov och utför en riskanalys om så krävs.

Portar och anslutningar

Tillbehör som ansluts till portar avsedda för IN- ELLER UTGÅENDE SIGNAL måste uppfylla IEC-standard 60601-1 eller 60950-1/62368-1.

Övrig säkerhet

Om skadad, kan små delar lossna från din Talk Pad. Dessa kan utgöra en kvävningrisk. Barn och personer med kognitiv funktionsnedsättning bör övervakas när enheten används. De bör också övervakas när enheten packas upp eftersom förpackningen kan utgöra en kvävningrisk.

Talk Pad är inte steril. Använd inte utrustningen om du har öppna sår eller om du genomgår invasiv medicinsk behandling.

Talk Pad levereras med en nätsladd och kan användas

tillsammans med sladdanslutna tillbehör. Dessa kan utgöra en strypningsrisk.

Epilepsivarning

Vissa personer med ljuskänslig epilepsi kan drabbas av anfall när de utsätts för vissa ljus eller ljusmönster. Om du känner dig konstig eller illamående när du använder Talk Pad – i synnerhet om du använder ögonstyrning – bör du sluta använda utrustningen och konsultera vårdpersonal..

Garanti

Grid Pad omfattas av 2 års standardgaranti från och med inköpsdatum.

Reparation och underhåll

Din Talk Pad är inte en enhet som man själv kan utföra service på. Om din enhet kräver reparation, kontakta din lokala återförsäljare.

Störningar från medicinsk utrustning

iPad innehåller magneter som kan störa medicinska enheter. Kontakta din läkare och tillverkare av medicinska produkter för information som är specifik för din medicinska enhet, och om du behöver upprätthålla ett säkert avstånd mellan din medicinska enhet och iPad eller något av dess tillbehör. Om du misstänker att iPad stör din medicinska enhet ska du sluta använda iPad.

Risk för strypning

Din Talk Pad levereras med en bärrem. Om det finns risk för att användaren stryps av remmen ska du inte använda remmen.

Problemlösning och kundtjänst

I de flesta fall kan du åtgärda eventuella problem genom att starta om enheten. Om du vill starta om enheten håller du strömbrytaren nedtryckt och väljer sedan Stäng av. Om enheten har hängit sig håller du strömknappen nedtryckt i mer än 30 sekunder för att stänga av den. Tryck på den igen för att slå på den igen.

Om problemet inte är löst är du välkommen att kontakta supporten på picomed.se eller thinksmartbox.com/smart-support (på engelska).

Ha serienumret till hands. Det finns under stativet på enheten.

EU/CE-deklaration

Härmed intygar Smartbox Assistive Technology Ltd. att denna produkt överensstämmer med EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter, 2014/53/EU RED och 2011/65/EU ROHS.

Det fullständiga intygandet om överensstämmelse finns här: thinksmartbox.com/talk-pad-DOC

Tillämpliga standarder

ISO 14971:2012 tillämpning av riskhantering på medicintekniska produkter har tillämpats på Talk Pad.

Följande standarder för IT-utrustning har tillämpats på iPad och tillbehör. Detta återspeglar riskerna med produkten när den används på avsett sätt och nivån på de kontroller som krävs för att ge en rimlig försäkran om säkerhet och effektivitet.

Om din användning, användare eller miljö kräver större kontroll kan Smartbox Grid Pad-sortimentet vara ett bättre val för dig.

Standarder för medicinsk elektrisk utrustning har tillämpats på sortimentet med Grid Pad.

Komponent	Högtalare (Lenovo LX001)	12,9-tums iPads (Apple A1895)	7,9-tums, 10,2-tums iPads (Apple A2200, A2198, A2199)
Lagstiftning	2014/35/EU LVD 2014/53/EC RED 2011/65/EU ROHS	2009/125/EC ECO 2014/53/EU RED 2011/65/EU ROHS	2009/125/EC ECO 2014/53/EU RED 2011/65/EU ROHS
Säkerhetsstandarder	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013 EN 50566:2017 EN 50665:2017	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013 EN 50566:2017
EMC-standarder	EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 300 328 V2.1.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 303 417 V1.1.1 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 300 328 V2.1.1 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.1.1 EN 301 511 V12.5.1 EN 301 908-1 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 303 413 V1.1.1	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301 489-19 V2.1.1 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 301 511 V12.5.1 EN 301 908-1 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1_11.1.9 EN 300 328 V2.1.1 / V2.2.1 EN 300 440 V2.1.1 / V2.2.1 EN 303 413 V1.1.1
Andra standarder	ROHS EN 50581:2012 EC 278/2009	ROHS EN 50581:2012 ENERGY: Regulation 1275/2008	ROHS EN 50581:2012

Överensstämmelse med FCC och ISED Canada

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC Rules och ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste klara alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.



Få ut mer av din Talk Pad

Ta reda på mer om redigeringstips
och avancerade inställningar på vår
utbildningscenter online

thinksmartbox.com/learn-at-home

Talk Pad 8, 10 och 13
Svenska
April 2021

Copyright 2020 Smartbox Assistive Technology
thinksmartbox.com