


## Anvisning för rekonditionering, Underhåll och återvinning av din Talk Pad

Anvisningen avser alla modeller av Talk Pad

### Vad innehåller din Talk Pad?

Se början av din Talk Pads manual. Manualen hittar du under respektive Talk Pad på [www.picomed.se](http://www.picomed.se)

### Talk Pad kan från dec 2023 levereras i 3 varianter:

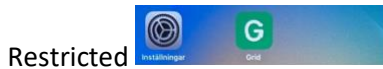

Unrestricted med alla iOS standard appar samt tillåter eget apple ID

### Rengöring av din Talk Pad

- Skärmen kan rengöras med Micro fiber-trasa
- Hela Talk Pad bör regelbundet rengöras med antibakteriell servett, alternativt alkoholbaserad rengöringsduk.
- Spraya inte rengöringsmedel av något slag direkt på din Talk Pad
- Doppa inte Talk Pad i vätska
- Tvätta eller (vid rekonditionering) byt ut eventuell rem eller mjuk väska

### Återställning av din Talk Pad (Restricted och Semi restricted)

- Licensen för Appen **Grid for iPad** kopplas alltid till ett Smartbox konto (e-post och lösenord) och ev. till ett Dropbox konto (valfritt men rekommenderas) Konto och lösenord står på licensdokumentet som medföljer produkten. Går också att få fram via serienummer hos Picomed
- Om Dropbox har skapats, koppla bort från detta via Inställningar i **Grid for iPad** (töm kontot om det ska återanvändas).
- För att Återställa samtalsapparaten radera användaren via Inställningar – ”Profilen” (överst) – ”Säkerhetskopiera, återställa och ta bort användare”.
- Logga sedan in på Smartbox-kontot på nytt. Och lägg till standard-anpassningarna (Voco Cat, Supercore, Text Talker).
- Gå in i appen *Inställningar / Allmänt / nollställ alla inställningar* (tar bort Wifi, Blåtandskopplingar mm)
- Para ihop högtalaren igen via *inställningar/bluetooth*. För att få högtalaren i par-läge håll länge på power tills blått blinkar.

### Återställning av din Talk Pad (Unrestricted)

- Licensen för Appen **Grid for iPad** kopplas alltid till ett Smartbox konto (e-post och lösenord) och ev. till ett Dropbox konto (valfritt men rekommenderas) Konto och lösenord står på licensdokumentet som medföljer produkten. Går också att få fram via serienummer hos Picomed
- Om Dropbox har skapats, koppla bort från detta via Inställningar i **Grid for iPad** (töm kontot om det ska återanvändas).
- Radera allt via *Inställningar/överför eller nollställ iPad*  
Det kommer efter återställning fortfarande stå att "Denna iPad kontrolleras och administreras av Picomed AB"
- Logga sedan in på Smartbox-kontot på nytt. Och lägg till standard-anpassningarna
- Para ihop högtalaren igen via *Inställningar/bluetooth*. För att få högtalaren i par-läge håll länge på power tills blått blinkar.

### Funktionskontroll av din Talk Pad

- Testa att laddare fungerar
- Kontrollera att batteritiden verkar rimlig och inte ligger under 80% av det som anges i manualen
- Starta en anpassning i Grid for iPad, tex Symbol Talker A.
- Kontrollera att ljudet fungerar och kommer från rätt högtalare.
- Kontrollera att handtaget sitter fast.
- Kontrollera att bordsstöd är lagom trögt, annars dra åt med insexnyckel (gäller endast Talk Pads där högtalare är tejpade på stödet)

### Återvinning av din Talk Pad

- Talk Pad ska lämnas för återvinning enligt de lokala krav som finns för elektronik med Litiumbatterier.
- Talk Pad kan också skickas till *Picomed AB, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö* tillsammans med information om att den ska kasseras.

### Reparation

- Talk Pad får inte skruvas isär utan att ha kontaktat Picomed.
- Garanti gäller i 2 år med begränsningar för garanti av batteri.
- Reparationer skickas med felbeskrivning till:  
Picomed AB Lagerhotellet, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö

### Lagerhållning

- Lagras i rumstemperatur
- Optimalt ska batterier lagras med ca 40-50% laddning. Alla batterier har viss självurladdning och behöver underhållsladdas regelbundet. Fulladdat batteri är också acceptabelt.  
Låt ALDRIG ett batteri laddas ur helt, det kan tappa mycket effekt och kanske aldrig går att ladda igen.