

Kom igång med



AKK-programvara för
kommunikation med
symboler och text

Skapad av

Smartbox

Säker användning av Grid

Användning av Grid i medicinsk miljö

Grid får inte vara användarens enda möjlighet att ringa larmsamtal eller påkalla uppmärksamhet vid nödsituationer.

Grid är inte utformat att göra medicinska bedömningar av användare.

thinksmartbox.com/safety

Grid och dina personuppgifter

Grid 3 lagrar inte personuppgifter online utan din tillåtelse. Alla uppgifter om dina sociala konton och e-postkonton lagras lokalt och delas aldrig.

När du skapar ett konto i Grid 3 får du välja mellan olika sekretessinställningar. Med din tillåtelse spelar Grid 3 in samtalshistorik och använder platsdata för att förbättra prediktionen över tid. Uppgifterna lagras alltid lokalt och skickas inte till Smartbox.

thinksmartbox.com/privacy

Vem är Grid för?

AKK-användare



- Kommunikation
- Tillgängliga appar
- Alternativ tillgång till annan programvara
- Styra andra enheter i hemmet

Stöd till AKK-användare



- Ändra inställningar
- Skapa användarprofiler i Grid
- Lägg till anpassningar
- Redigera eller skapa anpassningar
- Redigera eller skapa anpassningar

Grid 3 är en programvara för Windows-enheter

Börja med att läsa handboken och bekanta dig med hur man använder enheten och operativsystemet Windows.

Komma igång för första gången



Välj ikonen Grid på skrivbordet för att starta



Välj din röst



Skapa en användarprofil



Skapa ett Smartbox-konto för att använda fjärrredigering och andra onlinetjänster



Anslut till Dropbox för säkerhetskopiering



Välja anpassningar



Ställ in manövermetod
och dina konton



E-post



Telefon



Kontrollera andra
appar via enheten

“Hej!”

Öppna din
kommunikationsanpassning
och börja att prata!



Utforska och lär



... och mycket mer!


Mer information

I den här handboken finns grunderna för hur du kommer igång med Grid. Om du vill veta mer kan du besöka vår webbplats på thinksmartbox.com.



Lär dig att redigera och anpassa innehållet


Avancerad redigering och avancerade funktioner

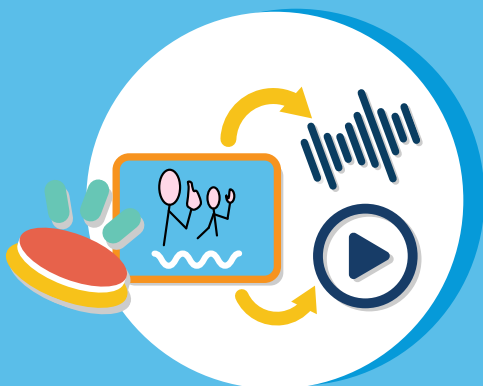

Anpassa manövermetod och andra inställningar



thinksmartbox.com/learn-at-home

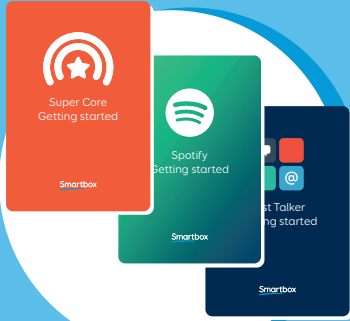

Guider och resurser för anpassning

Vi har flera guider och resurser som hjälper dig att lära om och utforska våra anpassningar.

thinksmartbox.com/learning-resources

Webbseminarier och självstudiekurser

Vi publicerar regelbundna webbseminarier under hela året. Du kan även titta på kortare videor på vår YouTube-kanal.



thinksmartbox.com/youtube

Gå med i gemenskapen

En plats där Grid-användare, professionella och familjer delar idéer, ställer frågor och hjälper varandra.

thinksmartbox.com/facebook





Innehåll

Allmänt om Grid

1.	Vad är AKK?	10
2.	Lär känna Grid	12
3.	Välkommen till Arrangera Grid Utforskare	14
4.	Menyn i Arrangera Grid Utforskare	16
5.	Inställningar för manövermetod i Grid	17
6.	Välj röst	19

Anpassningar

7.	Anpassningar	20
8.	Välj dina första anpassningar	22
9.	Inkluderade anpassningar	24
10.	Lägga till fler anpassningar	26
11.	Alternativa versioner av anpassningar	27
12.	Online Grids	28
13.	Meny för anpassning	30
14.	Anpassning med symbolkommunikation	32
15.	Anpassning med textkommunikation	34
16.	Dela anpassningar	36

Gör mer med Grid

17.	Inställningar	38
18.	Användarprofiler	40
19.	Säkerhetskopiering av användarprofil	41
20.	Redigeringsläge	42
21.	Fjärredigering	44
22.	Uppdatera Grid	46

Få hjälp

23.	Support	47
24.	Säkerhet	48
25.	Systemkrav	50

1

Vad är AKK?

AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation. Personer med lite eller inget tal kan använda AKK som ett hjälpmedel för att kommunicera.


Det finns olika former och typer av AKK där man använder symboler eller text för att välja det man vill säga. AKK-lösningar sträcker sig från enkla lösningar med kort och böcker till högteknologiska kommunikationshjälpmedel som t.ex. Grid Pad.

Grid som en del i AKK


Grid stöder ett brett spektrum av behov - från att lära sig språk med hjälp av forskningsbaserade kärnvokabulär som Super Core till att snabbt bygga meningar med ett tillgängligt texttangentbord.

Välj och anpassa flera röster och vokabulär för att säga det du vill säga på det sätt du vill säga det.



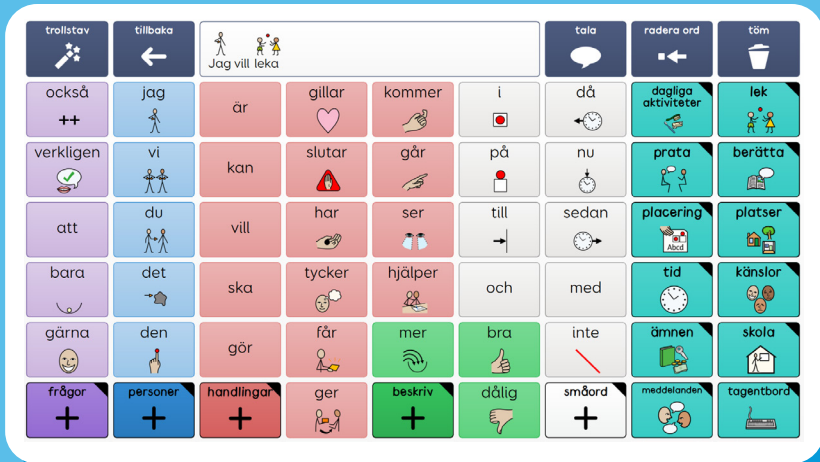

Super Core är en av anpassningarna för symbolkommunikation som finns i Grid

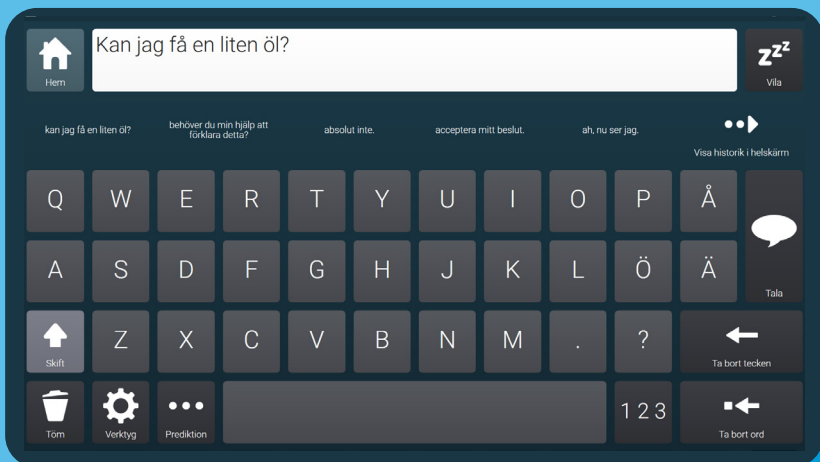

Fast Talker är en textbaserad anpassning med flera verktyg för att snabbt skriva meddelanden.

2

Lär känna Grid



Användarprofiler

Din användarprofil lagrar alla dina anpassningar, preferenser och andra inställningar.



Arrangera anpassningar

Arrangera anpassningar är din hemskärm och det är här du hittar dina anpassningar.



Anpassningar

En anpassning är en app i Grid. De är dina resurser för kommunikation och mycket mer.




Redigeringsläge

Alla anpassningar kan redigeras och göras personliga eller så kan du skapa helt nya anpassningar från grunden.


3

Välkommen till Arrangera Grid Utforskare

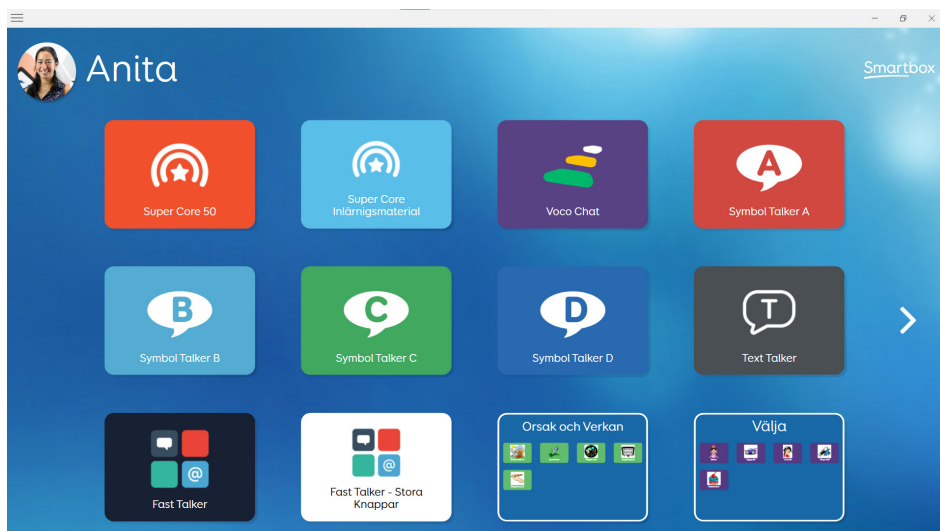

Arrangera anpassningar visar alla dina anpassningar. Du väljer den du vill öppna.

Arrangera anpassningar är fullt tillgänglig. Du använder din manövermetod för att välja anpassning eller navigera mellan sidor.

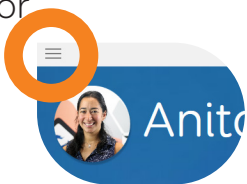

Menyn kan öppnas för fler alternativ.

För att gå tillbaka till Arrangera anpassningar från en anpassning väljer du **Meny - Grid Utforskare**

Tip: Du kan dölja menyn i Arrangera anpassningar under **Inställ-ningar - Dator**. Perfekt om du använder pekskärm med ett raster.



För att komma tillbaka till Arrangera Grid Utforskare tittar du efter ikonen Arrangera Grid Utforskare. Den finns i flera anpassningar.

4

Menyn i Grid Utforskare



Lägg till anpassningar

Öppnar fönstret Lägg till anpassning



Organisera anpassningar

Organisera, skapa mappar och ta bort anpassningar från Arrangera anpassningar



Dela anpassningar

Öppnar fönstret Dela anpassningar



Fjärredigering

Logga in på ditt Smartbox-konto och få åtkomst till anpassningar du är godkänd att redigera



Användare

Öppnar skärmen Grid-användare.



Inställningar

Öppnar dina inställningar i Grid




Hjälp

Öppnar Hjälps-fönstret där du hittar information och kan få mer hjälp med Grid och Smartbox

Inställningar för manövermetod i Grid

5

Grid stöder flera manövermetoder som ställs in i **Inställningar - Manövermetod**.

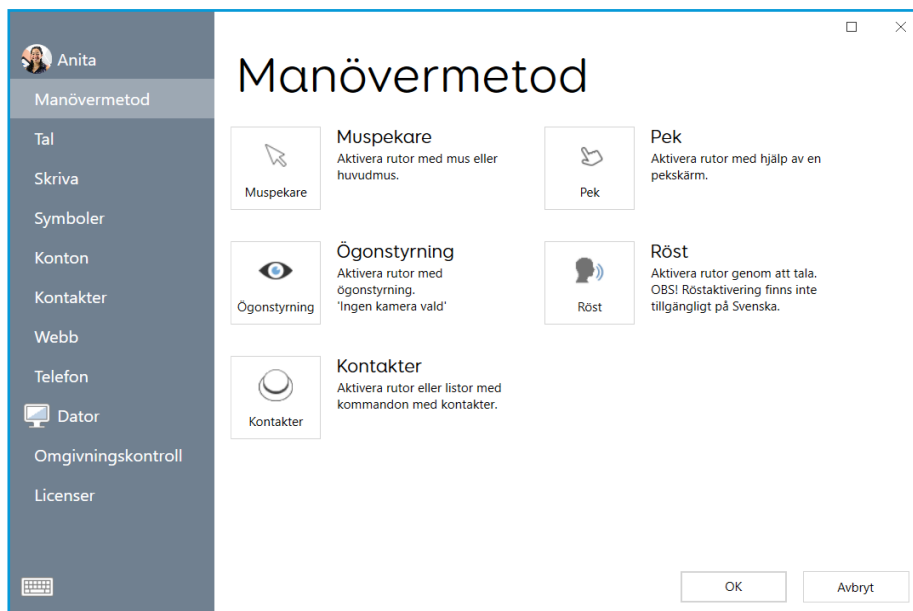

Som standard är Grid tillgängligt via pek, om enheten har en pekskärm, och med mus.

Alla manövermetoder har flera olika inställningar och alternativ som kan optimeras för att passa dina behov.

Pekskärm

Interagera direkt med Grid via pekskärmen på kommunikationshjälpmedlet. Du kan också använda ett

raster för att förbättra precisionen. I inställningar kan du justera hur Grid ska svara när du pekar.

Kontakter

Du kan ansluta Kontakter via 3,5 mm portar, USB-portar eller trådlöst. Grid går att ställa in så att du kan skanna dina anpassningar på flera sätt, och du kan ansluta flera Kontakter.

Ögonstyrning

Grid har stöd för flera vanliga ögonstyrningsenheter. Välj kamera och justera inställningarna efter dina behov.

MusMuspekare

Muspekare omfattar flera olika sorters enheter, från rullbollar till huvudmöss, som alla styr en musMuspekare på skärmen. I Grids inställningar kan du justera hur du interagerar och klickar på skärmen.

Tip: Grid kan också röststyras om du har tal. Ställ in och säg "Hey, Grid 3!" för att starta.

Välj röst

6

Grid har över 200 röster på 32 språk. De finns under Inställningar – Tal. Använd listrutan med länder för att hitta den röst och dialekt du vill ha.

Välj **Lyssna** för att höra en röst.

Om en röst är grå kan du hämta den till enheten.

Du kan justera röstens tonhöjd och hastighet för att göra den personlig så att den passar dig.voices from many providers.



”Fantasi är så mycket viktigare än kunskap!”

Tips: Grid stöder dessutom personliga röster från flera tillverkare. Dessa görs ofta med hjälp av inspelningar verkliga röster.

7

Anpassningar



Anpassning

En anpassning är en samling sidor som är länkade tillsammans. Varje anpassning är utformad för en specifik uppgift, t.ex. symbolkommunikation eller e-post.

Sidor

En sida består av rader och kolumner som innehåller rutor. Alla sidor kan kontrolleras med valfri manövermetod.



Rutor

Rutor kan innehålla ord, meddelanden, symboler och många andra funktioner.

Många av våra anpassningar har guider och handböcker som hjälper dig att komma igång och ger tips om hur de fungerar.

Du hittar dem på vår webbplats
thinksmartbox.com



8

Välj dina första anpassningar

I skärmen med anpassningar har vi delat upp anpassningarna i kategorier. Du kan välja vilka av dessa du vill lägga till i din profil.



Symbolkommunikation

Symbolbaserade anpassningar kan användas till att utforska kärnvokabulär eller till att bygga meningar utifrån ämnen. Dessa inkluderar t.ex. Super Core, WordPower med flera.



Textkommunikation

Textbaserade anpassningar erbjuder flera tangentbordslayouter och andra funktioner som t.ex. meddelandebanker. Dessa inkluderar t.ex. Fast Talker, Text Talker och Alpha Core.



Interaktivt lärande

Roliga aktiviteter som kan användas för att introducera orsak och verkan, valfrihet och är bra sätt att utforska sin manövermetod med hjälp av animeringar och spel.



Tillgängliga appar

Använd sociala medier med appar för Twitter och Facebook, lyssna på musik med Spotify, titta på videor med YouTube, surfa på internet och mycket mer.



Servus omgivningskontroll

Om ditt kommunikationshjälpmedel har inbyggd omgivningskontroll kan du styra TV, stereo, eluttag och annat från Grid.



Datorkontroll

Du kan använda Grid till att styra Windows och få åtkomst till andra program som Microsoft Office, webbläsare, spel och annat.

Om du vill börja med en tom profil väljer du Välj inga.

Du kan alltid lägga till och ta bort anpassningar senare, så du behöver inte oroa dig för att göra fel under det här steget.

9

Inkluderade anpassningar

Symbolkommunikation


- Super Core 50
- Super Core inlärningsmaterial
- Voco Chat
- Symbol Talker A, B, C och D
- Symojoji



Super Core 50

Textkommunikation


- Fast Talker
- Fast Talker med stora rutor
- Text Talker

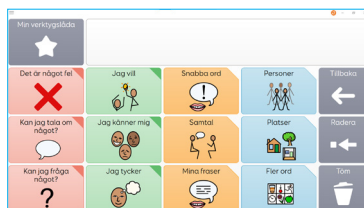

Voco Chat

Interaktivt lärande

- Orsak och verkan
- Val
- Utmaningar
- Visuella scener

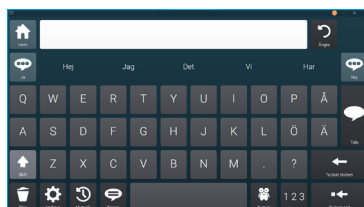

Fast Talker

Tillgängliga appar

Facebook

Twitter

YouTube

Spotify

Kamera

Klocka

Webbläsare

Kontroller

Servus omgivningskontroll


Enkel Servus

Datorkontroll


Datorkontroll för Kontakter




Facebook

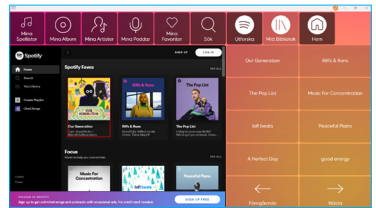

Spotify

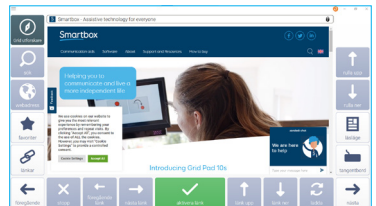


Webbläsare

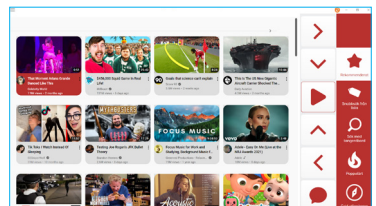

YouTube

Lägga till fler anpassningar

Du kan lägga till fler anpassningar i Arrangera anpassningar genom att välja Lägg till anpassningar i

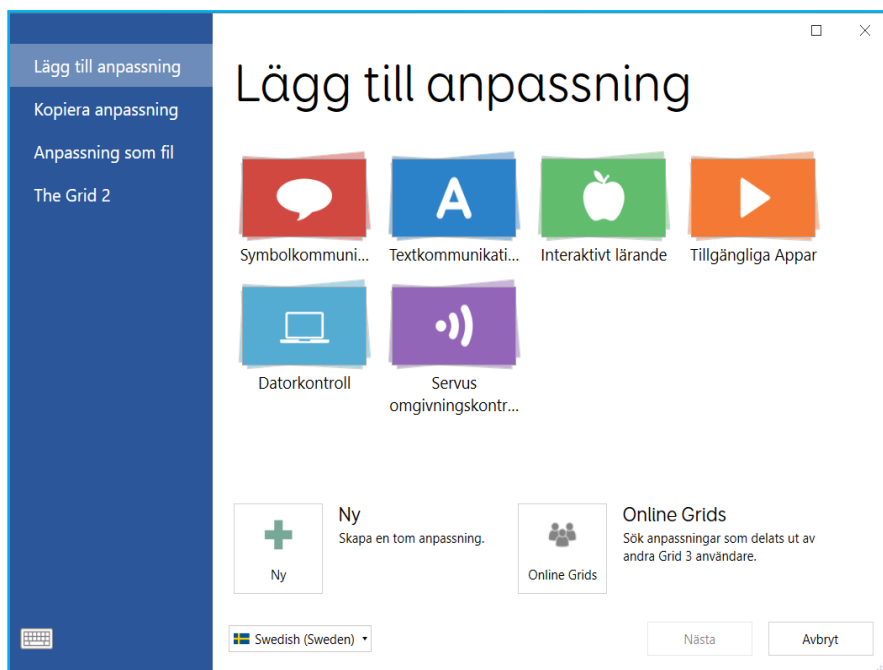

menyn.


Anpassningar är organiserade i kategorier. Du kan läsa mer om varje anpassning innan du lägger till den i Arrangera anpassningar.

Alternativa versioner av anpassningar

11


Till många anpassningar finns alternativa versioner. Dessa inkluderar versioner med olika symboluppsättningar, justeringar för specifika manövermetoder som pekskärm eller Kontakter, alternativa tangent-bord med mera.

Du kan söka efter alternativa versioner i fönstret Lägg till anpassningar.

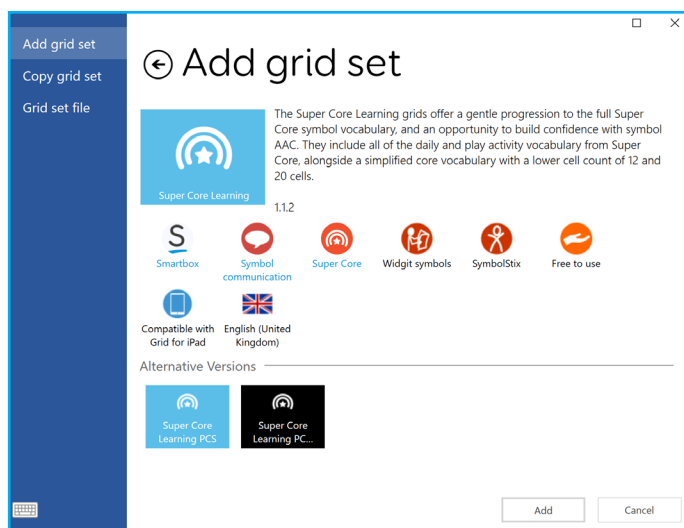

Andra språk


Många anpassningar har översatts till andra språk. Du kan ändra språk i fönstret Lägg till anpassningar via rullmenyn.

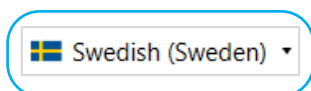

12

Online Grids

Online Grids är platsen där du hittar anpassningar för en mängd olika uppgifter. Här finns hundratals anpassningar skapade av Grid-användare runt om i världen.

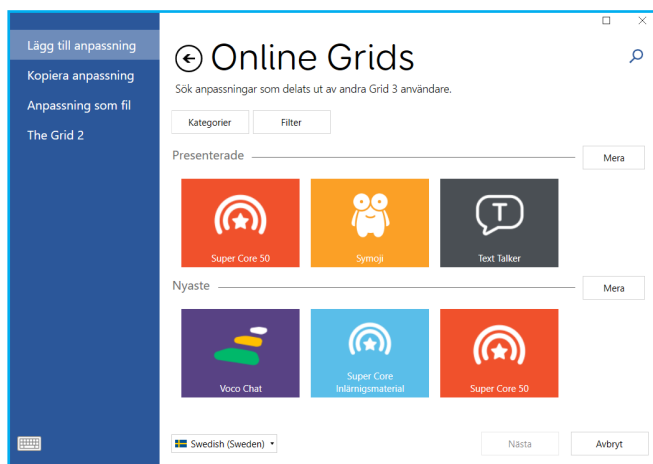

När du väljer Online Grids i fönstret Lägg till anpassningar ser du aktuella och nya anpassningar. Du kan söka med förstoringsglasat och använda kategorier och filter för att bläddra efter det du söker.

Här är tre anpassningar som delas av vårt Smartbox-team.




Soundbox av Jim

Med anpassningen Soundbox kan alla som använder Grid 3 skapa musik.


My Communication Passport av Jess

Ett praktiskt verktyg för att förmedla viktig information om människor med svåra kommunikationsproblem som har svårt att tala för sig själva.

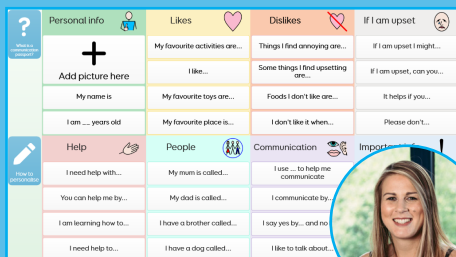

Positioning Guide av Neil

En bra anpassning som kan användas för att ställa in ögonstyrda enheter.

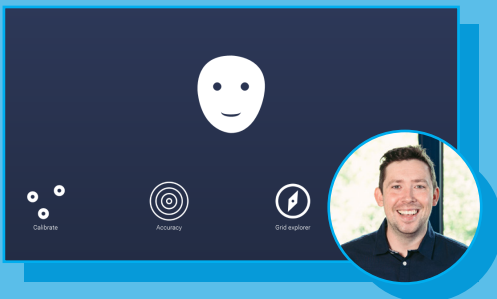

Meny för anpassning

När du befinner dig i en anpassning ändras menyn i Grid så att du får fler alternativ.



Startsida

Gå tillbaka till anpassningens startsida



Tillbaka

Gå tillbaka en sida



Arrangera anpassningar

Stäng anpassningen och gå tillbaka till Arrangera anpassningar



Redigera sida

Öppna redigeringsläge för att börja redigera anpassningen



Redigera ordlista

Redigera eventuell ordlista i anpassningen



Inställningar

Öppnar inställningar i Grid



Sök ord

Öppna verktyget Sök ord. Här kan du hitta ord i anpassningen och se grafiskt var de finns



Skriv ut

Skriv ut en anpassning eller en sida




Manual till anpassningen

Öppnar en webbläsare för att hämta anpassningens dokumentation




Hjälp


Öppnar hjälpfönstret där du får reda på var du kan få ytterligare stöd

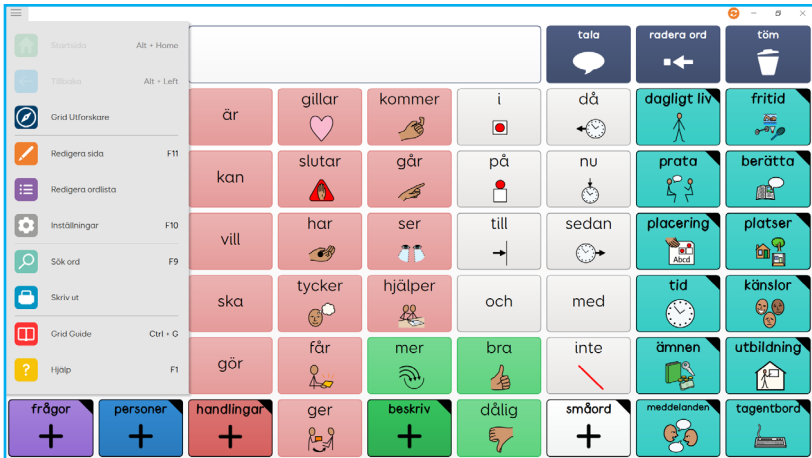

Anpassning med symbolkommunikation

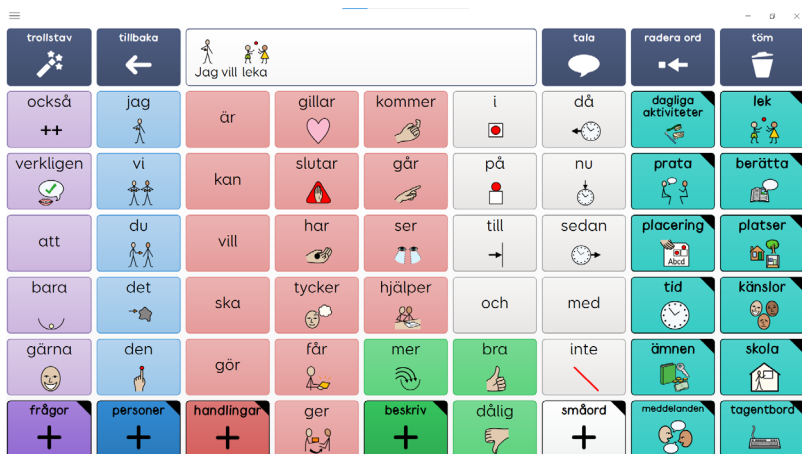


Detta är **Super Core 50** som är en symbolbaserad anpassning med kärnvokabulär. Anpassningen är uppdelad i rutor och varje ruta innehåller ett ord och en symbol.

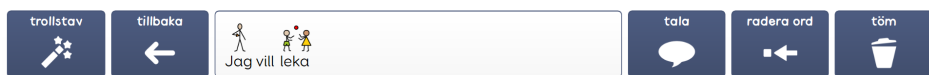

Rutorna på den översta raden i anpassningen har olika kommandon och en skrivytta.

När du bygger din mening visas orden här.

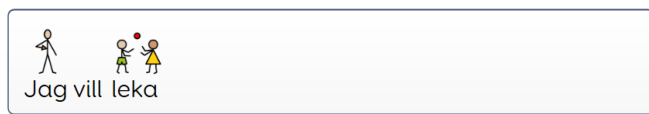


Anpassningen Super Core är utformad med kärnord på startsidan. När du bygger din mening märker du att vårt smarta grammatiksystem uppdaterar rutorna så att det blir lättare att bygga meningar.

Några av rutorna är markerade med en liten triangel i hörnet. Dessa är Gå till rutor. De tar dig till en ny sida där det finns fler ord, ibland kring ett specifikt ämne eller tema. Om du använder knappen tillbaka eller väljer tillbaka i menyn kommer du till föregående anpassning.



Anpassning med textkommunikation

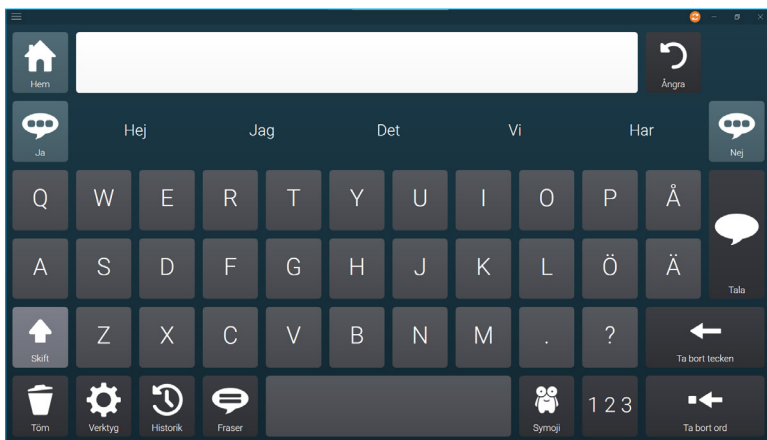


Detta är **Fast Talker**, som är en textbaserad anpassning med flera kraftfulla funktioner som hjälper dig att skriva meddelande mer effektivt.

Ditt meddelande visas i skrivytan längst upp i anpassningen och du ser kommandot Tala till höger.

Prediktion och samtalshistorik


Du kan växla mellan prediktion och samtalshistorik med Historik-rutan.

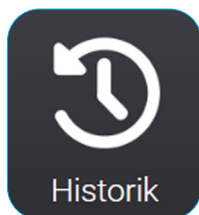

Rutorna för prediktion och samtalshistorik visas under skrivytan. Anpassningen använder SwiftKey-prediktion som föreslår ordet du håller på att skriva och även nästa möjliga ord.

Samtalshistoriken kommer ihåg allt du säger och hjälper dig att hitta det igen snabbt. Skriv in ett nyckelord i meningen, till exempel "kaffe", för att se relaterade fraser.

Alternativa tangentbord

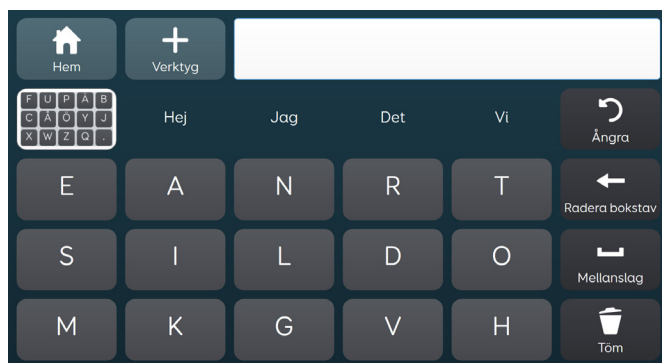

Många textbaserade anpassningar har alternativa tangentbordslayouter, som stora rutor, kontaktfrekvenser, AEIOU eller andra.

Du hittar dem antingen under inställningarna i anpassningen eller som alternativversion i fönstret **Lägg till anpassningar**.

Du kan dela anpassningar med andra och flytta dem mellan enheter.

Online Grids

Du kan dela anpassningar med andra Grid-användare via Online Grids. För att göra detta måste du ha ett Smartbox-konto. I Arrangera anpassningar väljer du **Meny - Dela anpassningar**.

Här ser du alla delade anpassningar.

Välj Lägg till för att visa en lista med anpassningar som du kan dela med andra.

Välj anpassningen som du vill dela, beskrivning den och ge den ett lämpligt namn.

Anpassningar som laddas upp till Online Grids kan alltid uppdateras och tas bort vid ett senare tillfälle.

Spara anpassningsfil

Anpassningar kan sparas som anpassningsfiler. Gå till **Meny - Dela anpassningar - Anpassningsfil**. Här väljer du en anpassning och sedan Spara.

Du väljer var på enheten du vill spara anpassningen. Den kan även sparas på USB-minnen, externa enheter eller andra delade mappar.




Du öppnar en anpassningsfil genom att dubbelklicka på den. Den läggs då till i Arrangera anpassningar.

Använda flera enheter

Om du loggar in på dina Smartbox- och Dropbox-konton från en annan enhet eller i Grid for iPad synkroniseras dina anpassningar och inställningar automatiskt. Du kan redigera och uppdatera dina anpassningar på båda enheterna och ändringarna återspeglas på båda platserna.

Dina inställningar för Grid hittar du i **Meny - Inställningar**.

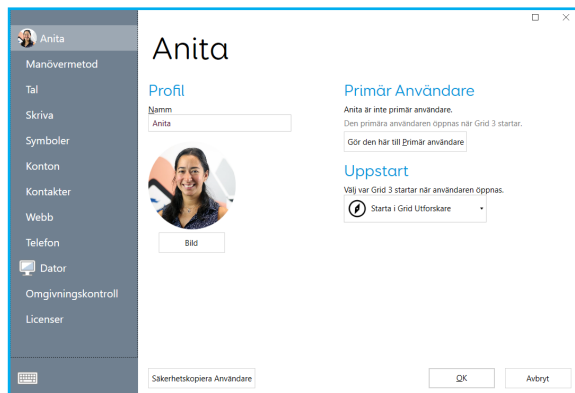

Användare

Här kan du ändra profilnamn, bild och startalternativ. Du kan också välja att göra dig själv till huvudanvändare som automatiskt öppnas vid start.

Manövermetod

Ställ in manövermetoder. Välj mellan Kontakter, pekskärm, Muspekare, ögon- och röststyrning.

Tal

Justera alla röst- och talalternativ här, samt auditiv feedback om den är aktiverad.

Skript

Bestäm vad som händer när du skriver meddelanden, inklusive automatiska ersättningar, samtalshistorik och

symboler.

Konton

Hantera dina Smartbox-, Dropbox- och e-postkonton.

Kontakter

Lägga till och hantera kontakter för telefon- och e-postanpassningar.

Webbplats

Hantera favoriter och alternativ för innehållsfilter.

Telefon

Anslut en smarttelefon till Grid om du vill ringa och skicka sms.

Dator

Bestäm hur menyraden visas och välj webbkameror och skrivare för Grid.

Omgivningskontroll

Ställ in enheter för omgivningskontroll för kompatibel maskinvara.

Licenser

Kontrollera om du har aktiva licenser för röster, symbolbibliotek eller anpassningar.

Grid stöder flera användarprofiler med:

- Anpassningar
- Kontoinformation
- Inställningar
- Meddelandebanksfiler
- Layout i Arrangera anpassningar
- Prediktion
- Ordlistor
- Kontakter
- Anteckningar
- E-post och sms

Du kan göra en användare till huvudanvändare som öppnas när Grid startar.


Tip: Du kan också välja vilken anpassning som ska öppnas när Grid startar så du kan börja prata direkt!



Säkerhetskopiering av användarprofil

19

Om du vill säkerhetskopiera hela din användarprofil för att skydda den eller flytta den till en annan enhet kan du göra en kopia av din Grid-användare genom att välja **Meny - Inställningar - Användare**.

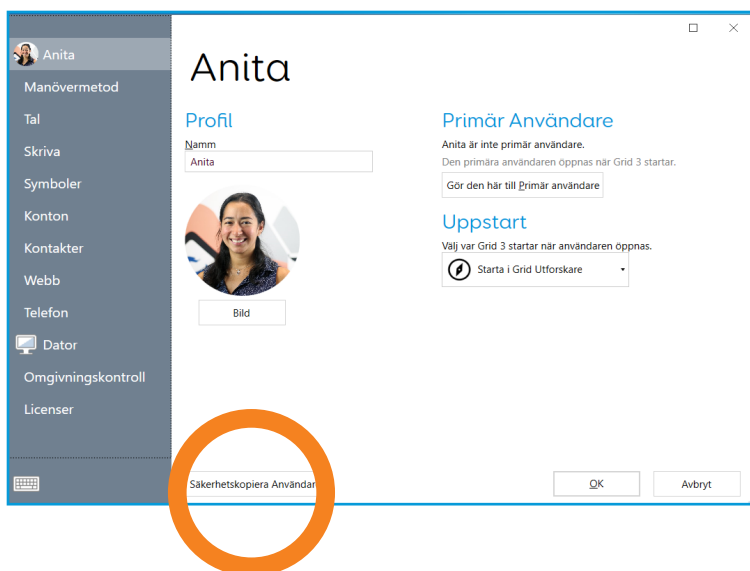

Längst ned i fönstret för användarinställningar visas knappen säkerhetskopiera användare. När du klicka på knappen får du välja var du vill spara säkerhetskopian.


Återställa en säkerhetskopia

Du kan återställa en säkerhetskopia genom att gå till **Meny - Användare**. Välj Återställ säkerhetskopia för att hitta säkerhetskopian på enheten och välj öppna.

I redigeringsläget kan du redigera och anpassa anpassningar eller skapa nya anpassningar från början.

I redigeringsläge har du full kontroll över hur anpassningen ser ut och du kan ändra hur varje ruta beter sig.

Det kan vara allt från att lägga till ett ord i en anpassning genom att skapa en ny ruta eller att lägga till ett mer komplext kommando i en ruta som att ta ett foto med enheten.

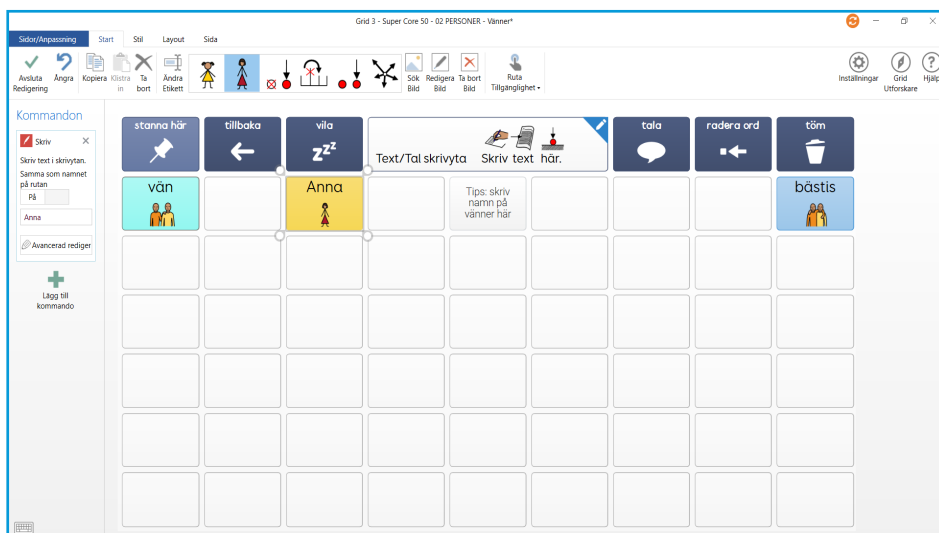




Utseende

Bestäm storlek, färg och form för varje ruta.

Etikett

Justera storlek, färg, storlek och teckensnitt på etiketten.

Hej!
Hej!
Hej!

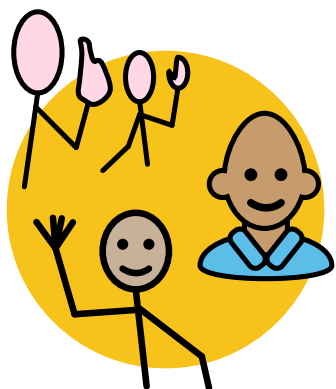

Symbol

Du kan ändra eller redigera symbolen i varje ruta. Du kan till och med välja ett foto.

Läs mer på vårt utbildningscenter för Grid
thinksmartbox.com/training-centre


Med fjärredigering kan du ge någon annan åtkomst till dina anpassningar så att de kan göra ändringar åt dig från en annan enhet. Du kan fortsätta att använda Grid 3 samtidigt som någon annan redigerar innehållet.

För att aktivera fjärredigering måste du vara inloggad till ett Smartbox- och Dropbox-konto.

Ge någon annan åtkomst till dina anpassningar

Du kan tillåta andra användare att logga in på en annan enhet för att redigera dina anpassningar.

Välj **Meny - Inställningar - Konton** och välj sedan Fjärrredigerare.

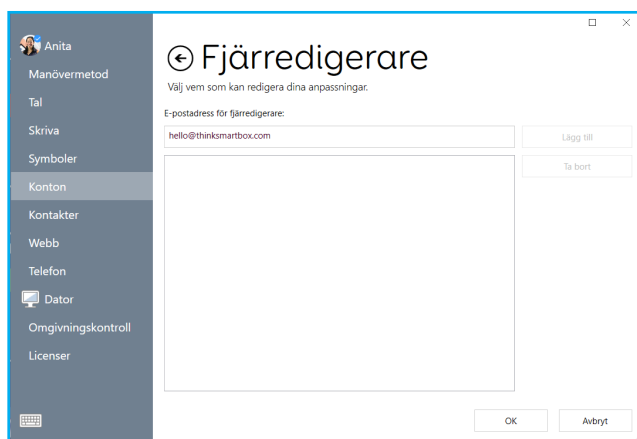

Ange e-postadressen till den önskade redigeraren och välj Lägg till.

Hen får ett e-postmeddelande med en uppmaning att skapa ett Smartbox-konto och att installera Grid.

Tips: Du behöver ingen Grid-licens för att fjärredigera en användares anpassningar!

Redigera en användares anpassningar

Om du har fått åtkomst att fjärredigera en användares anpassningar loggar du in från Grids startskärm. Välj Fjärredigering och logga in med ditt Smartbox-konto.

Då visas en lista över användare som har bjudit in dig som redigerare. Genom att välja en användare kommer du till deras Arrangera anpassningar. Härifrån kan du öppna anpa-ssningar och växla till redigeringsläge för att göra ändringar.

Uppdatera Grid

Grid utvecklas kontinuerligt för att ge nya funktioner, nytt innehåll och fixa buggar. Vi rekommenderar att du alltid håller Grid uppdaterat.

När enheten är ansluten till internet söker Grid efter nya uppdateringar när programmet startar. Om det finns en uppdatering visas den här aviseringen längst upp till höger i fönstret. Klicka på ikonen för att starta uppdateringen.



Så här använder du Smartbox Update

Du kan söka efter uppdateringar manuellt med hjälp av Smartbox Update. Smartbox Update-programmet finns på Start-menyn.

Support

23

Vårt supportteam hjälper dig gärna.



Onlinechatt

Thinksmartbox.com

E-post

support@thinksmartbox.com



Telefon

UK: 01684 578868

US: (878) 302-3674

Avsedd användning

- Grid 3 används som samtalshjälpmiddel (VOCA – voice output communication aid).
- Grid 3 används för att styra en Windowsdator.
- Grid 3 kan styra externa enheter via så kallad omgivningskontroll.

Avsedd användare

Grid 3 är utformat för individer med komplexa kommunikations- och/eller åtkomstbehov.

Avsedd användningsmiljö

Grid 3 kan användas på en mängd olika platser:

- egen bostad
- gruppbofastad
- servicebostad
- förskola, skola, universitet
- offentliga miljöer som t.ex. butiker, restauranger
- vårdmiljöer (sjukhus, rehabilitering och vårdcentraler)

Viktiga kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder

Grid 3 är utformat för att underlätta expressiv kommunikation. Grid 3 ska användas i tillsammans

med flera olika metoder för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och ska inte vara enda kommunikationsmetoden som gör det möjligt för en individ att kommunicera på ett uttrycksfullt sätt. Andra AKK-metoder kan omfatta användning av pappersbaserade system, teckenspråk eller användning av ögonpekningssramar.

Trots att enheten är utformad för att vara ytterst tålig och tillförlitlig finns det alltid en risk att funktionsfel uppstår till följd av strömförsörjningsfel eller andra tekniska fel. Av dessa skäl ska Grid 3 inte:

- användas som livsuppehållande utrustning
- användas till trygghetsfunktioner
- utgöra användarens enda möjlighet att ringa larmsamtal eller påkalla uppmärksamhet vid nödsituationer
- användas vid administrering av läkemedel
- vara det enda styrsättet för enheter i omgivningen (omgivningskontroll)

Grid 3 är inte heller avsedd att tillhandahålla information som ska ligga till grund för beslut om diagnos eller behandling.

Processor	1,33 GHz Quad Core eller snabbare
Internminne	2 GB RAM eller mer
Hårddisk	3 GB + HDD-utrymme
Operativsystem	Windows 8, 8.1, 10 Home och Pro



Gå med i Smartbox Community

En gästvänlig plats där Grid-användare delar idéer, ställer frågor med mera.

thinksmartbox.com/facebook



Få ut mer av Grid

Få redigeringstips och lär om avancerade inställningar på vårt online-utbildningscenter

thinksmartbox.com/learn-at-home

Document: Getting Started with Grid - SE- A
Language: Swedish (SE)
Based on: Getting Started with Grid - UK - A
Date of issue: June 2022

Copyright 2022 Smartbox Assistive Technology
thinksmartbox.com

G3-MAN-SE-A